



Bedienungsanleitung

# Quasselkiste

## Wortschatz-App

10003v4



Prentke Romich Deutschland  
Unterstützte Kommunikation

# Hinweise

Quasselkiste-App Bedienungsanleitung © Prentke Romich GmbH 2017-2023. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Deutsche Wortstrategie™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRIO®, Quasselkiste™, Realize Language™, Semantic Compacti-on®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, Via®, VersaChat™, VersaSpeaker™, VersaWrap™ und VocabPC™ sind Warenzeichen von PRC-Saltillo.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID® und TrueDepth® sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und in anderen Ländern.

AcapelaGroup® und my-own-voice sind Warenzeichen der AcapelaGroup. AcapelaGroup, © 2020-2023. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die Acapela Text-to-Speech-Technologie und die in der Software verwendeten synthetischen Stimmen dürfen nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von PRC-Saltillo in Lizenz verwendet.

CAVIWIPES ist ein Warenzeichen der Metrex Research LLC.

Dropbox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dropbox, Inc.

iOS® ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und in anderen Ländern, das unter Lizenz verwendet wird.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

Microsoft® und Windows® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

PCS® ist ein Warenzeichen der Tobii Dynavox LLC. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung.

The Voice Keeper und Almagu Voices sind Eigentum von Almagu.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung gemachten Angaben ergeben.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>EC</b>   <b>REP</b> </div>	
<b>PRC-Saltillo</b> 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D · 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D · 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de

## Dokumentenversion

100003v4 – 01.02.2023

Bezieht sich auf die Version 2.41 der App Quasselkiste in Verbindung mit den Modellen PRIO 8, PRIO 10, Via Mini und Via Air.

# INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise.....	2
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE QUASSELKISTE</b>	<b>9</b>
Willkommen bei der Quasselkiste .....	10
Kopie der mitgelieferten Quasselkiste anfertigen.....	11
<b>AUFBAU DER QUASSELKISTE</b>	<b>13</b>
Die Oberfläche der App.....	14
Die Startseite .....	14
Themenleiste.....	15
Grammatiktasten .....	16
Wortfeldtasten.....	16
Funktionstasten .....	17
Beschreibung der Funktionstasten.....	17
Alles sprechen.....	17
Wort löschen /Alles löschen.....	17
Weitere Funktionen der Standard-Themenleiste anzeigen .....	18
Die Kategorien (Wortfelder) .....	19
Bildung der Nomen.....	21
Plural .....	21
Bildung der Verben .....	22
Vergangenheit .....	23
Partizip Perfekt .....	23
Imperativ.....	24
Verbphrasen.....	25
Bildung der Adjektive .....	26
Steigerungsformen.....	27
Adverbien .....	28
Präpositionen.....	29
Konjunktionen .....	29
Pronomen .....	30
Personalpronomen.....	30
Possessivpronomen .....	30
Die übrigen Pronomen .....	31
Fragewörter.....	32
Artikel.....	33
Der bestimmte Artikel.....	33
Der unbestimmte Artikel .....	33
Zahlwörter.....	34
Die Taste TALKER .....	35
Die Taste ZAUBERER .....	36
Die Seiten KALENDER und UHR.....	37
Die Seite KALENDER.....	37
Die Seite UHR .....	37
<b>VOKABULAR BEARBEITEN</b>	<b>39</b>
Seite bearbeiten.....	40
Taste bearbeiten .....	41

Taste bearbeiten beenden.....	41
Tasten anordnen / verschieben .....	42
Taste entfernen .....	43
Tasten kopieren .....	44
Tastenlayout kopieren.....	46
Neue Seite erzeugen .....	48
Seite löschen.....	50
Weitere Seite bearbeiten .....	51
Seitenlayout bearbeiten .....	51
Vokabularvorgaben (Layout aller Seiten eines Vokabulars bearbeiten).....	52
Seite importieren/kopieren.....	53
Seite importieren .....	53
Seite kopieren .....	53
Seite bearbeiten beenden .....	54
Optionen beim Gestalten einer Taste.....	55
Label .....	55
Mitteilung.....	55
Mitteilung sprechen .....	55
Bild (Symbol).....	55
Bild auswählen .....	55
Bilder suchen .....	56
Bild importieren.....	56
Bild entfernen .....	56
Label oben .....	56
Fett.....	56
Kursiv .....	56
Transparent.....	57
Sichtbar .....	57
Schriftart.....	57
Schriftgröße .....	57
Schriftfarbe .....	58
Hintergrundfarbe.....	58
Rahmenfarbe.....	58
Rahmenbreite.....	58
Tastenfunktion .....	58
Bearbeiten.....	58
Hinzufügen .....	59
Tastenfunktionen .....	60
<b>WORTSUCHE</b> .....	<b>65</b>
Menü Wortsuche .....	66
Taste mit Funktion <i>Wort suchen</i> belegen .....	67
Gesuchtes Wort in der Quasselkiste abrufen.....	68
<b>EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>69</b>
Profile .....	70
Profil speichern.....	70
Profil laden.....	70
Feedback.....	70
Tastenklick .....	70
Zurück-Taste verbergen .....	70
Anzeigeformat .....	70
Statusleiste .....	70

Gitter benutzen .....	71
Menüsperrung .....	71
Passwort Menüsperrung.....	71
Menü mit Passwort entsperren .....	71
Sprache.....	71
Stimme .....	71
Geschwindigkeit .....	72
Stimmhöhe.....	72
Telefon-/FaceTime-Stimme.....	72
Textfenster .....	72
Textfenster verbergen .....	72
Kopieren und Einfügen erlauben .....	72
Automatische Großschreibung.....	73
Schriftart.....	73
Hintergrundfarbe .....	73
Anzahl der Zeilen .....	73
Sichtbarer Cursor.....	73
Cursor platzieren erlaubt .....	73
Textfenster-Aktion .....	73
Gesprochenes Wort hervorheben .....	73
Hervorhebungsfarbe Telefon/Factime.....	74
Sprachausgabe .....	74
Zeichen sprechen .....	74
Wort sprechen .....	74
Satz sprechen .....	74
Textfenster automatisch löschen .....	74
Verhindere Unterbrechung.....	74
Sprachdatenaufzeichnung.....	74
Sprachdaten aufzeichnen.....	75
Privatsphärenpasswort.....	75
Privatsphärenpasswort ändern .....	75
Privatsphärenpasswort löschen .....	75
Aufzeichnung löschen .....	75
RealizeLanguage einrichten .....	75
Autom. hochladen .....	76
Aktueller Benutzer.....	76
Tasten .....	76
Beim Loslassen auslösen .....	76
Verweildauer .....	76
Loslassdauer .....	76
Auslösen anzeigen.....	76
Hintergrundfarbe.....	76
Raster anzeigen .....	77
Dynamische Labels .....	77
Tastenrandgröße.....	77
Soziale Netzwerke .....	78
Soziale Netzwerke erlauben .....	78
Verstärker .....	79
Verstärker auswählen.....	79
Verstärker einrichten.....	79
Verstärker-Firmwareupdate.....	80
Scanning .....	80
Scanning aktivieren.....	80

Tasten konfigurieren .....	80
Auto-Scan.....	80
Taste-Halten-Scanning (nur bei Auto-Scan = AUS) .....	80
Auto-Restart .....	80
Ansage-Scanning.....	80
Ansagenstimme.....	81
Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme .....	81
Höhe Ansagenstimme .....	81
Textfenster scannen .....	81
Leere Felder überspringen .....	81
Art des Scannings .....	81
Scangeschwindigkeit.....	81
Zahl der Durchläufe .....	81
<b>VOKABULARMANAGEMENT .....</b>	<b>83</b>
Vokabularmanagement .....	84
Vokabularmanagement ein/ausschalten .....	85
Vokabular auswählen .....	85
Vokabularauswahl anpassen .....	86
AKTIVE FUNKTIONEN .....	89
Listen verwenden .....	90
Liste anlegen.....	90
Liste laden.....	90
Liste in DropBox kopieren oder teilen.....	91
Liste löschen .....	92
<b>AUSSPRACHE .....</b>	<b>93</b>
Wort hinzufügen .....	94
Ausspracheregeln ändern .....	95
Ausspracheregeln löschen .....	95
Ausspracheregeln rücksetzen .....	95
Alle Ausspracheregeln löschen.....	96
<b>TEXTBAUSTEINE .....</b>	<b>97</b>
Textbaustein hinzufügen .....	98
Textbaustein bearbeiten.....	99
Textbaustein löschen .....	99
Alle Textbausteine löschen.....	100
Textbausteine rücksetzen auf Werkseinstellungen.....	100
<b>BIBLIOTHEK .....</b>	<b>101</b>
Vokabular kopieren .....	102
Neues Vokabular erstellen .....	103
Vokabular umbenennen .....	103
Vokabular löschen.....	104
Vokabularsprache ändern .....	105
Vokabular importieren/exportieren.....	107
Import aus iTunes .....	107
Export zu iTunes .....	109
Import aus Dropbox.....	111
Export in Dropbox .....	112
Abmelden von Dropbox.....	113
Export mit AirDrop.....	114
Import mit AirDrop.....	115

Zusatzfunktionen installieren .....	116
<b>HILFE</b>	<b>117</b>
Supportseite besuchen .....	118
Hilfe beenden .....	118
<b>INDEX</b>	<b>119</b>



# **ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE QUASSELKISTE**

## Willkommen bei der Quasselkiste

Mit der App Quasselkiste bietet PRD eine Kommunikations-App inklusive eines Wortschatzes für das iPad an. Wie bei allen Kommunikationshilfen von PRD ist auch bei der Quasselkiste effektive Kommunikation das Ziel des Programms. Das Wortschatzprogramm basiert auf dem erfolgreichen Minspeak-Anwendungsprogramm „Quasselkiste 60“, mit dem bereits viele Hundert Menschen in Deutschland erfolgreich kommunizieren.

Die Quasselkiste verfügt über eine feste Bildertastatur mit 60 Feldern und bietet Zugang zu einem umfangreichen Wortschatz, der einfach erweitert und angepasst werden kann. Die Quasselkiste richtet sich primär an Menschen mit normalen bis erhöhten kommunikativen Bedürfnissen und ermöglicht das Formulieren grammatikalisch korrekter Aussagen. Der Benutzer stellt sich die gewünschte Aussage aus den vorgespeicherten Inhalten, die überwiegend aus einzelnen Wörtern bestehen, zusammen. Eine Schrifttastatur ermöglicht das freie Formulieren.

Die Quasselkiste ist für Menschen jeder Altersstufe geeignet. Besonders gut kommt das Konzept der festen Bildertastatur bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung an, die die zu den einzelnen Aussagen gehörenden motorischen Muster i.d.R. sehr schnell erlernen und automatisieren.

Diese Anleitung ist unterteilt in 2 Abschnitte. Im ersten Teil lernen Sie den Aufbau des Wortschatzprogramms kennen und erfahren, wie die unterschiedlichen Wortarten in der Quasselkiste gebildet werden. Im zweiten Teil lesen Sie, wie Sie das Vokabular bearbeiten können und welche Einstellungen die App bietet.


Die Quasselkiste gibt es in 2 Ausführungen, mit Minspeak-Ikonen und mit Metacom-Symbolen. Im ersten Teil dieses Handbuchs („Aufbau der Quasselkiste“) sind alle Beispiele doppelt ausgeführt, je einmal für jede Symbolsammlung. Im zweiten Teil („Vokabular bearbeiten“) werden in den Beispielen Minspeak-Ikonen verwendet.

Zum Kennenlernen des PRiOs / Vias lesen Sie bitte ebenfalls das Hardware-Handbuch durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.



# Kopie der mitgelieferten Quasselkiste anfertigen

Das in der App enthaltene, vorgespeicherte Vokabular „Quasselkiste“ kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie es versuchen, erhalten Sie folgende Meldung:

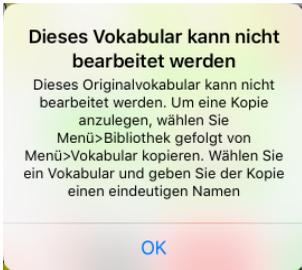

Um eine editierbare Quasselkiste zu erhalten, gehen Sie so vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste die Option „Menü“.
2. Wählen Sie im Menü die Option „Bibliothek“.
3. Wählen Sie erneut die Option „Menü“
4. Wählen Sie die Option „Vokabular kopieren“.
5. Wählen Sie das zu kopierende Vokabular aus: „Quasselkiste“.
6. Geben Sie einen Namen und – sofern gewünscht – eine Beschreibung für die Kopie ein.
7. Wählen Sie „Sichern“.

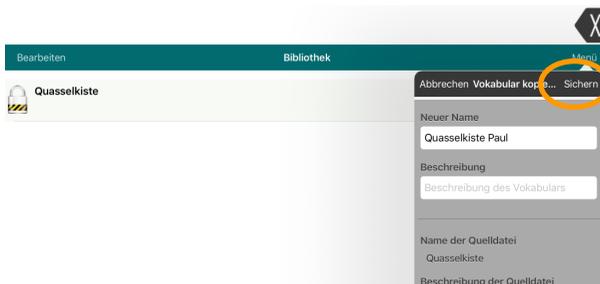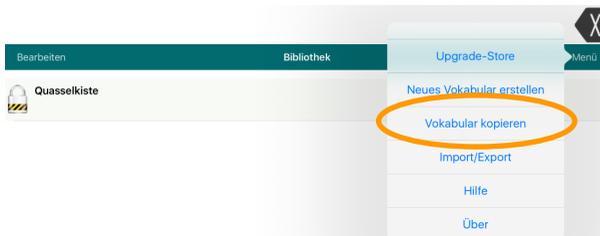


Tippen Sie anschließend auf die Kopie, um das Vokabular zu laden.



# AUFBAU DER QUASSELKISTE

# Die Oberfläche der App

Nach dem Starten sehen Sie den Startbildschirm der App.  
Das Display ist in drei Bereiche unterteilt.

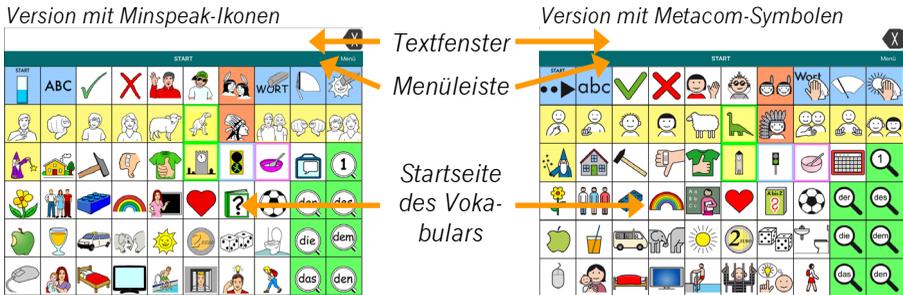


Oben befindet sich das Textfenster. Alle abgerufenen Mitteilungen erscheinen dort in Textform. Größe des Textfensters, Schriftart, -größe und -farbe können individuell eingestellt werden.

Unter dem Textfenster befindet sich die Menüleiste mit dem Namen der aktuellen Seite und dem Button *Menü*.

Den Rest des Displays nehmen die 60 Tastenfelder des Vokabulars ein.


## Die Startseite

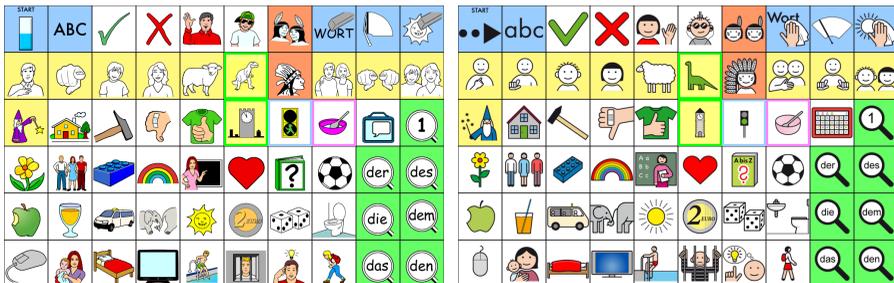


Die Startseite der Quasselkiste ist in vier Bereiche gegliedert:

1. Die Themenleiste
2. Die Grammatiktasten
3. Die Wortfeldtasten
4. Die Funktionstasten

## Themenleiste

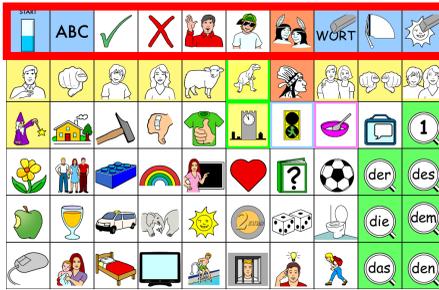


Version mit Minspeak-Ikonen

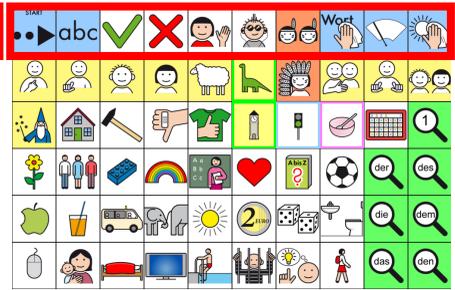

Version mit Metacom-Symbolen

Die **Themenleiste** bietet Zugang zu wichtigen Wörtern des jeweils gewählten Wortfeldes. Auf der Startseite enthält die Themenleiste einige hochfrequente Mitteilungen, eine Taste zum Wechsel auf die Schriftseite sowie einige wichtige Löschfunktionen. Eine Übersicht, welche Tasten mit welchen Themenleisten verknüpft sind, befindet sich auf Seite 19.

## Grammatiktasten

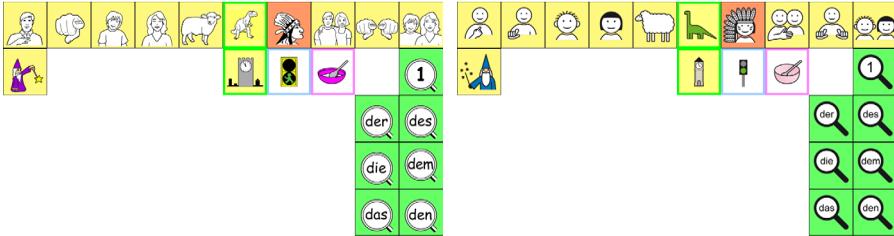

Version mit Minspeak-Ikonen

Version mit Metacom-Symbolen

Die **Grammatiktasten** sind für die Bestimmung der jeweiligen Wortart zuständig. Die Wortarten sind farbmarkiert:

- Nomen .....orange
- Verben .....gelb
- Adjektive .....grün
- Adverbien .....grüner Rahmen
- Konjunktionen .....blauer Rahmen
- Präpositionen.....rosa Rahmen

## Wortfeldtasten



Version mit Minspeak-Ikonen


Version mit Metacom-Symbolen

Die **Wortfeldtasten** sind für die Verknüpfung von Wortfeldern zuständig (siehe Seite 19).


Unter der Taste APFEL sind Wörter aus dem Bereich Essen erreichbar: „essen“ als Tätigkeitswort (gelb), „sauer“ als Eigenschaftswort (grün) sowie eine große Anzahl von Lebensmitteln.

Unter der Taste TAXI sind Wörter aus dem Bereich Fahren verknüpft: „fahren“ als Tätigkeitswort (gelb), „schnell“ als Eigenschaftswort (grün) sowie eine große Anzahl von Fahrzeugen.

# Funktionstasten

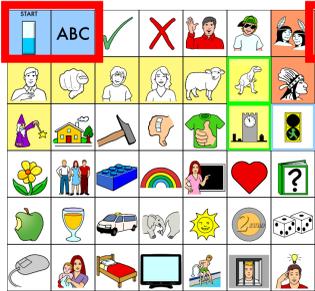

Version mit Minspeak-Ikonen

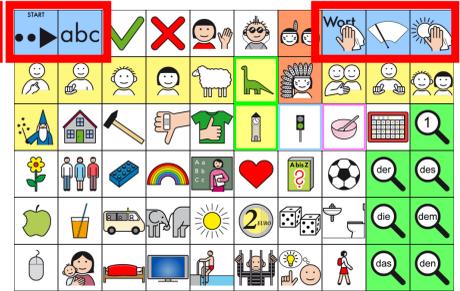

Version mit Metacom-Symbolen

Die blau hinterlegten **Funktionstasten** dienen der Steuerung der App. Sie haben für die Bildung der Wortarten keine Bedeutung.

## Beschreibung der Funktionstasten

Auf Startseite und Schriftseite befinden sich folgende Funktionen:

- |  |  |   |
|--|--|---|
|   |   | Öffnet die Schriftseite                                       |
|   |   | Löscht das zuletzt eingegebene Wort                           |
|   |   | Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters                   |
|   |   | Löscht das zuletzt gewählte Symbol                            |
|  |  | Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen (auf der Schriftseite) |

## Alles sprechen

Ich rede mit der Quasselkiste 

Bei Betätigung des Textfensters spricht der Talker alle Mitteilungen, die Sie seit dem letzten „Display löschen“ aufgerufen haben (ALLES SPRECHEN). Die Belegung ist abschaltbar.


## Wort löschen /Alles löschen

-  Tippen: Löscht das zuletzt eingegebene Wort
-  Halten: Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters


## Weitere Funktionen der Standard-Themenleiste anzeigen



Die Standard-Themenleiste enthält weitere Felder. Die Taste ganz links klappt die Themenleiste zu einer Seite auf:

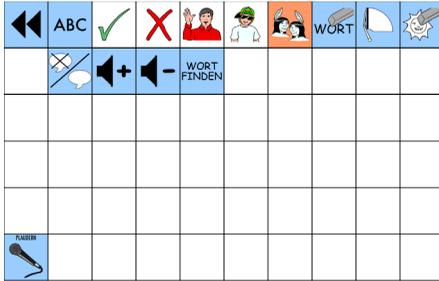

Version mit Minspeak-Ikonen

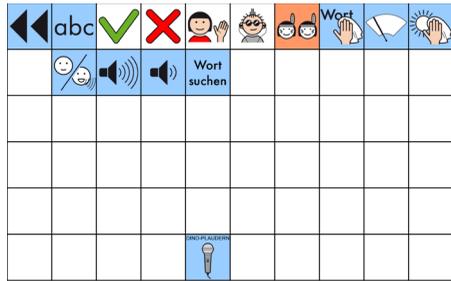

Version mit Metacom-Symbolen



Zurück zur Startseite



Schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein



Erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe



Verringert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe



Ermöglicht das Suchen einer Mitteilung im Vokabular



Wechsel zur Seite zum Aufnehmen der vorbereiteten Mitteilungen in natürlicher Sprache



# Die Kategorien (Wortfelder)

Hier sehen Sie die Tasten der Startseite sowie die zugehörigen Kategorien (Wortfelder) und Themenleisten. Wenn Sie neue Wörter speichern, empfehlen wir, sie in der zugehörigen Kategorie unterzubringen, d.h. die Symbolsequenz sollte mit der Taste für die Kategorie beginnen.

Version mit Minspeak-Symbolen

TASTE	ICH	DU	ER	SIE	ES	DINO	EIN-ZAHL	WIR	IHR	SIE PL
Themenleiste										
Grammatik	Sätze ICH <i>Phrasen ich, Pronomen</i>	Sätze DU <i>Phrasen du, Pronomen</i>	Namen männlich <i>Phrasen er, Pronomen</i>	Namen weiblich <i>Phrasen sie, Pronomen</i>	Namen Haustiere <i>Phrasen es, Pronomen</i>	Plaudern <i>Adverbien</i>	leer <i>Pronomen, sein</i>	leer <i>Phrasen wir, Pronomen</i>	leer <i>Phrasen ihr, Pronomen</i>	leer <i>Phrasen Sie, Pronomen</i>
TASTE	ZAUBERER	HAUS	HAMMER	MINUS	PLUS	TURM	AMPEL	SCHÜSSEL	TALKER	LUPE
Themenleiste										
Grammatik	Standard	Haus	Werken	Medizin	Kleidung	Zeit <i>Adverbien</i>	Stadt <i>Konjunktionen</i>	Haushalt <i>Präpositionen</i>	Talker <i>Floskeln</i>	Standard
TASTE	BLUME	LEUTE	LEGO	FARBE	SCHULE	HERZ	BUCH	BALL	DER	DES
Themenleiste										
Grammatik	Pflanzen	Leute	Spielen	Farben	Schule	TOP 10	Buch <i>Fragewörter</i>	Sport	Standard	Standard
TASTE	APFEL	SAFT	TAXI	ELEFANT	SONNE	GELD	WÜRFEL	BAD	DIE	DEM
Themenleiste										
Grammatik	Essen	Trinken	Fahren	Tiere	Wetter	Geld	Formen <i>Zahlen</i>	Pflege	Standard	Standard
IKON	MAUS	BABY	BETT	TV	FREI-BAD	DIEB	IDEE	WAN-DERN	DAS	DEN
Themenleiste										
Grammatik	Computer	Familie	Möbel	TV	Körper	Standard	leer (Platz für Namen männl.)	leer (Platz für Namen weibl.)	Standard	Standard

Version mit Metacom-Symbolen

TASTE	ICH	DU	ER	SIE	ES	DINO	EIN-ZAHL	WIR	IHR	SIE PL
Themenleiste										
Grammatik	Sätze ICH	Sätze DU	Namen männlich	Namen weiblich	Namen Haustiere	Plaudern	leer	leer	leer	leer
	Phrasen ich, Pronomen	Phrasen du, Pronomen	Phrasen er, Pronomen	Phrasen sie, Pronomen	Phrasen es, Pronomen	Adverbien	Pronomen, sein	Phrasen wir, Pronomen	Phrasen ihr, Pronomen	Phrasen Sie, Pronomen
TASTE	ZAUBERER	HAUS	HAMMER	MINUS	PLUS	TURM	AMPEL	SCHÜSSEL	TALKER	LUPE
Themenleiste										
Grammatik	Standard	Haus	Werken	Medizin	Kleidung	Zeit	Stadt	Haushalt	Talker	Standard
						Adverbien Zeit	Konjunktionen	Präpositionen	Floskeln	
TASTE	BLUME	LEUTE	LEGO	FARBE	SCHULE	HERZ	BUCH	BALL	DER	DES
Themenleiste										
Grammatik	Pflanzen	Leute	Spielen	Farben	Schule	TOP 10	Buch	Sport	Standard	Standard
							Fragewörter			
TASTE	APFEL	SAFT	TAXI	ELEFANT	SONNE	GELD	WÜRFEL	BAD	DIE	DEM
Themenleiste										
Grammatik	Essen	Trinken	Fahren	Tiere	Wetter	Geld	Formen	Pflege	Standard	Standard
							Zahlen			
IKON	MAUS	BABY	BETT	TV	FREI-BAD	DIEB	IDEE	WAN-DERN	DAS	DEN
Themenleiste										
Grammatik	Computer	Familie	Möbel	TV	Körper	Standard	leer (Platz für Namen männl.)	leer (Platz für Namen weibl.)	Standard	Standard

# Bildung der Nomen

**Gruppe 1:** Nomen, die auf der Taste EINZAHL bzw.  enden.

„Schule“    


„Unterricht“      

**Gruppe 2:** Nomen, die auf einer Bildtaste enden.

„Pause“      

**Gruppe 3:** Nomen, die in der Themenleiste abgebildet werden.

 bzw.  öffnet die Themenleiste SCHULE:

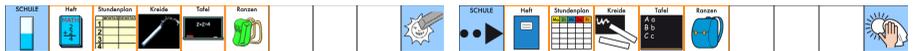

Version mit Minspeak-Ikonen

Version mit Metacom-Symbolen

Die Wörter werden direkt in der Themenleiste gewählt.

## Plural


Die Plural-Form der Hauptwörter wird **nachträglich** mit der Taste PLURAL

 bzw.  gebildet. Die Pluralform wird jeweils auf der Taste angezeigt.


  bzw.   ergibt „Schule“, nachträglich 

 ergibt „Schulen“.

# Bildung der Verben

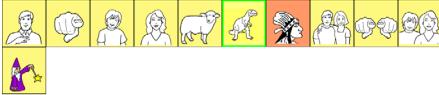

Version mit Minspeak-Ikonen

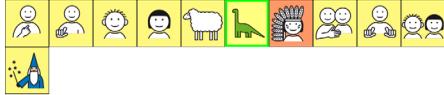

Version mit Metacom-Symbolen

Verben werden mit einer oder zwei Wortfeldtasten gebildet und enden auf einer der gelb markierten Personalpronomen-Tasten.

Die Grundform des Verbs, der Infinitiv, wird mit der WIR-Taste  bzw.



gebildet:

„spielen“



„gewinnen“



Die Beugung (Konjugation) des Verbs geschieht mittels der Personalpronomen-Tasten ICH, DU, ER, SIE, ES, WIR, IHR und SIE PL (siehe auch Personalpronomen, Seite 30).

## Einzahl

## Mehrzahl


(ich) „spiele“




(wir) „spielen“



(du) „spielst“

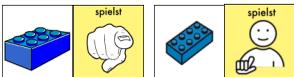

(ihr) „spielt“

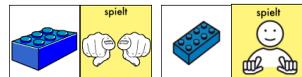

(er, sie, es) „spielt“




(Sie) „spielen“



## Vergangenheit

Die Vergangenheitsform wird gebildet, indem nach Abrufen des Infinitivs die Taste LUPE gedrückt wird. Anschließend stehen die gebeugten Formen auf den Tasten ICH, DU, ER, SIE, ES etc. zur Verfügung:

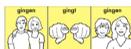

Version mit Minspeak-Ikonen

Version mit Metacom-Symbolen






Die Tasten für die Vergangenheitsform auf der Seite LUPE sind standardmäßig ausgeblendet. Machen Sie sie sichtbar, wenn Sie die Vergangenheitsform der Verben nutzen wollen.

## Partizip Perfekt



Das Partizip Perfekt des Verbs wird mit der Taste DINO  bzw.  gebildet.

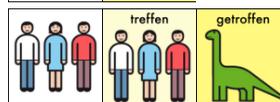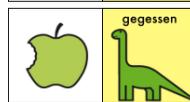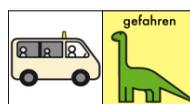

# Imperativ



Die Befehlsform der Verben wird mit der Taste ZAUBERER bzw.



gebildet.


„komm“		 komm		 komm	
„mach“		 mach		 mach	
„fahr“		 fahr		 fahr	
„freu“		 freuen	 freu	 fühlen	 fühl



# Bildung der Adjektive

Die Adjektive werden mit einer oder zwei Wortfeldtasten gebildet und enden auf den grün markierten Tasten (auf diesen Tasten sind Lupen dargestellt) bzw. den Tasten MINUS und PLUS.

Die Grundform des Adjektivs steht zusätzlich auf den Tasten MINUS bzw. PLUS zur Verfügung und kann so auch mit einem Doppelklick auf der jeweiligen Taste gebildet werden.

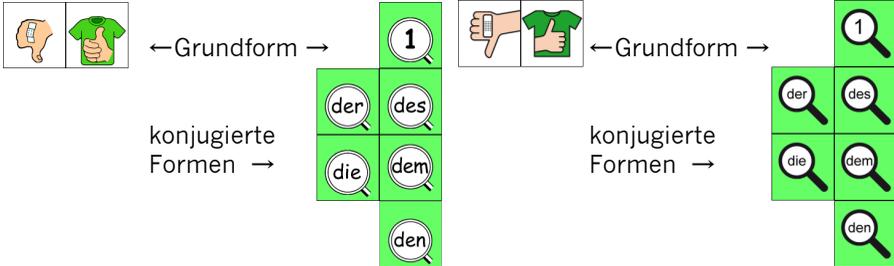




Version mit Minspeak-Ikonen

Version mit Metacom-Symbolen

Adjektive sind – wenn möglich – als Gegensatzpaare gespeichert:


TAXI + PLUS = „schnell“

TAXI + MINUS = „langsam“

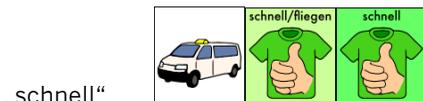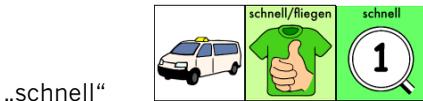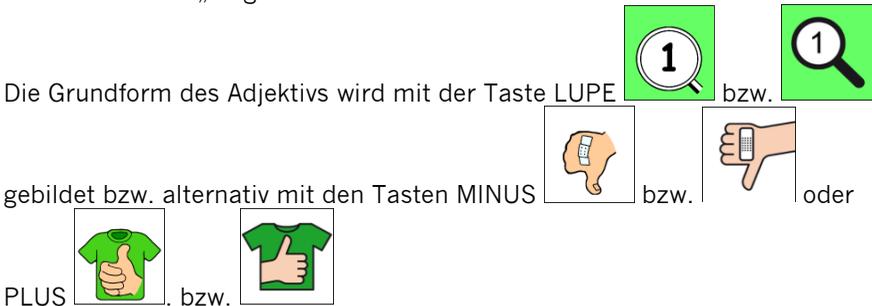


Die Konjugation des Adjektivs geschieht mit den Artikel-Tasten DER, DIE, DES, DEM und DEN.

Wenn Sie eine Taste gewählt haben, zu der ein Adjektiv gespeichert ist, verändern sich die Artikel-Tasten und zeigen in den Lupen nunmehr die jeweilige Endung des Adjektivs.

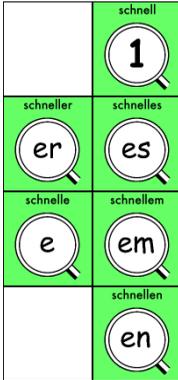


Version mit Minspeak-Ikonen

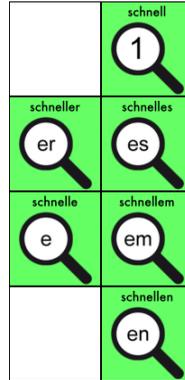

Version mit Metacom-Symbolen

## Steigerungsformen

Die Steigerungsformen Komparativ und Superlativ werden gebildet, indem nach Abrufen des Adjektivs in der Grundform (Positiv) die Taste LUPE gedrückt wird. Anschließend stehen Komparativ und Superlativ zur Verfügung:

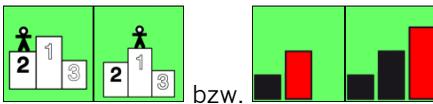


bzw.

„schnell“



„schneller“

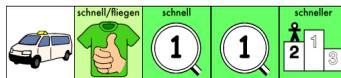

„am schnellsten“




# Adverbien




Alle **zeitbestimmenden Adverbien** beginnen mit dem TURM bzw.



Sie sind mit einem grünen Rahmen farbmarkiert.

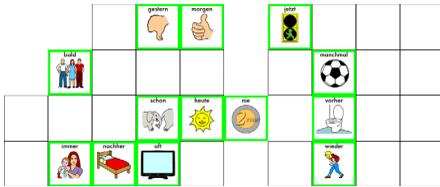

Version mit Minspeak-Ikonen

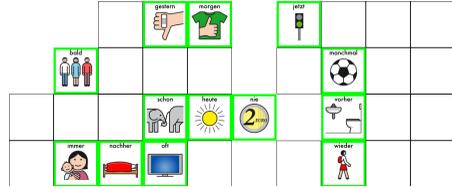


Version mit Metacom-Symbolen

Die **übrigen Adverbien** beginnen mit dem DINO bzw.  und sind ebenfalls mit einem grünen Rahmen farbmarkiert.



Version mit Minspeak-Ikonen

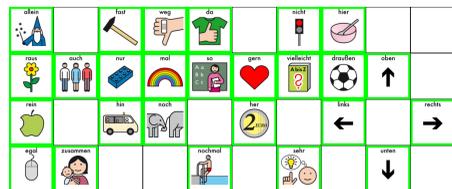

Version mit Metacom-Symbolen

# Präpositionen



Die Präpositionen beginnen mit der Taste SCHÜSSEL bzw.

Die meisten Präpositionen erhalten einen pinkfarbenen „BLOB“ als visuelle Eselsbrücke zur Verdeutlichung des jeweiligen Wortes.

		außer		seit	hinter		statt	
neben	mit	durch	gegen	als	wegen	für	von	
is	nach	auf	um	für	zwischen	über		
vor	bei	unter	aus	ab	hinter	bis		

Version mit Minspeak-Ikonen

		außer		seit	hinter		statt	
neben	mit	durch	gegen	als	wegen	für	von	
is	nach	auf	um	für	zwischen	über		
vor	bei	unter	aus	ab	hinter	bis		

Version mit Metacom-Symbolen

# Konjunktionen



Die Konjunktionen fangen mit der Taste AMPEL bzw. an.

Sie sind mit einem hellblauen Rahmen bzw. hellblau farbmarkiert.

als	als	weder/je	entweder/oder	denn	wenn	weil	obwohl	
deshalb	entweder	oder	und	aber				
	bevor	indem	weil	als	sondern			

Version mit Minspeak-Ikonen


als	als	weder/je	entweder/oder	denn	wenn	weil	obwohl	
deshalb	entweder	oder	und	aber				
	bevor	indem	weil	als	sondern			

Version mit Metacom-Symbolen

# Pronomen

## Personalpronomen

Die **Personalpronomen** „ich“, „du“, „er“, „sie“, „es“ etc. werden gebildet, indem Sie zweimal auf die jeweilige Taste drücken. Die gebeugten Formen (mir / mich, dir / dich etc.) erhalten Sie ebenfalls nach Auswahl der Person.

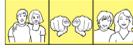

Version mit Minspeak-Ikonen

Version mit Metacom-Symbolen

„Wir“		wir			wir
„mir“		mir			dich
„dich“		dich			mir

## Possessivpronomen

Die Formen „mein“, „dein“, „sein“, „ihr“, „sein“, „unser“, „euer“ und „Ihr“ beginnen mit dem jeweiligen Personalpronomen und werden als deklinierbare

Possessivpronomen mit der Taste LUPE  bzw.  und den Artikelstasten gebildet und sind daher grün farbmarkiert.

Zum Beispiel:

„deiner“		deiner			deiner	
„deine“		deine			deine	
„deinem“		deinem			deinem	

## Die übrigen Pronomen

Alle übrigen nicht-deklinierbaren Pronomen beginnen mit der Taste NOMEN




bzw.



und sind violett farbmarmiert.



Version mit Minspeak-Ikonen

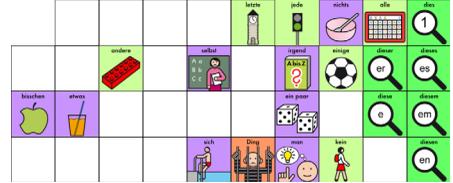

Version mit Metacom-Symbolen

## Die deklinierbaren Pronomen

Alle deklinierbaren Pronomen beginnen mit der Taste NOMEN



bzw.



und enden auf der LUPE




bzw.



Anschließend werden sie wie Adjektive behandelt

Dazu gehören u.a. folgende Wörter:

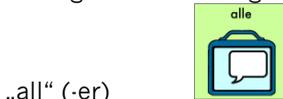

„all“ (-er)



„jed (-er)



„einig“ (-en)



„kein“ (-er)



# Fragewörter



Die Fragewörter beginnen mit der Taste BUCH bzw.  bzw.  und sind mit einem hellblauen Rahmen bzw. hellblau farbmarkiert.

Das Fragewort „welch“ ist deklinierbar („welche“, „welcher“, „welches“) und wird demnach mit der LUPE und den Artikeltasten gebildet.

wissen	gering	mehr	wort	wo	wie	welch
wel	wel	welch		welch/fragen	welcher	welches
			wen	wen	welchen	welchen

Version mit Minspeak-Ikonen


wissen	gering	mehr	wort	wo	wie	welch
wel	wel	welch		welch/fragen	welcher	welches
			wen	wen	welchen	welchen

Version mit Metacom-Symbolen


# Artikel

## Der bestimmte Artikel

Die sechs möglichen Formen des bestimmten Artikels erhalten Sie direkt über die Artikelkasten, die auch als Endungstasten für deklinierbare Adjektive und Pronomen vorgesehen sind.

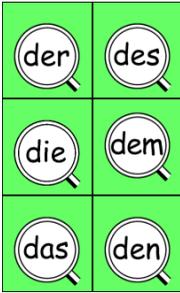


Version mit Minspeak-Ikonen

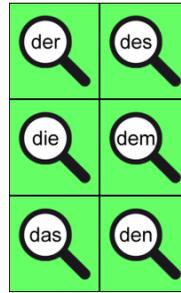


Version mit Metacom-Symbolen

## Der unbestimmte Artikel

Der unbestimmte Artikel „ein“ ist unter der Taste LUPE- gespeichert und wird mit den Artikelkasten dekliniert.

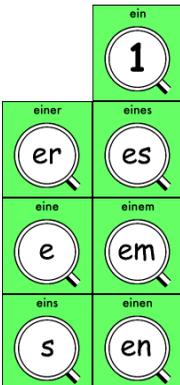

Version mit Minspeak-Ikonen

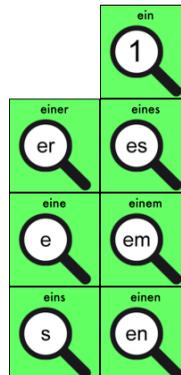

Version mit Metacom-Symbolen

# Zahlwörter

Die Zahlwörter beginnen mit der Taste WÜRFEL. Sie werden als Wort (z.B. „eins“, „zwei“, „drei“) ausgegeben.

FORMEN	MAßE	Kreis	Quadrat	Dreieck	Kreuz	Rechteck	Stern	RECHNEN	WÜRFEL
zähle	zähle	zähl	zähl	zähl	gezählt	Zahl	zählen	zähl	zählen
zähl	edig	zahl	wenig	viel	hoch				gleich
1	2	3	4	5		?	er	es	1
6	7	8	9	10		essen	e	em	
				tar				en	

Version mit Minspeak-Ikonen

FORMEN	MAßE	Kreis	Quadrat	Dreieck	Kreuz	Rechteck	Stern	RECHNEN	WÜRFEL
zähle	zähle	zähl	zähl	zähl	gezählt	Zahl	zählen	zähl	zählen
zähl	edig	zahl	wenig	viel	hoch				gleich
1	2	3	4	5		?	er	es	1
6	7	8	9	10		essen	e	em	
				tar				en	

Version mit Metacom-Symbolen

Die Zahlen als Ziffern finden Sie auf der Schrifttastatur und auf der Seite

RECHNEN  bzw. . Sie werden als Zahlen „1“, „2“, „3“ ausgegeben.

◀◀	ABC	÷	x	-		A		☀
	1	2	3	+				
	4	5	6	=				
	7	8	9					
	10	0						
				(leer)				

Version mit Minspeak-Ikonen

◀◀	abc	:	x	-		B		☀
	1	2	3	+				
	4	5	6	=				
	7	8	9					
	10	0						
				(leer)				

Version mit Metacom-Symbolen

# Die Taste TALKER



Redewendungen, die wir im Alltag häufig benutzen, sind mit der Taste TALKER





bzw.  beginnend gespeichert.

Hier einige Beispiele:


„Herzlich willkommen!“

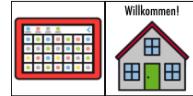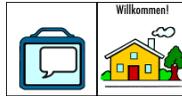


„Prost!“

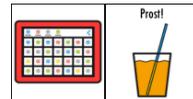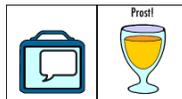

„Guten Appetit!“

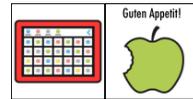

„danke“

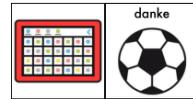

# Die Taste ZAUBERER





Sätze zur schnellen Information sind mit der Taste ZAUBERER bzw.



beginnend gespeichert.

Hier einige Beispiele:

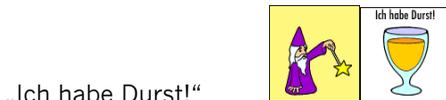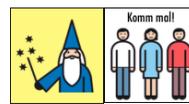

Wollen Sie weitere Sätze hinzufügen, lassen Sie diese am besten ebenfalls mit der Taste ZAUBERER beginnen, um die Struktur beizubehalten.

# Die Seiten KALENDER und UHR



Die Seiten KALENDER und UHR sind über die Taste TURM bzw.



und die zugehörige Themenleiste ZEIT erreichbar.



Version mit Minspeak-Ikonen



Version mit Metacom-Symbolen

## Die Seite KALENDER

UHR	Heute ist	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
		1	2	3	4	5	6	7	
Januar	Februar	März	8	9	10	11	12	13	14
April	Mai	Juni	15	16	17	18	19	20	21
Juli	August	September	22	23	24	25	26	27	28
Oktober	November	Dezember	29	30	31	2017	2018	2019	2020

Version mit Minspeak-Ikonen

UHR	Heute ist	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
		1	2	3	4	5	6	7	
Januar	Februar	März	8	9	10	11	12	13	14
April	Mai	Juni	15	16	17	18	19	20	21
Juli	August	September	22	23	24	25	26	27	28
Oktober	November	Dezember	29	30	31	2017	2018	2019	2020

Version mit Metacom-Symbolen

Die Seite enthält zum Benennen von Tag und Datum benötigte Zahlen und Begriffe. Mit Hilfe der Taste „Heute ist“ können das aktuelle Datum und die jeweilige Uhrzeit angesagt werden.

## Die Seite UHR

UHR	vor	nach	Minute	Stunde	WORT	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Version mit Minspeak-Ikonen

UHR	vor	nach	Minute	Stunde	word	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Version mit Metacom-Symbolen

Die Seite enthält zum Benennen von Uhrzeiten benötigte Zahlen und Begriffe.




# VOKABULAR BEARBEITEN

In der Regel werden Sie eine Kopie der mitgelieferten Quasselkiste nutzen und diese mit individuellen Aussagen des Benutzers erweitern. Um ein Vokabular zu kopieren, wählen Sie **Menü > Bibliothek > Menü > Vokabular kopieren**.


Sie können aber auch ein komplett eigenes, zunächst leeres Vokabular erzeugen. Ein solches Vokabular besteht aus mindestens einer Seite und jede Seite aus 60 Tasten. Um ein neues Vokabular zu erzeugen, wählen Sie **Menü > Bibliothek > Menü > Neues Vokabular erstellen**.

## Seite bearbeiten

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste ist, die Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.

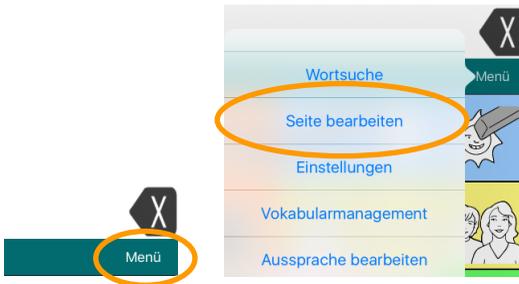

- Die App wechselt in den Bearbeitemodus. Das Textfenster wird ausgeblendet und die Menüleiste ist nun rot hinterlegt. Der Name der aktuellen Seite wird in der Mitte der Menüleiste angezeigt.

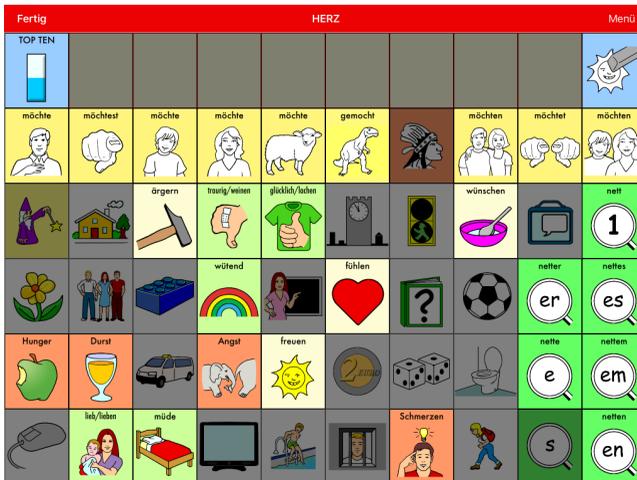


## Taste bearbeiten

- Tippen Sie auf die Taste, die Sie bearbeiten wollen. Ist die Taste bereits vorhanden, erscheint „Taste bearbeiten“. Ist es eine leere Taste, erscheint „Neue Taste erstellen“.



- Wählen Sie „Taste bearbeiten“ bzw. „Neue Taste erstellen“.

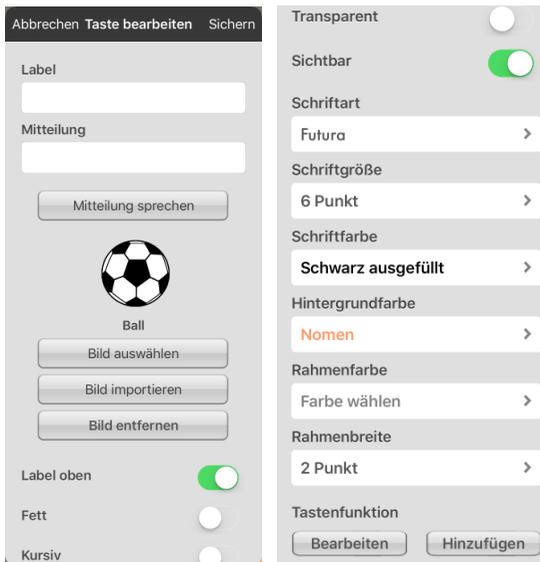

Die Optionen für das Gestalten einer Taste werden ab S. 55 vorgestellt.

## Taste bearbeiten beenden


Wählen Sie „Sichern“, wenn Sie alle Eingaben gemacht haben. Die Änderungen werden gespeichert.






# Taste entfernen


- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste ist, die Sie entfernen wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.

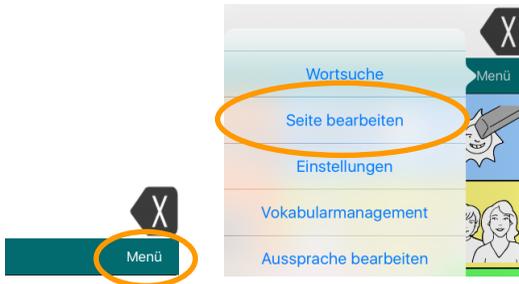

- Die App wechselt in den Bearbeitemodus. Die Menüleiste springt nach oben und ist nun rot hinterlegt. Der Name der aktuellen Seite wird in der Mitte der Menüleiste angezeigt.

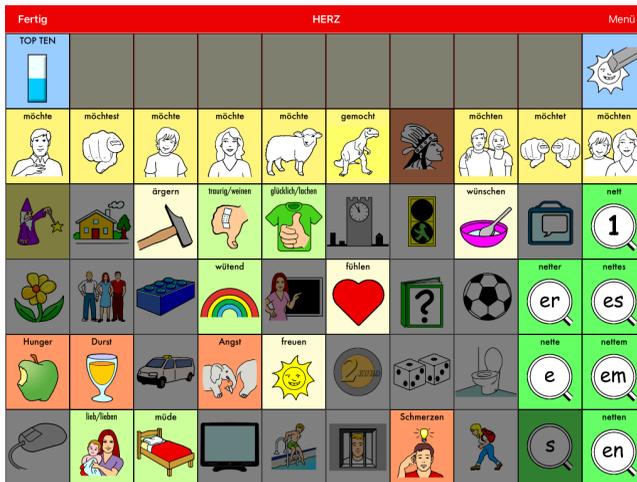

- Tippen Sie auf die Taste, die Sie entfernen wollen.

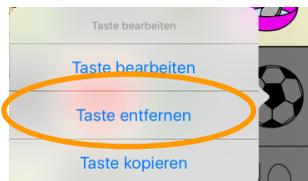

- Wählen Sie „Taste entfernen“.
- Bestätigen Sie das Entfernen der Taste.

**Taste entfernen bestätigen**

Das Entfernen von Tasten kann nicht rückgängig gemacht werden. Falls diese Taste kopiert wurde, kann sie nach dem Löschen nicht mehr eingefügt werden.


OK      Abbruch

- Die Taste wird von der Seite entfernt.


## Tasten kopieren

Sie können eine einmal angelegte Taste kopieren, um sie auch auf anderen Seiten zu nutzen.

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste ist, die Sie kopieren und zusätzlich an anderer Stelle nutzen wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.

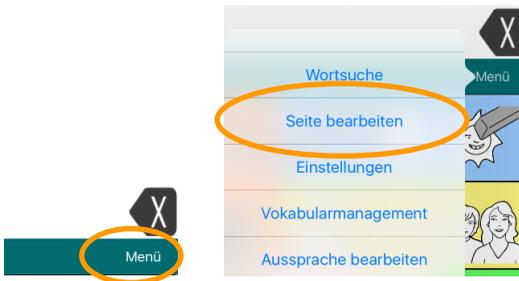

- Die App wechselt in den Bearbeitemodus. Die Menüleiste springt nach oben und ist nun rot hinterlegt. Der Name der aktuellen Seite wird in der Mitte der Menüleiste angezeigt.

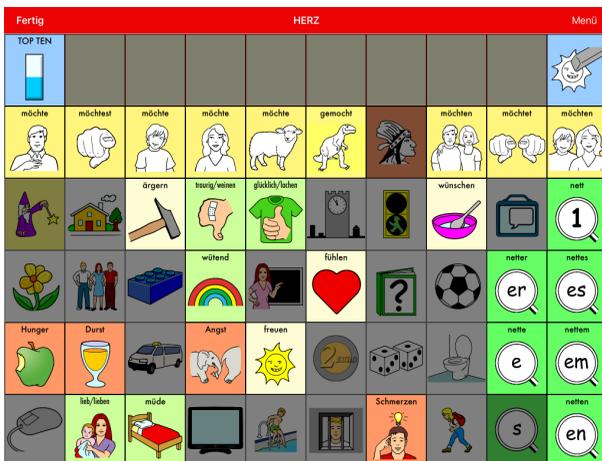

- Tippen Sie auf die Taste, die Sie kopieren wollen.




- Wählen Sie „Taste kopieren“. Die Taste wird kopiert.
- Beenden Sie den Bearbeitemodus durch Tippen auf “Fertig” in der Menüleiste.
- Öffnen Sie die Seite, auf der Sie die kopierte Taste verwenden wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**, um in den Bearbeitemodus zu wechseln.
- Tippen Sie auf die Taste, die die Kopie der ursprünglichen Taste werden soll.



- Wählen Sie „**Taste einfügen**“, um die kopierte Taste als eine neue Taste einzufügen, die getrennt von der ursprünglichen Taste verwaltet wird. Ändern Sie die neue Taste, ändert sich die ursprüngliche Taste nicht.
- Wählen Sie „**Taste verknüpfen**“, um einen Klon der ursprünglichen Taste zu erzeugen. Ändern Sie die neue Taste, wird die ursprüngliche Taste (und alle weiteren damit verknüpften) ebenfalls geändert.



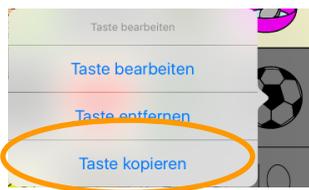

- Wählen Sie „Taste kopieren“. Die Taste inklusive Layout wird kopiert.

### Zieltaste befindet sich auf derselben Seite

- Tippen Sie auf die Taste, die das kopierte Layout erhalten soll.



- Wählen Sie „**Tastenlayout einfügen**“.
- Das Layout wird übertragen.

### Zieltaste befindet sich auf einer anderen Seite

- Wählen Sie **Menü > Weitere Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie die Seite aus, auf der die Taste ist, die das kopierte Layout erhalten soll.
- Tippen Sie auf die Taste, die das kopierte Layout erhalten soll.
- Wählen Sie „**Tastenlayout einfügen**“.
- Das Layout wird übertragen.

## Neue Seite erzeugen

Die meisten Seiten, die Sie benötigen werden, sind in der Quasselkiste bereits angelegt.


Es gibt 2 Möglichkeiten, eine neue Seite anzulegen.

1. Über **Menü > Seite bearbeiten > Menü > Neue Seite**.
2. Direkt beim Speichern des Sprungbefehls auf die Seite. Für diese Version folgt hier ein Beispiel.

Sie wollen unter der Kombination  +  die Bundesligavereine abspeichern.

- Tippen Sie auf die Taste . Die Seite HERZ wird geöffnet.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**. Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus.


- Tippen Sie auf die Taste . Wählen Sie „Taste bearbeiten“.
- Geben Sie als Label „Bundesliga“ ein.
- Löschen Sie „Bundesliga“ als Mitteilung.
- Scrollen Sie nach unten zur Tastenfunktion. „Mitteilung ausgeben“ und „Springe zu Seite“ sind bei allen vorbereiteten Tasten vorgeschichtert:

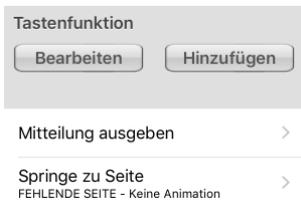

- Bei Tasten, die direkt eine Mitteilung wiedergeben sollen, brauchen Sie nur die Funktion „Springe zu Seite“ zu löschen.
- Bei Tasten, die zu einer Seite springen sollen, brauchen Sie nur die Funktion „Mitteilung ausgeben“ zu löschen.
- In diesem Beispiel soll die Taste eine neue Seite öffnen. Sie müssen also die Funktion „Mitteilung ausgeben“ löschen.
- Wählen Sie „Bearbeiten“.




- Tippen Sie auf das  bei „Mitteilung ausgeben“.

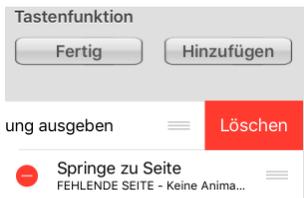


- Wählen Sie **Löschen**. Die Funktion wird entfernt. Wählen Sie „Fertig“.



- Tippen Sie auf Sie .
- Das Auswahlfenster mit den Tastenfunktionen öffnet sich.

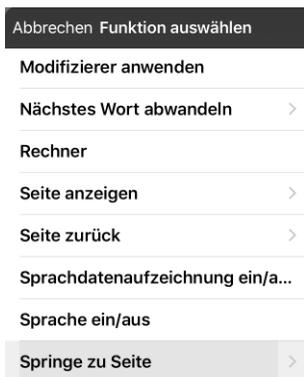

- Tippen Sie auf das  neben „Springe zu Seite“, um die Seitenübersicht zu öffnen.

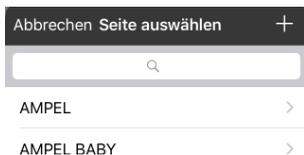

- Da die Seite „Bundesliga“ noch nicht existiert, tippen Sie auf das .



- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.
- Die Seite wurde angelegt und ist mit der Taste verknüpft.



## Seite löschen

- Öffnen Sie die Seite, die Sie löschen wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie **Menü > Seite löschen**.
- Bestätigen Sie die Löschanfrage.



Die Seite wird gelöscht.

## Weitere Seite bearbeiten

Diese Option erlaubt das Wechseln der Seite, ohne den Bearbeitemodus verlassen zu müssen.

- Öffnen Sie die erste Seite, die Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.
- Bearbeiten Sie die Seite wie gewünscht.
- Wählen Sie **Menü > Weitere Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie die nächste zu bearbeitende Seite.
- Die Seite wird im Bearbeitemodus geöffnet.
- Bearbeiten Sie die Seite wie gewünscht.

## Seitenlayout bearbeiten

- Öffnen Sie die Seite, deren Layout Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie **Menü > Seitenlayout bearbeiten**.




Ändern Sie das Seitenlayout wie gewünscht.


# Vokabularvorgaben (Layout aller Seiten eines Vokabulars bearbeiten)

Die Funktion „Vokabularvorgaben“ erlaubt Ihnen das Ändern der Hintergrundfarbe aller Seiten eines Vokabulars unabhängig von den jeweils bei der Seite gemachten Einstellungen.

- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.

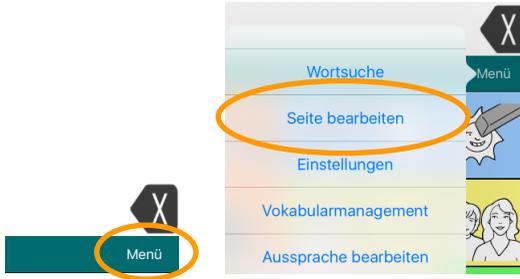

- Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus. Die Menüleiste springt nach oben und ist nun rot hinterlegt. Der Name der aktuellen Seite wird in der Mitte der Menüleiste angezeigt.

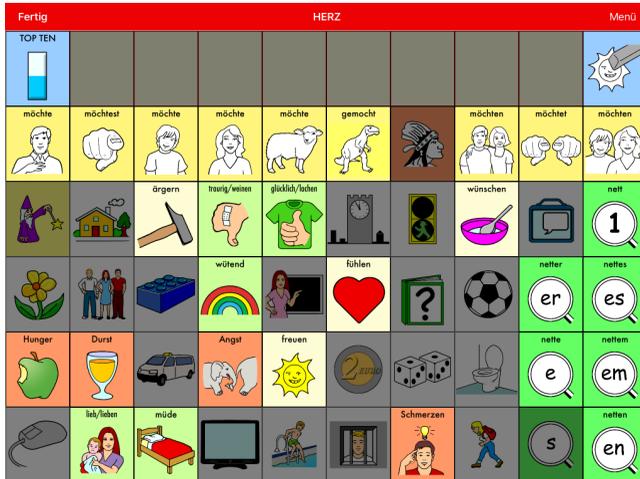

- Wählen Sie **Menü > Vokabularvorgaben**.
- Aktivieren Sie die Option „Hintergrundfarbe“
- Wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe
- Alle Seiten des Vokabulars werden mit der gewählten Hintergrundfarbe angezeigt.

Die Seiten-Hintergrundfarbe ist bei leeren Tastenfeldern sichtbar!

# Seite importieren/kopieren

## Seite importieren


- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie **Menü > Seiten importieren/kopieren**.
- Wählen Sie „Seite importieren“.
- Wählen Sie das Vokabular, das die Seite enthält, die Sie importieren wollen.
- Die Übersicht aller Seiten im dem Vokabular wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Seite aus.
- Wählen Sie „Import“.

## Seite kopieren


- Öffne Sie die Seite, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Menü > Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie **Menü > Seiten importieren/kopieren**.
- Wählen Sie „Seite kopieren“.
- Die aktuelle Seite wird kopiert.

# Seite bearbeiten beenden

Sie beenden das Bearbeiten einer Seite durch Tippen auf „Fertig“ links oben in der Menüleiste.

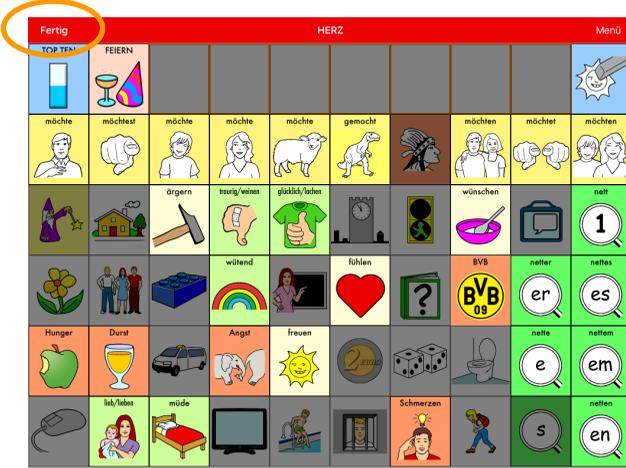

Die App wechselt wieder in den Benutzermodus.

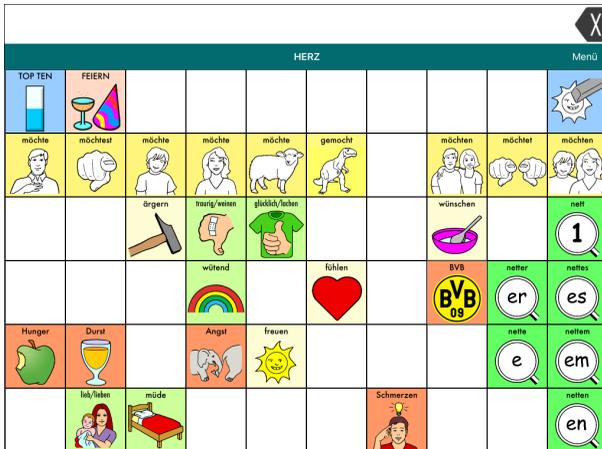

# Optionen beim Gestalten einer Taste

## Label

Das Tastenlabel ist der auf der Taste angezeigte Text. Das Label kann der Mitteilung entsprechen oder es repräsentieren („BVB“ für „Borussia Dortmund“) oder ganz weggelassen werden. Das Label kann oben oder unten auf der Taste angezeigt werden. Wenn Sie ein Label eingeben, wird es standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übernommen.

Label →



## Mitteilung

Die Mitteilung ist die Aussage, die wiedergegeben werden soll, wenn die Taste gedrückt wird. Funktions- und Sprungtasten enthalten i.d.R. keine Mitteilung.

## Mitteilung sprechen

Hier können Sie hören, wie die Mitteilung von der synthetischen Sprachausgabe wiedergegeben wird. Sollte die Synthese Probleme mit einem oder mehreren Wörtern haben, können Sie diese manuell dem Aussprachelexikon hinzufügen (siehe S. 94).

## Bild (Symbol)

Eine Taste erhält i.d.R. ein Bild/Symbol, das den Inhalt repräsentiert.

Symbol →




## Bild auswählen

Sobald Sie ein Label eingegeben haben, sucht die Quasselkiste-App passende Symbole und schlägt diese vor. Tippen Sie auf die Pfeiltasten, um zwischen Vorschlägen zu wechseln. Wollen Sie ein vorgeschlagenes Symbol behalten, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Schlägt Ihnen die App kein Symbol vor oder wollen Sie ein nicht-vorgeschlagenes Symbol verwenden, so tippen Sie auf „Bild auswählen“. Wählen Sie zunächst eine Symbolsammlung und anschließend das Symbol aus.



## Bilder suchen

Die mitgelieferten Symbolsammlungen sind in Kategorien eingeteilt. Sie können innerhalb der Kategorien suchen oder über das Symbol  eine Suche über alle Kategorien starten. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, kann aber auch manuell eingegeben werden.

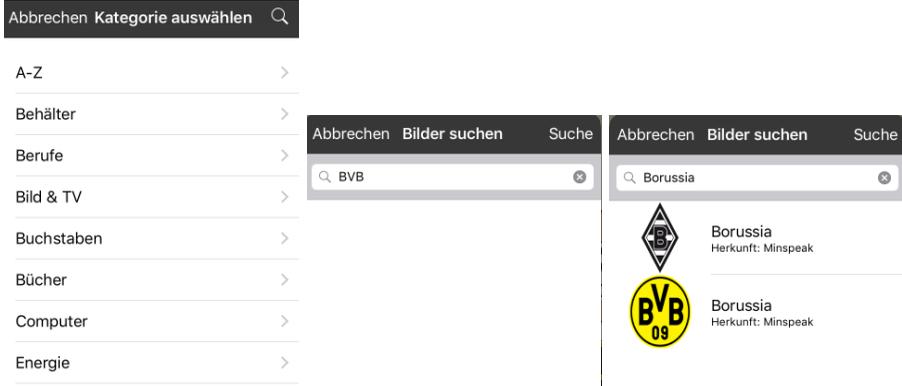

## Bild importieren

**Bildbibliothek:** Wählen Sie ein auf dem iPad existierendes Foto.

**Kamera:** machen Sie ein Foto zu Verwendung als Tastensymbol.

## Bild entfernen

Entfernt das aktuell auf der Taste verwendete Bild/Symbol.

## Label oben

Ist die Option aktiv, wird das Label oben auf der Taste angezeigt. Ist die Option deaktiviert, wird das Label unten auf der Taste angezeigt.



## Fett

Ist die Option aktiv, wird das Label mit dem Schriftattribut „fett“ angezeigt.



## Kursiv

Ist die Option aktiv, wird das Label mit dem Schriftattribut „kursiv“ angezeigt.



## Transparent

Ist die Option aktiv, wird die Taste vor transparentem Hintergrund angezeigt.

nicht  
transparent



transparent




## Sichtbar

Deaktivieren Sie die Option, um die Taste auszublenden. Ausgeblendete Tasten werden nicht angezeigt und können nicht selektiert werden.

## Schriftart

Wählen Sie, in welcher Schriftart (Font) das Tastenlabel angezeigt werden soll.

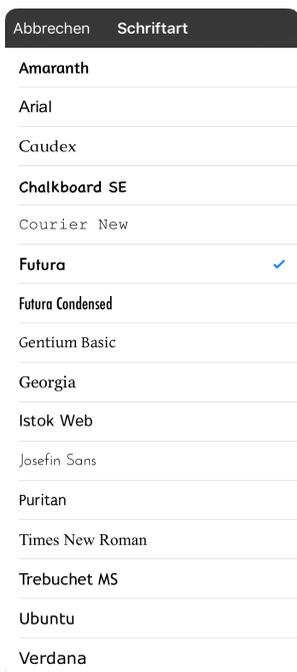

## Schriftgröße

Wählen Sie, in welcher Schriftgröße das Tastenlabel angezeigt werden soll. Mögliche Werte sind 6 bis 100 Punkt

Schriftgröße  
6 Punkt



Schriftgröße  
30 Punkt



## Schriftfarbe

Wählen Sie, in welcher Farbe das Tastenlabel angezeigt werden soll.

## Hintergrundfarbe

Wählen Sie, welche Hintergrundfarbe die Taste haben soll.

Hintergrund-  
farbe weiß



Hintergrund-  
farbe nilblau



## Rahmenfarbe

Wählen Sie, welche Farbe der Tastenrahmen haben soll. Standardmäßig haben alle Tasten einen schwarzen Rahmen.

Rahmenfarbe  
schwarz



Rahmenfarbe  
gelb 4



## Rahmenbreite

Wählen Sie, welche Breite der Tastenrahmen haben soll. Mögliche Werte sind 0 Punkt (kein Rahmen) bis 24 Punkt. Standardmäßig haben alle Tasten einen 2 Punkt starken Rahmen.

Rahmenbreite  
2 Punkt



Rahmenbreite  
10 Punkt




## Tastenfunktion

Hier können Sie wählen, was die Taste beim Auslösen machen soll. Standardmäßig sind alle Tasten mit der Funktion „Mitteilung ausgeben“ sowie „Springe zu Seite“ vorgelegt. Enthält eine Taste mehrere Funktionen, werden diese nacheinander ausgeführt. Alle Tastenfunktionen sind ab Seite 60 beschrieben.

## Bearbeiten

Wählen Sie „Bearbeiten“, um die existierende/n Tastenfunktion/en zu bearbeiten.

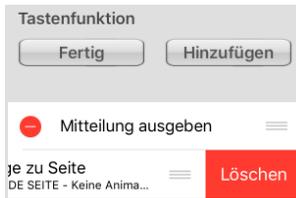

**Funktion löschen:** Wischen Sie auf der der Funktion, die Sie löschen wollen, von rechts nach links. Alternativ wählen Sie , um eine Funktion zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Tippen auf .

**Reihenfolge ändern:** Tippen und Halten Sie auf , um eine Funktion nach oben bzw. unten zu schieben.

**Fertig:** Tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie das Bearbeiten der Tastenfunktionen beendet haben.

## Hinzufügen

Wählen Sie „Hinzufügen“, um eine (weitere) Tastenfunktion auszuwählen. Alle Tastenfunktionen sind ab Seite 60 beschrieben.

Abbrechen Funktion auswählen
1 Auswahl von Seite >
Alle Seiten schließen
Audio aufnehmen >
Audio wiedergeben >
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl
Batteriestatus

# Tastenfunktionen

**1 Auswahl von Seite:** Eine Seite wird für die Auswahl einer Taste geöffnet, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite.

Tipp: Um die gewünschte Seite schneller zu finden, geben Sie den Namen der Seite in das Suchfeld ein:




**Alle Seiten schließen:** Alle über die Funktion „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten werden geschlossen.

**Alles sprechen:** Der aktuelle Inhalt des Textfensters wird gesprochen.

**App/Anwendung öffnen:** Ermöglicht es, eine ausgewählte auf dem iPad vorhandene App (Anwendung) direkt aus der Quasselkiste-App heraus zu öffnen.



Tippen Sie auf die Lupe , um eine App gezielt über ihren Namen zu suchen:

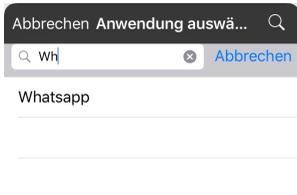

**Auf Seite bleiben für 1 Auswahl:** Verhindert den Rücksprung zur vorigen Seite von einer nur für eine Auswahl geöffneten Seite. Der Rücksprung erfolgt erst nach einer weiteren Auswahl.

**Batteriestatus:** Die verbleibende Kapazität des iPad-Akkus sowie des Verstärkerakkus wird im Textfenster angezeigt und per Sprachausgabe angegeben.

**Cursor bewegen:** Bewegt den Cursor um die bei Cursor-Modus gewählte Einheit (Zeichen, Wort oder Satz) in die gewählte Richtung links, rechts, hoch oder runter.

**Cursor platzieren:** Ermöglicht das Positionieren des Cursors im Textfenster durch Tippen auf die gewünschte Position.

**Cursor-Modus:** Wählen, Sie, ob sich der Cursor beim Befehl „Cursor bewegen“ zeichen-, wort- oder satzweise bewegen soll. Wählen Sie „Durchlauf“, um alle 3 Modi mit einer Taste durchwechseln zu können. Der aktuelle Modus (Zeichen, Wort oder Satz) wird auf der Taste angezeigt.

**Display löschen:** Der Inhalt des Textfensters wird gelöscht.

**Hilfesignal:** Ein Rufton, der genutzt werden kann, um Hilfe zu rufen, wird aktiviert.

**Internetadresse öffnen:** Öffnet die eingegebene Internetadresse im Browser.

**Label sprechen:** Das Tastenlabel wird gesprochen.

**Lauter:** Die Lautstärke wird um eine Stufe erhöht.

**Leiser:** Die Lautstärke wird um eine Stufe verringert.

**Letzte Ausgabe wiederholen:** Die letzte Sprachausgabe wird wiederholt.

**Letzten Satz sprechen:** Der letzte Satz wird wiederholt.

**Letztes Wort sprechen:** Das zuletzt eingegebene Wort wird gesprochen.

**Lösche Zeichen:** Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht.

**Mitteilung anzeigen:** Die zur Taste gehörende Mitteilung wird im Textfenster angezeigt, aber nicht gesprochen.

**Mitteilung ausgeben:** Die zur Taste gehörende Mitteilung wird angezeigt und gesprochen.

**Mitteilung sprechen:** Die zur Taste gehörende Mitteilung wird gesprochen, aber nicht im Textfenster angezeigt.

**Nächstes Wort abwandeln:** Ermöglicht das Beugen entsprechend gekennzeichneten Nomen, Adjektive oder Verben, bevor die Tasten abgerufen werden. Die Beugungsregel muss zusammen mit dem Befehl gespeichert werden.

**Profil wählen:** Lädt das ausgewählte Profil mit benutzerspezifischen Parametern und Einstellungen. Weitere Informationen zu Profilen finden Sie auf Seite 70.

**Rechner:** Der iOS-interne Taschenrechner wird eingeblendet.

**Scanning stoppen:** Beendet das gerade laufende Scanning.

**Seite anzeigen:** Eine gewünschte Seite wird angezeigt.  
Tipp: um die jeweilige Seite schneller zu finden, geben Sie den Namen der Seite in das Suchfeld ein:



**Seite zurück:** Die zuvor geöffnete Seite wird angezeigt.

**SMS – Seite Unterhaltungen anzeigen:** Die als „SMS-Unterhaltungen“ markierte Seite wird angezeigt.

**Sprachdatenaufzeichnung ein/aus:** Die Sprachdatenaufzeichnung wird aktiviert bzw. deaktiviert.

**Sprache anhalten/fortsetzen:** Die laufende Sprachausgabe wird angehalten bzw. fortgesetzt.

**Sprache aufnehmen:** Ermöglicht die Aufnahme eines Sounds (Audio) bzw. die Auswahl einer Audiodatei. Wählen Sie, ob Sie einen neuen Sound aufnehmen oder einen existierenden Sound überschreiben wollen.

**Sprache ein/aus:** Wechselweise wird die Sprachausgabe aus- oder zur vorigen Lautstärke zurückgeschaltet.

**Sprache wiedergeben:** Ermöglicht die Wiedergabe eines Sounds (Audio) bzw. einer Audiodatei. Wählen Sie, ob Sie einen neuen Sound oder einen existierenden Sound wiedergeben wollen.

**Springe zu Seite:** Eine Seite wird für die Auswahl einer Taste geöffnet, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur Startseite.

**Startseite anzeigen:** Die Startseite des aktuellen Vokabulars wird aufgerufen.

**Stopp:** Die aktuelle Sprachausgabe wird abgebrochen.

**Systemtastatur:** Die iOS-interne Tastatur wird eingeblendet.

**Textfenster – Text einfügen:** Der in der Zwischenablage gespeicherte Text wird in das Textfenster eingefügt.

**Textfenster – Text kopieren:** Der im Textfenster befindliche Text wird in die Zwischenablage kopiert.

**Textfenster – Text teilen:** Der im Textfenster befindliche Text wird an eine der im iPad für „Freigabe“ konzipierten Anwendungen geschickt.

**Textfenster speichern:** Der aktuelle Inhalt des Textfensters wird in einer Datei gespeichert.

**Tracking pausieren/fortsetzen:** Bei Ansteuerung mittels Augensteuerung oder Kopfsteuerung (Headtracking) pausiert das Tracking bzw. wird fortgesetzt.

**Wort abwandeln:** Das letzte im Textfenster angezeigte Wort (Nomen, Verb oder Adjektiv) kann mit dieser Funktion nachträglich abgewandelt (konjugiert bzw. dekliniert) werden. Die Beugungsregel muss zusammen mit dem Befehl gespeichert werden.

**Wort löschen:** Löscht das Wort links vom Cursor

**Wortart zuweisen:** Weist einer Taste eine Wortart (Nomen, Verb oder Adjektiv) zu. Diese Funktion wird benötigt zur Nutzung der Tastenfunktion „Nächstes Wort abwandeln“.

**Wortform zurücksetzen:** Setzt die Form eines mit der Tastenfunktion „Nächstes Wort abwandeln“ gebeugten Wortes wieder zurück auf die Grundform

**Wortsuche:** Das Vokabular wird nach dem eingegebenen Wort durchsucht.

**Wortvorhersage:** Die Taste wird zum Vorschlagsfeld für die Wortvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll.

**Zeichenvorhersage:** Die Taste wird zum Vorschlagsfeld für die statische Zeichenvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll.


**Zeit und/oder Datum ausgeben:** Zeit und/oder Datum werden im Textfenster angezeigt und gesprochen. Wählen Sie die Ausgabe:

- **Zeit und Datum:** Zeit und Datum werden angezeigt und gesprochen
- **Zeit:** Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt und gesprochen
- **Datum:** Das aktuelle Datum wird angezeigt und gesprochen


# WORTSUCHE

## Menü Wortsuche

Wählen Sie **Menü > Wortsuche**, um ein Wort im Vokabular zu suchen.

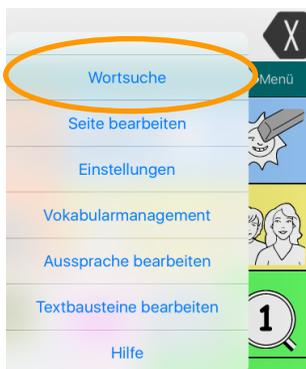

Tippen Sie das Wort mit der Bildschirmtastatur ein und wählen Sie „Suchen“.


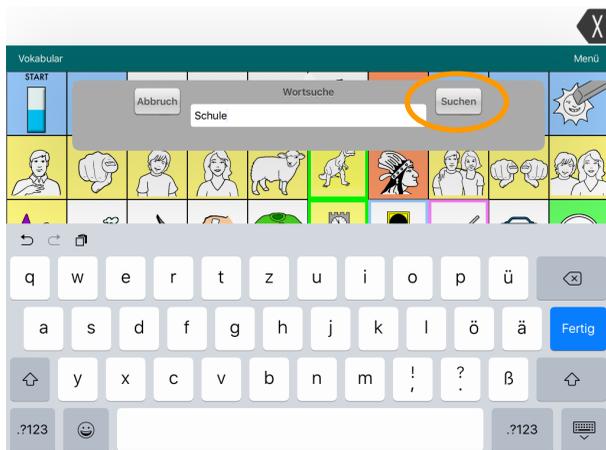


Alle Einträge werden angezeigt:




## Taste mit Funktion *Wort suchen* belegen

Die Wortsuche steht auch als Tastenfunktion zur Verfügung. In der Quasselkiste ist eine Taste in der Standardthemenleiste mit der Funktion belegt (siehe S. 18). Für Tasten steht dafür die Aktivität „Wort suchen“ zur Verfügung.

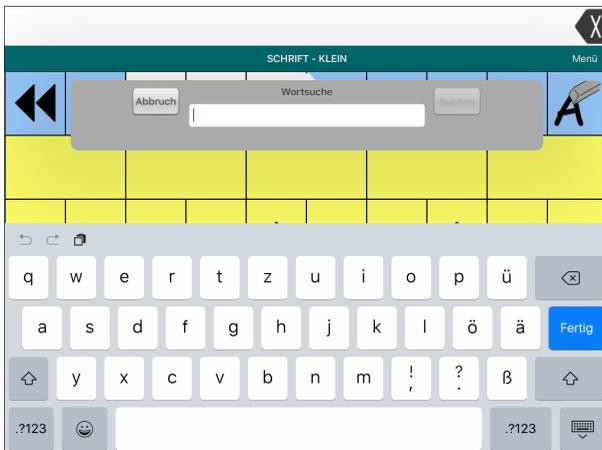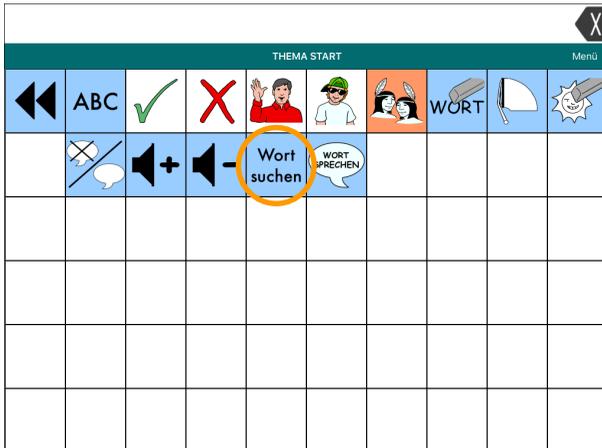

Tippen Sie über die iOS-Tastatur das gesuchte Wort ein oder tippen Sie auf **Fertig** oder auf , um die iOS-Tastatur auszublenden und die Eingabe an der Schrifttastatur der Quasselkiste vorzunehmen.

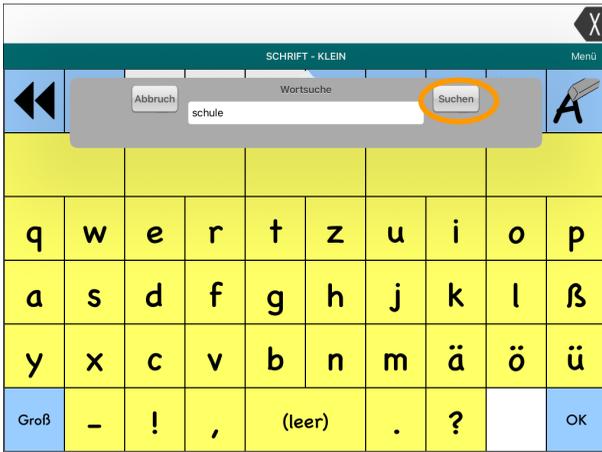

Tippen Sie auf „Suchen“, um die Suche zu starten.  
Alle Einträge werden angezeigt.




### Gesuchtes Wort in der Quasselkiste abrufen

Die Wortsuchfunktion erlaubt das unmittelbare Abrufen des gesuchten Wortes.  
Tippen Sie dazu auf den Pfeil > neben dem Eintrag.  
Die App zeigt die jeweiligen Seiten an und hebt die zu drückende Taste hervor.  
Andere Tasten können nicht aktiviert werden.



# EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Menü > Einstellungen**, um das Erscheinungsbild sowie die Ansteuerungsoptionen einzustellen und weitere Funktionen zu nutzen.

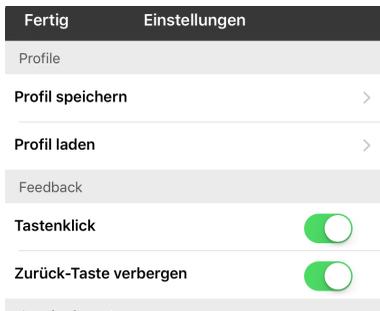

## Profile

Ein Profil speichert all ihre ansteuerungsrelevanten Einstellungen.

### Profil speichern

Haben Sie die Quasselkiste für Ihre Bedürfnisse optimal eingestellt, speichern Sie die Einstellungen als Profil. Sie können beliebig viele Profile speichern. Geben Sie jedem Profil einen eindeutigen Namen.

### Profil laden

Ein einmal erstelltes Profil können Sie jederzeit wieder laden. Alle im Profil gespeicherten Einstellungen werden wirksam.

## Feedback

### Tastenklick

Wählen Sie, ob beim Auslösen einer Taste ein Klickton wiedergegeben werden soll.

### Zurück-Taste verbergen

Wenn Sie eine neue Seite anlegen, enthält diese standardmäßig eine mit „zurück“ belegte Taste. Aktivieren Sie die „Zurück-Taste verbergen“, um neue Seiten ohne diese Taste zu erhalten.

## Anzeigeformat

### Statusleiste

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die iPad-Statusleiste (Uhrzeit, WLAN, Batterieladung) dauerhaft im Textfenster eingeblendet haben möchten.

## Gitter benutzen

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein 60-Felder-Fingerführungsgitter verwenden. Die Tastenfelder werden dann in den Bereich verschoben, den das Fingerführungsgitter für die Tastenfelder nutzt.

## Menüsperre

### Passwort Menüsperre

Wenn Sie das Menü sperren wollen, geben Sie hier ein Passwort ein. Das Menü kann anschließend nur nach Eingabe des korrekten Passwortes geöffnet werden.

### Menü mit Passwort entsperren

Wählen Sie diese Option, um die Menüsperre zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie die Passwortsperre in den iOS-Einstellungen im Abschnitt „Quasselkiste“ ausschalten.

## Sprache

### Stimme

Wählen Sie, welche Stimme die synthetische Sprachausgabe verwenden soll. Für die in der Quasselkiste genutzte Synthese der Firma Acapela stehen 7 Stimmen zur Verfügung, 5 Erwachsenenstimmen (Claudia, Julia, Sarah, Andreas und Klaus) sowie 2 Kinderstimmen (Lea und Jonas).

Die Stimmen Julia und Andreas sind bereits installiert, die weiteren Erwachsenenstimmen können Sie kostenlos herunterladen (benötigt WLAN).

Die beiden Kinderstimmen können kostenpflichtig als In-App-Kauf erworben werden.

Weiterhin können die im Betriebssystem iOS enthaltenen Stimmen genutzt werden.

Abbrechen Stimme Bearbeiten

DEUTSCHE STIMMEN

- Julia  
Deutsche Stimme (Deutschland) weiblich
- Klaus  
Deutsche Stimme (Deutschland) männlich
- Sarah  
Deutsche Stimme (Deutschland) weiblich
- Andreas  
Deutsche Stimme (Deutschland) männlich
- Claudia  
Deutsche Stimme (Deutschland) weiblich
- Jonas (Kind)  
Deutsche Stimme (Deutschland) männlich

Lea (Kind)  
Deutsche Stimme (Deutschland) weiblich

Anna (Erweitert)  
Deutsch (Deutschland)

Helena (Erweitert)  
Deutsch (Deutschland) weiblich

Markus (Erweitert)  
Deutsch (Deutschland)

Yannick (Erweitert)  
Deutsch (Deutschland)

Anna  
Deutsch (Deutschland)

= Anhören der Stimme

= Herunterladen der Stimme (WLAN benötigt)

Wählen Sie „Bearbeiten“, um heruntergeladene Stimmen wieder zu löschen.

## Geschwindigkeit

Stellen Sie hier ein, wie schnell die synthetische Stimme Mitteilungen spricht.

## Stimmhöhe

Stellen Sie hier ein, in welcher Stimmlage die synthetische Stimme Mitteilungen spricht. Mögliche Werte sind Niedrigste, Niedriger, Niedrig, Normal, Hoch, Höher, Höchste.

## Telefon-/FaceTime-Stimme


Wenn Sie mit dem PRiO mit der Telefon-App oder mittels Facetime jemanden anrufen, können Sie hier einstellen, welche Stimme bei der Unterhaltung verwendet werden soll. Die während des Telefonats von Ihnen abgerufenen Mitteilungen werden nicht über die Lautsprecher ausgegeben, sondern nur dem Anrufer übermittelt.

Um ein Telefonat mit dem PRiO zu führen, öffnen Sie die Telefon-App oder Facetime, stellen Sie die Verbindung her und wechseln Sie dann wieder zur Quasselkiste-App.

## Textfenster

### Textfenster verbergen

Wählen Sie diese Option, wenn das Textfenster nicht angezeigt werden soll.

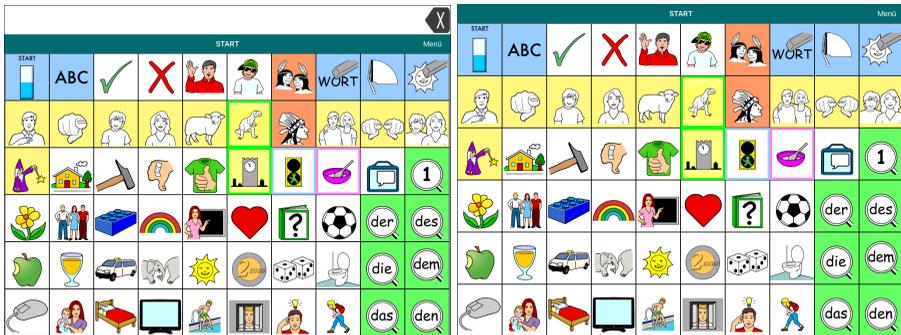


Textfenster sichtbar

Textfenster verbergen

### Kopieren und Einfügen erlauben

Wählen Sie diese Option, wenn Kopieren und Einfügen von Text im Textfenster erlaubt sein soll. Ist die Option aktiviert, wird durch längeres Tippen auf das Textfenster das Kontextmenü aktiviert:

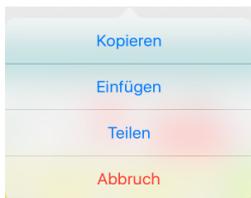

## **Automatische Großschreibung**

Ist diese Option aktiviert, beginnt die Quasselkiste jeden neuen Satz im Textfenster automatisch mit einem Großbuchstaben.

## **Schriftart**

Wählen Sie, in welcher Schriftart Text im Textfenster angezeigt werden soll. Mögliche Schriftarten sind Arial, Chalkboard SE, Futura und Times New Roman.

## **Hintergrundfarbe**

Wählen Sie, ob das Textfenster Schrift vor einem weißen („Normal“) oder einem gelben („Hoher Kontrast“) Hintergrund anzeigen soll.

## **Anzahl der Zeilen**

Wählen Sie, wie viele Zeilen Text im Textfenster angezeigt werden sollen. Mögliche Werte sind 1 bis 10. Bei Verwendung eines Fingerführungsgitters haben Sie nur die Wahl zwischen 1 oder 2 Zeilen Text. Ab 3 Zeilen vergrößert sich Textfenster, so dass das Fingerführungsgitter nicht mehr verwendet werden kann.

## **Sichtbarer Cursor**

Sie können einen Cursor (eine Schreibmarke) anzeigen lassen. Der Cursor blinkt hinter dem zuletzt eingegebenen Wort.

## **Cursor platzieren erlaubt**

Ist diese Option eingeschaltet, ist das Platzieren des Cursors an einer beliebigen Stelle im Textfenster möglich. Tippen Sie dazu so lange auf das Textfenster, bis das Kontextmenü angezeigt wird. Wählen Sie „Cursor platzieren“. Tippen Sie dann auf die Stelle im Text, an der der Cursor platziert werden soll.

## **Textfenster-Aktion**

Wählen Sie, was passieren soll, wenn man auf das Textfenster tippt: „Alles sprechen“ oder „Keine Aktion“.

## **Gesprochenes Wort hervorheben**

Schalten Sie die Option ein, wenn Sie bei der Wiedergabe von Mitteilungen das jeweils gesprochene Wort im Textfenster markiert haben wollen. Wählen Sie eine Farbe, um die Option einzuschalten Wählen Sie AUS, um das Hervorheben auszuschalten.

## **Hervorhebungsfarbe Telefon/Facetime**

Wählen Sie, welche Farbe das Textfenster haben soll, wenn Sie mit dem Talker telefonieren bzw. e Facetime-Anruf führen. Die abweichende Farbe signalisiert, dass gerade ein Gespräch stattfindet.

## **Sprachausgabe**

Wählen Sie, welche Eingaben automatisch während der Eingabe gesprochen werden sollen:

### **Zeichen sprechen**

Spricht jedes Zeichen beim Buchstabieren.

### **Wort sprechen**

Spricht jedes ganze Wort. Ein Wort gilt als abgeschlossen bei Eingabe eines Leer- oder Satzzeichens.

### **Satz sprechen**

Spricht jeden ganzen Satz. Ein Satz gilt als abgeschlossen bei Eingabe eines Satzzeichens.

### **Textfenster automatisch löschen**

„Aus“: Das Textfenster wird nicht automatisch gelöscht.

„Sofort“: Das Textfenster wird automatisch gelöscht, sobald mit der Wiedergabe der Mitteilung begonnen wird.

### **Verhindere Unterbrechung**

Verhindert, dass eine laufende Sprachausgabe durch erneutes Tippen auf das Textfenster unterbrochen wird.

## **Sprachdatenaufzeichnung**

Die Sprachdatenaufzeichnung zeichnet alle Aktivitäten des Benutzers mit dem Gerät auf und erlaubt genaue Rückschlüsse,

- welche Äußerungen der Benutzer getätigt hat,
- wie Mitteilungen produziert wurden (über Symbole, durch Buchstabieren, durch Nutzung der Wortvorhersage),
- wie schnell Mitteilungen produziert wurden. Jede Aktivität wird dazu mit einem „Zeitstempel“ versehen.

Mit Hilfe der Online-Ressource „RealizeLanguage“ ist es möglich, die Daten zu analysieren und auszuwerten. Die die damit gewonnenen Kenntnisse helfen Therapeuten und Pädagogen bei der Planung der weiteren Förderung.

Aufgrund der potenziellen Vertraulichkeit der Daten ist folgendes zu beachten:

- Die Sprachdatenaufzeichnung darf nur mit Einverständnis und in Absprache mit dem Benutzer erfolgen.

- Der Benutzer sollte die Möglichkeit haben, die Sprachdatenaufzeichnung jederzeit zu beenden und aufgezeichnete Daten zu löschen.
- Die Sprachdatenaufzeichnung sollte i.d.R. nur in ausgewählten Situationen, z.B. während der Sprachtherapie, erfolgen und nicht grundsätzlich eingeschaltet sein.

## Sprachdaten aufzeichnen

Hier können Sie die Sprachdatenaufzeichnung aktivieren bzw. deaktivieren.

## Privatsphärenpasswort

Hier können Sie ein Passwort für die Sprachdatenaufzeichnung definieren. Das Passwort muss bei jeder die Sprachdatenaufzeichnung betreffenden Aktion (Ein- oder Ausschalten, Sprachdaten löschen oder hochladen) eingegeben werden.

Achtung: Merken Sie sich das Privatsphärenpasswort gut; es kann im Falle eines Verlustes nicht wiederhergestellt werden.

## Privatsphärenpasswort ändern

Um das Privatsphärenpasswort zu ändern, tippen Sie in das Feld, löschen Sie das aktuelle Passwort und geben Sie das neue Passwort ein.

## Privatsphärenpasswort löschen

Um das Privatsphärenpasswort zu löschen, tippen Sie in das Feld und löschen Sie das aktuelle Passwort.

## Aufzeichnung löschen

Hier können Sie die auf dem Gerät aufgezeichneten Sprachdaten löschen.

## RealizeLanguage einrichten

Sie benötigen ein Konto bei RealizeLanguage.de, das Sie bei Prentke Romich erhalten. Im Preis eines PRIO-Q von Prentke Romich ist ein Jahresabo RealizeLanguage enthalten.

Abbrechen Sichern

 Realize Language

RealizeLanguage E-Mail-Adresse  
name@provider.de

RealizeLanguage-Passwort

Autom. hochladen

Aktueller Benutzer >

Jetzt hochladen

Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort Ihres RealizeLanguage-Kontos ein. Diese Informationen brauchen nur einmal eingegeben zu werden.

### **Autom. hochladen**

Aktivieren Sie diese Option, wenn die in der Quasselkiste gesammelten Sprachdaten automatisch auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto hochgeladen werden sollen.

Hinweis: Um Daten direkt auf das RealizeLanguage-Konto hochladen zu können, muss das iPad Internetzugang haben.

### **Aktueller Benutzer**

Die mit der Quasselkiste generierten Sprachdaten müssen einem in RealizeLanguage angelegten Benutzer zugewiesen werden.

Tippen Sie auf „Aktueller Benutzer“, um die Liste der in RealizeLanguage angelegten Benutzer zu sehen.

Wählen Sie den Benutzer aus bzw. legen Sie ihn in RealizeLanguage an.

## **Tasten**

Hier können Sie die Ansteuerung und die Art der Darstellung der Tastenfelder anpassen.

### **Beim Loslassen auslösen**

Standardmäßig lösen Tasten beim Drücken aus. Ist diese Option aktiviert, lösen Tasten erst beim Loslassen aus.

### **Verweildauer**

Wählen Sie, wie lange eine Taste gedrückt werden muss, bis sie auslöst. Die Verweildauer lässt sich zwischen 0 und 1 Sekunde einstellen in 0,1-Sekunden-Schritten.

### **Loslassdauer**


Wählen Sie, wie lange eine Taste losgelassen werden muss, bevor eine andere Taste ausgewählt werden kann. Die Loslassdauer lässt sich zwischen 0 und 1 Sekunde einstellen in 0,1-Sekunden-Schritten.

### **Auslösen anzeigen**

Wählen Sie, ob das Auslösen einer Taste angezeigt werden soll.

### **Hintergrundfarbe**

Wählen Sie, in welcher Farbe nicht belegte Tastenfelder angezeigt werden sollen. Standardwert ist weiß.

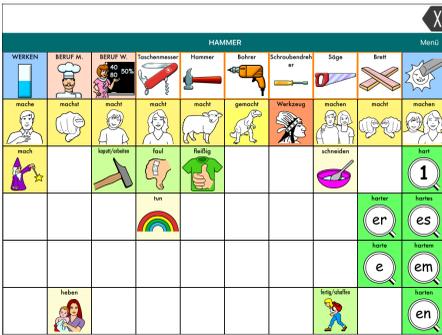


Hintergrundfarbe weiß



Hintergrundfarbe rot

## Raster anzeigen

Bei angezeigtem Raster erhalten auch leere oder versteckte Tasten einen Rahmen. Wird das Raster ausgeblendet, werden solche Felder ohne Rahmen und Hintergrund angezeigt.

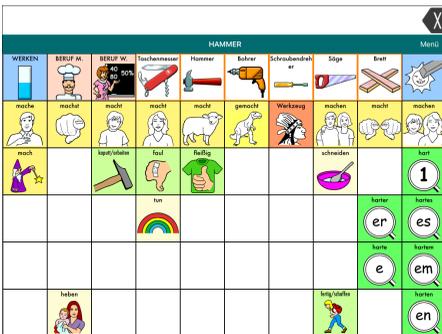

Raster eingeblendet




Raster ausgeblendet

## Dynamische Labels


Diese Option ermöglicht der Quasselkiste, abgewandelte Wortformen als Label auf den Tasten anzuzeigen. Zur ordnungsgemäßen Nutzung der Quasselkiste sollte diese Option immer aktiviert sein.

## Tastenrandgröße

Tastenfelder können mit einem Rand versehen werden, so dass sie mit einem gewissen Abstand voneinander angezeigt werden. Dies hilft manchen Benutzern, die Tasten besser zu erkennen. Mögliche Werte für den Tastenrand sind 0 bis 100 Punkte.

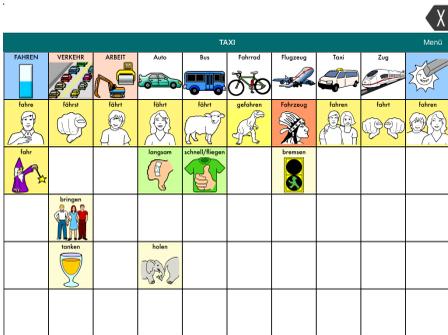

Tasten ohne Rand

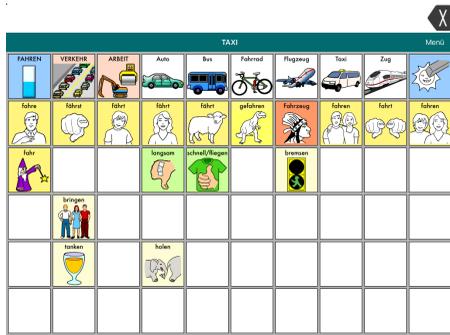

Tasten mit 10 Punkt Rand

## Soziale Netzwerke

### Soziale Netzwerke erlauben

Diese Option erlaubt das Teilen des Textfensterinhalts über auf dem iPad vorhandene Social Media Apps (Facebook, WhatsApp, Twitter etc.).

Ist die Option aktiviert, enthält das Textfenster-Kontextmenü zusätzlich die Option „Teilen“:



Textfenster-Kontextmenü bei „Soziale Netzwerke erlauben“



Textfenster-Kontextmenü bei „Soziale Netzwerke nicht erlauben“

Wählen Sie „Teilen“, um die auf dem iPad vorhandenen Apps zum Teilen von Inhalten anzuzeigen.



Wählen Sie die gewünschte App.

# Verstärker

Benutzer eines PRiOs von PRD können hier den Aktivlautsprecher im PRiO-Gehäuse konfigurieren.




## Verstärker auswählen

Ist die App mit dem Verstärker verbunden, zeigt sie als Status „Verbunden“ an, ansonsten „Nicht verbunden“.

Tippen Sie auf „Verstärker auswählen“, um die App mit dem Verstärker zu verbinden. Der Verstärker muss dazu eingeschaltet sein. Der PRiO-Verstärker taucht als „ChatWrapLE“ in der Liste auf. Weiterhin wird der aktuelle Ladezustand des Verstärkers angezeigt.



## Verstärker einrichten

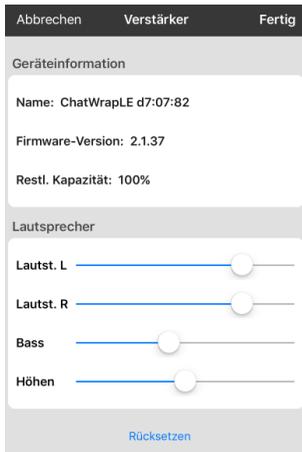


Im Abschnitt „Geräteinformation“ sehen Sie die ID des Verstärkers, die aktuell im Verstärker enthaltenen Firmware sowie den Ladezustand.

Im Abschnitt „Lautsprecher“ können Sie die Lautstärke sowie den Anteil der Bässe und Höhen einstellen.

Sollte der Verstärker nicht funktionieren, können Sie ihn mit dem Button „Rücksetzen“ resetten.

## Verstärker-Firmwareupdate

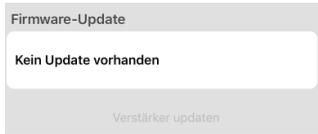

Sollte für den Verstärker eine neue Software vorliegen, können Sie über diesen Menüpunkt ein manuelles Firmwareupdate durchführen.

## Scanning

### Scanning aktivieren

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie die Quasselkiste mittels Scanning ansteuern wollen.

### Tasten konfigurieren

**Tasten konfigurieren:** Wählen Sie, ob Sie mit 1 oder 2 Tastsen scannen wollen.

**Taste 1:** Weisen Sie der Funktion Taste 1 eine Taste zu. Tippen Sie auf die Option und betätigen Sie anschließend die gewünschte Taste. Haben Sie keine externe/n Taste/n, können Sie auch das Display als große Auslösetaste verwenden. Jede Berührung des Displays zählt als Tastenbetätigung.

**Taste 2:** Weisen Sie der Funktion Taste 2 eine Taste zu. Tippen Sie auf die Option und betätigen Sie anschließend die gewünschte Taste. Haben Sie bei „Tasten konfigurieren“ die Option „1 Taste gewählt“, steht die Option Taste 2 nicht zur Verfügung.

### Auto-Scan

Schalten Sie diese Option ein, wenn der PRiO/Via automatisch mit dem Scanning beginnen soll. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie eine externe Taste betätigen, um das Scanning zu starten.

### Taste-Halten-Scanning (nur bei Auto-Scan = AUS)

Beim Taste-Halten-Scanning erfolgt das Scanning, solange die Taste gedrückt bleibt. Ein Feld wird ausgewählt durch Loslassen der Taste.

### Auto-Restart

Schalten Sie diese Option ein, wenn der PRiO/Via nach Auswahl eines Feldes im Scanverfahren automatisch das Scanning neu beginnen soll. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie eine externe Taste betätigen, um das Scanning erneut zu starten

### Ansage-Scanning

Schalten Sie diese Option ein, wenn der PRiO/Via beim Scanning gesprochene Hinweise zur Navigation ausgeben soll.

## **Ansagenstimme**

Wählen Sie, welche Stimme für die Ansagen verwendet werden sollen. Für Ansagen sollte grundsätzlich eine andere Stimme als die Sprechstimme verwendet werden.

## **Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme**

Wählen Sie, wie schnell die Ansagen gesprochen werden sollen.

## **Höhe Ansagenstimme**

Wählen Sie die Höhe der Ansagenstimme.

## **Textfenster scannen**

Schalten Sie diese Option ein, wenn auch das Textfenster gescannt werden soll (z.B. um die Funktion „Alles sprechen“ auszuwählen).

## **Leere Felder überspringen**

Ist diese Option eingeschaltet, werden leere Felder beim Scanning übersprungen. Das Scanning ist dadurch schneller.

## **Art des Scannings**

Wählen Sie zwischen Zeile/Spalte und sequenziellem Scanning.

**Zeile/Spalte:** Es wird zunächst die Zeile ausgewählt, in der das gewünschte Feld liegt. Anschließend wird feldweise durch die ausgewählte Zeile gescannt.

**Sequenziell:** Es wird linear durch alle Felder der Seite gescannt, von links nach rechts und von oben nach unten.

## **Scangeschwindigkeit**

Wählen Sie, wie lange die Auswahl auf einer Zeile/einem Feld pausiert, bevor sie sich weiterbewegt. Mögliche Werte sind 0,2 – 1,5 Sekunden in 0,1-Sekunden-Schritten, 2,0 – 5.0 Sekunden in 0,5-Sekunden-Schritten sowie 6,0 – 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten.

## **Zahl der Durchläufe**

Wählen Sie, wie lange das Scanning weiterläuft, wenn keine Eingabe gemacht wird. Mögliche Werte sind 0, 1, 2, 3, 4, 5 10 und 100 Durchläufe.





# VOKABULARMANAGEMENT

# Vokabularmanagement

Sie können mit Hilfe der Funktion **Vokabularmanagement** das in der Quasselkiste vorhandene Vokabular reduzieren, ohne dass Sie Aussagen löschen müssen. Dies ist hilfreich, um, z.B. den Benutzer der Quasselkiste kleinschrittig an das umfangreiche Vokabular heranzuführen.

Wählen Sie **Menü > Vokabularmanagement**, um das Vokabularmanagement einzuschalten und das anzuzeigende / zu verbergende Vokabular auszuwählen.

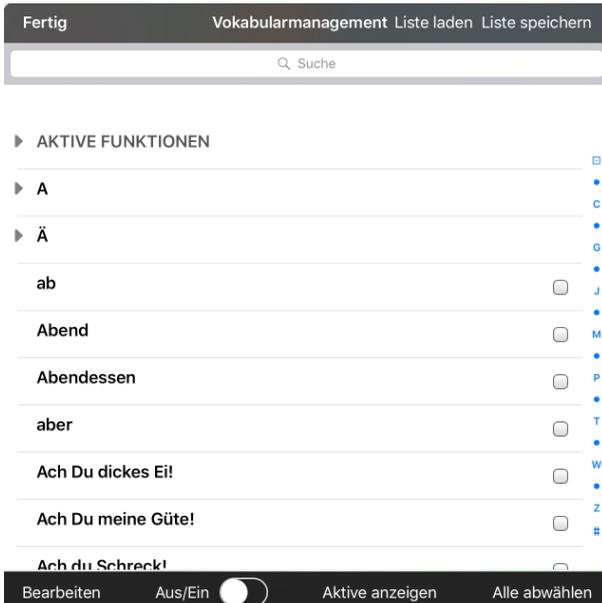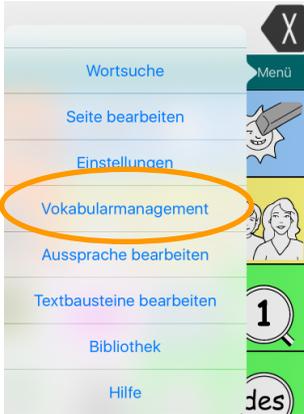

## Vokabularmanagement ein/ausschalten

Mit dem Schieber am unteren Bildschirmrand können Sie das Vokabularmanagement ein- bzw. ausschalten.

Schieben Sie den Schieber nach links, um das Vokabularmanagement einzuschalten. Nur als sichtbar markiertes Vokabular steht dann noch zur Verfügung.

Schieben Sie den Schieber nach rechts, um das Vokabularmanagement auszuschalten. Das gesamte Vokabular steht dann wieder zur Verfügung.

## Vokabular auswählen

Das Fenster zeigt alle in der Quasselkiste gespeicherten Aussagen in alphabetischer Reihenfolge. Ein Dreieck ▶ neben einem Eintrag bedeutet, dass die Mitteilung mehrfach vorkommt. Tippen Sie auf das Dreieck, um die Liste aufzuklappen:

▼ A

a	ABC	a	<input type="checkbox"/>	
A	ABC	Groß	A	<input type="checkbox"/>

Markieren Sie das Kontrollkästchen hinter jeder Mitteilung, die dem Benutzer zu Verfügung stehen soll.


ich gehe	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Um Wörter schneller zu finden, benutzen Sie die *Suche* 🔍. Tragen Sie das Wort in das Suchfeld ein. Die Auswahl verändert sich, während Sie tippen.

🔍 Schule	✕	
▶ SCHUH		
Schule	<input type="checkbox"/>	□
Schulter	<input type="checkbox"/>	B
▶ SCHÜSSEL		E
▶ SCHWACH		G
schwache	<input type="checkbox"/>	I
schwachem	<input type="checkbox"/>	L
schwachen	<input type="checkbox"/>	N
schwacher	<input type="checkbox"/>	Q
schwaches	<input type="checkbox"/>	S


Im folgenden Beispiel sind nur die 4 Mitteilungen „ich gehe“, „in“, „die“ und „Schule“ aktiv, alle anderen Mitteilungen sind ausgeblendet.

Der Startbildschirm zeigt nur noch Tasten, die zu den 4 Mitteilungen führen.

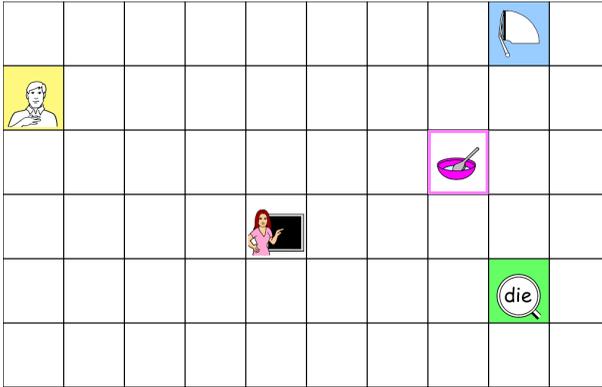


## Vokabularauswahl anpassen

Wählen Sie **Menü > Vokabularmanagement**.

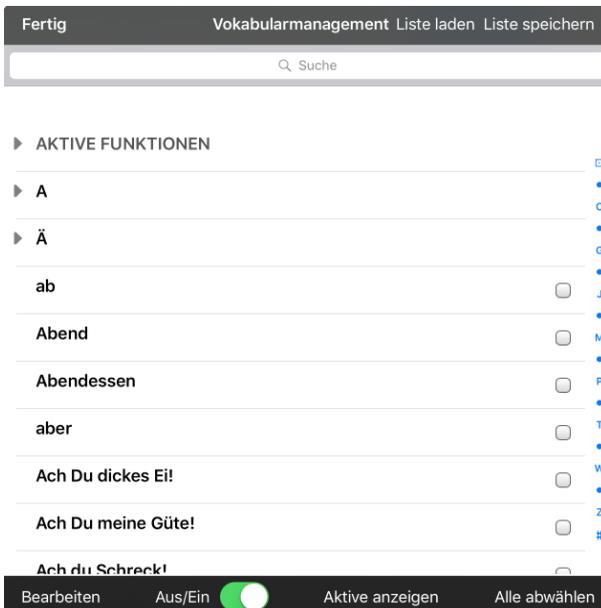


Tippen Sie auf „Aktive anzeigen“, um nur die ausgewählten Mitteilungen zu sehen.

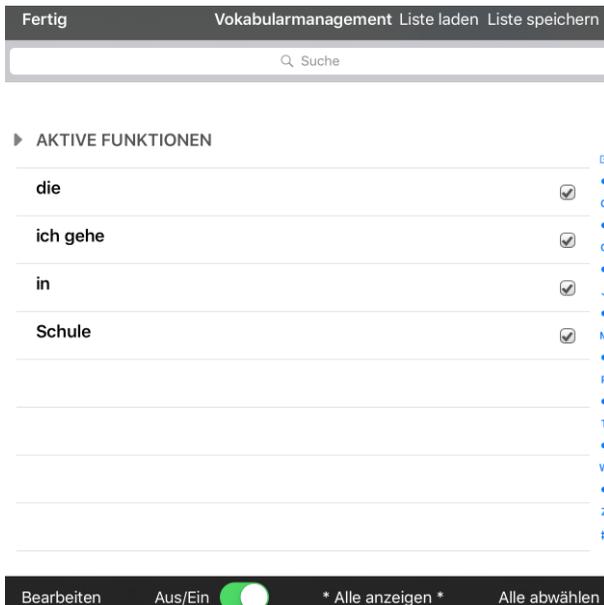


Tippen Sie auf „**Alle abwählen**“, um den Haken bei allen Mitteilungen zu entfernen. Sämtliche Mitteilungen im Vokabular sind ausgeblendet.

Tippen Sie auf „**Alle anzeigen**“, um alle im Vokabular vorhandenen Mitteilungen zu sehen. Markieren Sie Mitteilungen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen sollen.


Statt über die Liste können Sie gewünschte Wörter auch manuell hinzufügen. Wählen Sie dazu „**Bearbeiten**“.

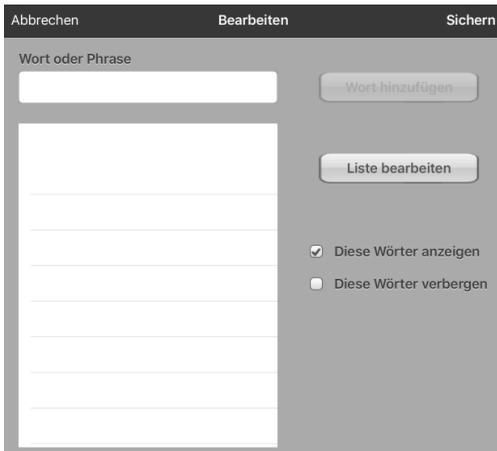

Tippen Sie auf das Feld „Wort oder Phrase“ und geben Sie das gewünschte Wort oder die gewünschte Phrase ein. Tippen Sie dann auf „Wort hinzufügen“.

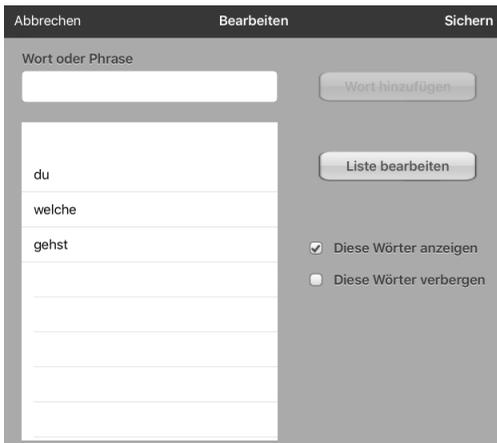

Um ein Wort wieder von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf „Liste bearbeiten“.

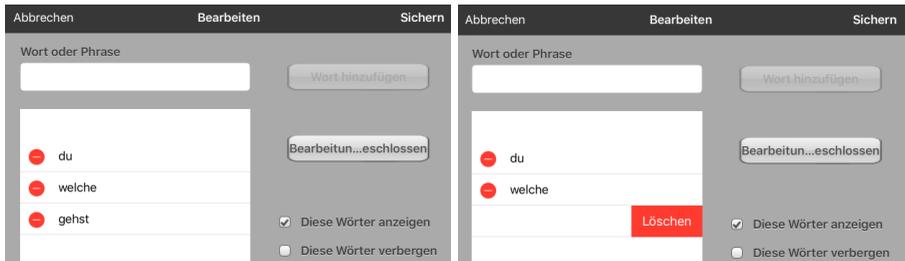

Tippen Sie auf , um einen Eintrag zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch tippen auf . Beenden Sie das Bearbeiten der Liste durch tippen auf „Fertig“.

Sie können wählen, ob die so manuell eingegeben Mitteilungen aus dem sichtbaren Vokabular entfernt oder ihm hinzugefügt werden.

Sollen die Mitteilungen sichtbar sein, wählen Sie „Diese Wörter anzeigen“. Um die Mitteilungen zu verbergen, wählen Sie „Diese Wörter sperren“.

Haben Sie alle Mitteilungen eingegeben, speichern Sie Ihre Eingabe durch tippen auf „Sichern“.

Um dem Benutzer wieder den gesamten Wortschatz zur Verfügung zu stellen, schalten Sie das Vokabularmanagement aus.

## AKTIVE FUNKTIONEN

Neben Mitteilungen können Sie auch mit Funktionen belegte Tasten (Startseite anzeigen, Display löschen, Seite zurück etc.) ausblenden.

Tippen Sie auf das  neben dem Eintrag „AKTIVE FUNKTIONEN“, um die Liste aufzuklappen.

▼ AKTIVE FUNKTIONEN	
Display löschen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ganze Tastatur anzeigen	<input type="checkbox"/>
Seite zurück	<input type="checkbox"/>
Startseite anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Wort abwandeln: Nomen Pl.	<input type="checkbox"/>

Standardmäßig bleiben mit „Display löschen“ und „Startseite anzeigen“ belegte Tasten sichtbar.

Wählen Sie die Funktionstasten aus, die sichtbar bleiben sollen, indem Sie den Haken setzen bzw. entfernen.


Hinweis: wenn Sie alle Funktionstasten ausblenden, können versehentlich geöffnete Seiten nicht mehr verlassen werden!

## Listen verwenden

Sie können die zur Verfügung stehenden Mitteilungen als Liste speichern, um sie beim nächsten Mal schneller einstellen zu können.

## Liste anlegen

Tippen Sie auf „Liste speichern“.

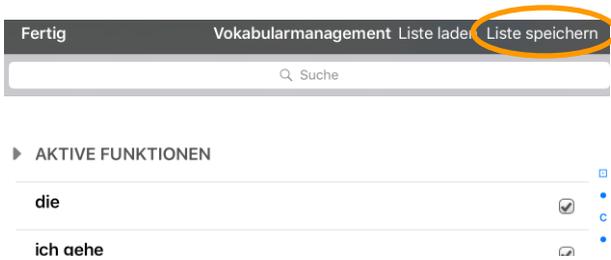

Geben Sie der Liste einen Namen und wählen Sie „Sichern.“




## Liste laden


Um dem Benutzer nur das in einer Liste definierte Vokabular zur Verfügung zu stellen, wählen Sie „Liste laden“.



Tippen Sie auf die gewünschte Liste:

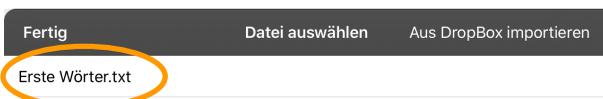

Wählen Sie „Datei laden“ aus dem Kontextmenü:

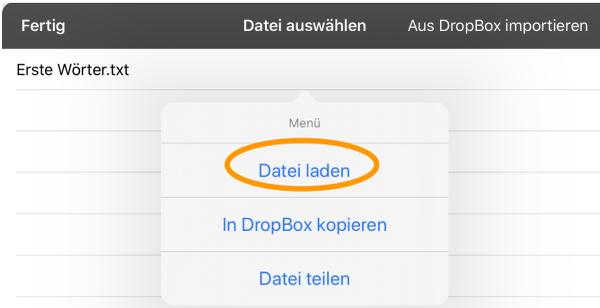


### Liste in DropBox kopieren oder teilen


Um eine Liste in die DropBox zu kopieren oder zu teilen, wählen Sie „Liste laden“.



Tippen Sie auf die gewünschte Liste:

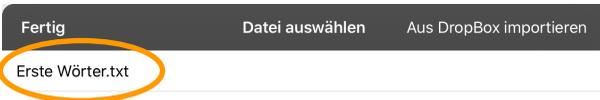

Wählen Sie „In DropBox kopieren“ oder „Datei teilen“ aus dem Kontextmenü:

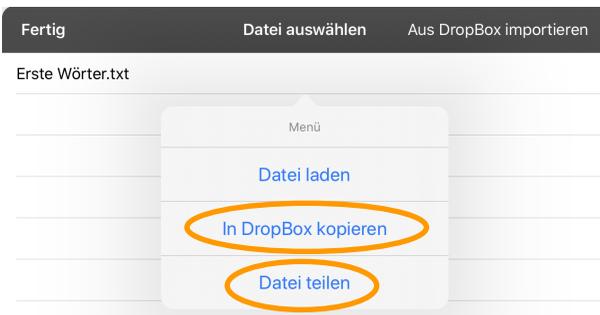

## Liste löschen

Um eine Liste mit Wörtern für das Vokabularmanagement zu löschen, wählen Sie „Liste laden“.




Wischen Sie auf der die Liste, die Sie löschen wollen, von rechts nach links.

# AUSSPRACHE

Das Aussprachelexikon ermöglicht die Korrektur von Fehlern in der Aussprache der synthetischen Stimme z.B. bei Wörtern, die aus einer anderen Sprache stammen. Fügen Sie in so einem Fall eine phonetische Ausspracheregeln für das Wort hinzu.

Wählen Sie **Menü > Aussprachelexikon**.

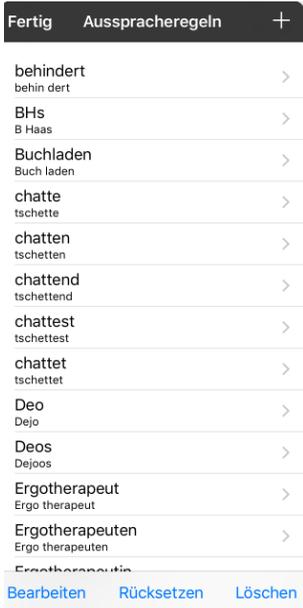

## Wort hinzufügen

Tippen Sie auf das .

Geben Sie bei „Wort“ das Wort ein, für das Sie eine Ausspracheregeln hinterlegen wollen.

Geben Sie bei „Aussprache“ eine phonetische Aussprache ein.

Zum Anhören tippen Sie auf „Anhören“.




Speichern Sie die Regel durch Tippen auf „Sichern“.

## Ausspracheregeln ändern

- Tippen Sie auf die Ausspracheregeln, die Sie bearbeiten wollen.
- Ändern Sie die Aussprache wie gewünscht.
- Speichern Sie die Regel anschließend durch Tippen auf „Sichern“.

## Ausspracheregeln löschen

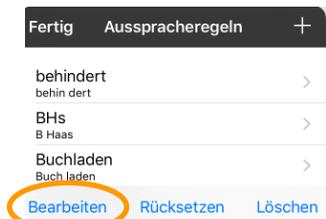


Wählen Sie „Bearbeiten“.


Tippen Sie auf , um einen Eintrag zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Tippen auf .

## Ausspracheregeln rücksetzen

Sie können die Ausspracheregeln auf Auslieferungszustand zurücksetzen. Alle von Ihnen hinzugefügten Ausspracheregeln gehen dabei verloren.

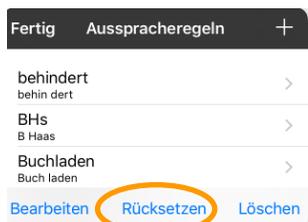


Wählen Sie „Rücksetzen“.

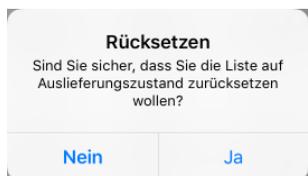

Bestätigen Sie die Rückfrage mit „Ja“.

## Alle Ausspracheregeln löschen

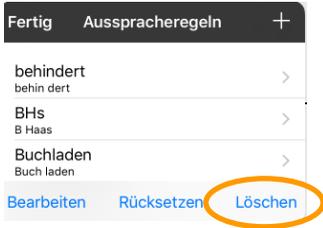

Wählen Sie „Löschen“.




Bestätigen Sie die Rückfrage mit „Ja“.

# TEXTBAUSTEINE


Textbausteine sind Wörter oder Sätze, die durch eine Abkürzung repräsentiert sind. Wird die Abkürzung gefolgt von einem Punkt eingegeben, ersetzt die App sie mit dem zugehörigen Text.

Wählen Sie **Menü > Textbausteine**.  
Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.

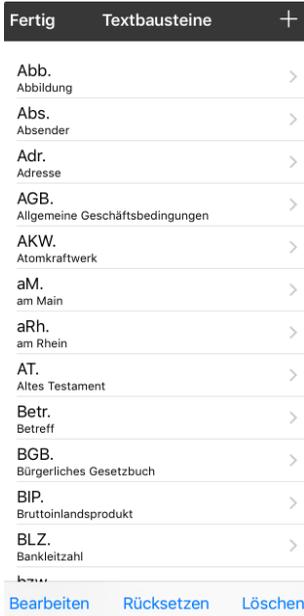

## Textbaustein hinzufügen

Tippen Sie auf , um einen Textbaustein hinzuzufügen.

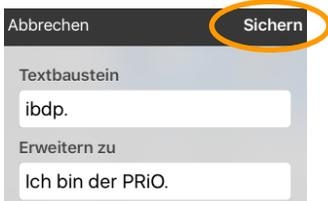

Geben Sie die Abkürzung ein.  
Geben Sie den dafür zu ersetzenden Text ein.  
Wählen Sie „Sichern“, um den neuen Textbaustein zu speichern.

## Textbaustein bearbeiten


Tippen Sie auf einen Textbaustein, um Abkürzung und/oder Inhalt zu bearbeiten.



Ändern Sie den Textbaustein wie gewünscht. Wählen Sie „Sichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.

## Textbaustein löschen

Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um einen oder mehrere Textbausteine zu löschen.

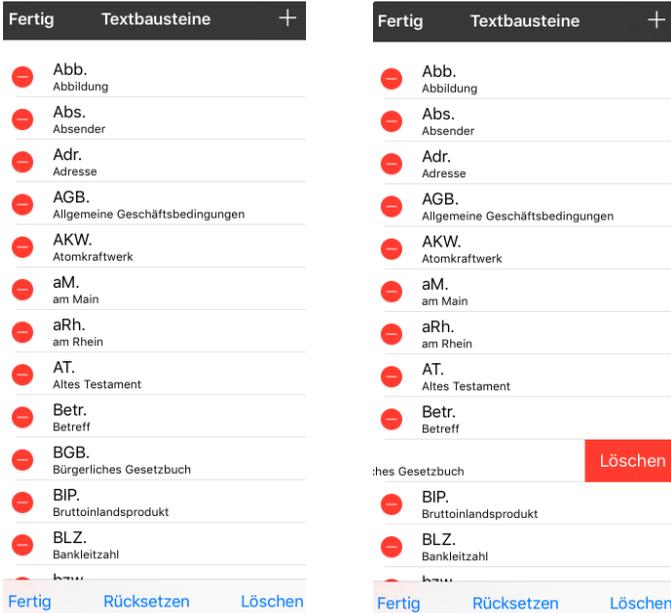

Fertig	Textbausteine	+
–	Abb. Abbildung	
–	Abs. Absender	
–	Adr. Adresse	
–	AGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen	
–	AKW. Atomkraftwerk	
–	aM. am Main	
–	aRh. am Rhein	
–	AT. Altes Testament	
–	Betr. Betreff	
–	BGB. Bürgerliches Gesetzbuch	Löschen
–	BIP. Bruttoinlandsprodukt	
–	BLZ. Bankleitzahl	
–	hww	
Fertig	Rücksetzen	Löschen

Tippen Sie auf , um einen Eintrag zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Tippen auf .

## Alle Textbausteine löschen


Tippen Sie auf „Löschen“, um alle Textbausteine auf einmal zu löschen.



Bestätigen Sie die Löschanfrage mit „Ja“.

## Textbausteine rücksetzen auf Werkseinstellungen

Tippen Sie auf „Rücksetzen“, um Ihre selbst hinzugefügten Textbausteine zu löschen. Die Liste der Textbausteine ist dann wieder im Auslieferungszustand.

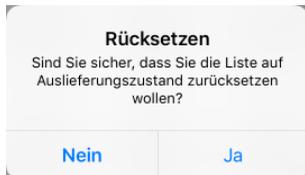

Bestätigen Sie die Löschanfrage mit „Ja“.

# BIBLIOTHEK

Die Bibliothek bezeichnet die Sammlung Ihrer Vokabulare in der App. Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.



Im Auslieferungszustand enthält die Bibliothek nur das mitgelieferte Vokabular der Quasselkiste. Haben Sie die Metacom-Symbole in der App freigeschaltet, so steht auch die Quasselkiste (Metacom) zur Verfügung. Das geschlossene

Vorhängeschloss  weist darauf hin, dass diese Vokabulare nicht bearbeitet werden können. Um ein Vokabular zu erhalten, das Sie bearbeiten können, müssen Sie eine Kopie anfertigen.

## Vokabular kopieren


Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Vokabular kopieren**, um ein bestehendes Vokabular zu kopieren.

Wählen Sie das Vokabular aus, das Sie kopieren möchten.



Geben Sie einen Namen für die Kopie und – wenn gewünscht – eine Beschreibung ein.

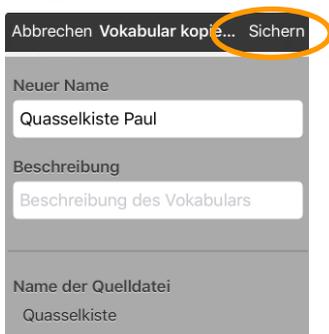

Wählen Sie „Sichern“. Die Kopie wird erstellt.




## Neues Vokabular erstellen

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Neues Vokabular erstellen**, um ein neues, leeres Vokabular zu erstellen.

Geben Sie einen Namen für das Vokabular und – wenn gewünscht – eine Beschreibung ein.

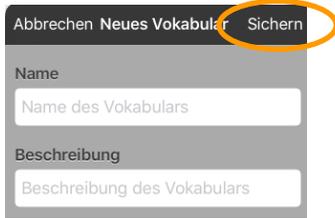

Abbrechen Neues Vokabular Sichern

Name  
Name des Vokabulars

Beschreibung  
Beschreibung des Vokabulars

Wählen Sie „Sichern“.

Das Vokabular wird erstellt.

## Vokabular umbenennen

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wischen Sie auf dem Vokabular, dessen Namen Sie ändern wollen, von rechts nach links.

Alternativ: Wählen Sie **Bearbeiten**.



Fertig	Bibliothek	Menü
	Quasselkiste	v1.0
	Quasselkiste Paul	v1.0

Tippen Sie auf das  Symbol neben dem Vokabular, welches Sie umbenennen möchten.



Fertig	Bibliothek	Menü
	Quasselkiste	v1.0
	v1.0	<b>Umbenennen</b> Löschen

Wählen Sie **Umbenennen** .

Geben Sie den neuen Namen ein.



Wählen Sie „Sichern“.  
Das Vokabular wird umbenannt.

## Vokabular löschen

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.  
Wischen Sie auf dem zu löschenden Vokabular von rechts nach links.

Alternativ: Wählen Sie **Bearbeiten**.



Tippen Sie auf das  Symbol neben dem Vokabular, das Sie löschen möchten.



Wählen Sie **Löschen** .  
Das Vokabular wird gelöscht.

## Vokabularsprache ändern

Jedem Vokabular ist eine Sprache zugewiesen. Die Sprache bestimmt die Wortvorhersage und die Beugungsregeln.

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wischen Sie auf dem Vokabular, dessen Sprache Sie ändern wollen, von rechts nach links.


Alternativ: Wählen Sie **Bearbeiten**.



Tippen Sie auf das Symbol neben dem Vokabular, dessen Sprache Sie ändern wollen.




Wählen Sie **Umbenennen**.

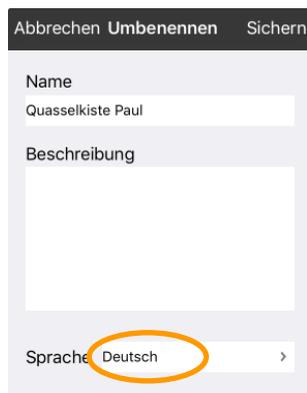

Tippen Sie auf das neben der aktuellen Sprache.



Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

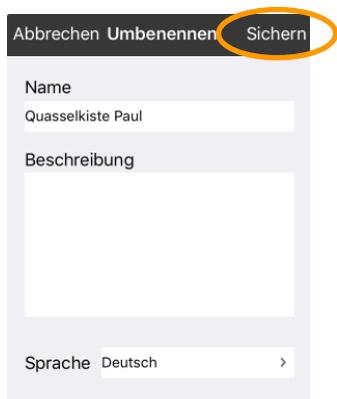


The screenshot shows a settings dialog box with a dark header bar containing three buttons: 'Abbrechen', 'Umbenennen', and 'Sichern'. The 'Sichern' button is highlighted with an orange circle. Below the header, there is a 'Name' field with the text 'Quasselkiste Paul', a 'Beschreibung' field which is empty, and a 'Sprache' dropdown menu currently set to 'Deutsch'.

Wählen Sie „Sichern“.  
Die Vokabularsprache wird geändert.

## Vokabular importieren/exportieren

Sie können Vokabulardateien importieren und exportieren.  
Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.  
Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren**.

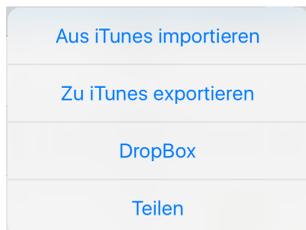

### iTunes


iTunes ist ein kostenloses Verwaltungsprogramm für Medien und Apps von Apple.

### Import aus iTunes


Verbinden Sie das iPad über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.

### In iTunes

Tippen Sie in iTunes auf das Tablet-Icon:

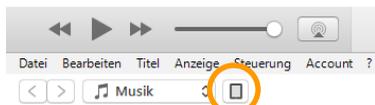

Wählen Sie den Bereich Apps:

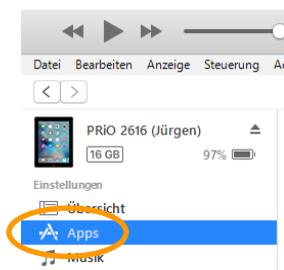


Scrollen Sie das Fenster nach unten, bis der Bereich „Freigabe“ sichtbar wird, und wählen Sie dort die App „Quasselkiste“:


## Freigabe

Mit folgenden Apps kannst du Dokumente zwischen dem iPad und diesem Computer übertragen.

### Apps

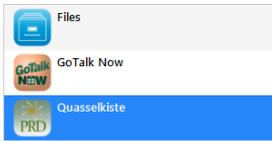

### Dokumente von „Quasselkiste“:

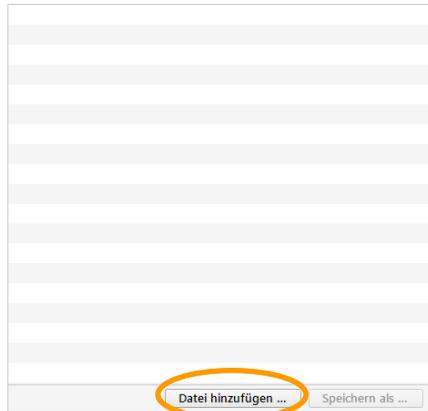


Wählen Sie „Datei hinzufügen“  
Wählen Sie die Vokabulardatei auf Ihrem Computer aus.  
Die Datei erscheint in der Liste:

## Freigabe

Mit folgenden Apps kannst du Dokumente zwischen dem iPad und diesem Computer übertragen.

### Apps

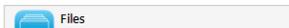

### Dokumente von „Quasselkiste“:



## In der Quasselkiste-App:

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren > Aus iTunes importieren**

Die in iTunes von der Quasselkiste freigegebenen Dateien werden angezeigt:



Wählen Sie die zu importierende Datei aus.  
Geben Sie den Namen ein, den die zu importierende Datei auf dem iPad haben soll. Fügen Sie – wenn gewünscht – eine Beschreibung hinzu.

Abbrechen Vokabular impo.. Sichern

Name  
Quasselkiste Paul

Beschreibung  
Beschreibung des Vokabulars

Version  
1.0

Name der Datei  
Quasselkiste Paul.wf

Wählen Sie „Sichern“, um den Import abzuschließen.

## Export zu iTunes

Verbinden Sie das iPad über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.

### In der App:

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren > Zu iTunes exportieren**

Die eigenen Vokabulare werden angezeigt:

Abbrechen Vokabular auswählen

Quasselkiste Paul

Wählen Sie die zu exportierende Datei aus.

Geben Sie den Namen ein, den die zu exportierende Datei in iTunes haben soll.

Abbrechen Vokabular expor.. Sichern


Name des Exports  
Quasselkiste Paul 2017-09

Name der Quelldatei  
Quasselkiste Paul


Wählen Sie „Sichern“, um den Export abzuschließen.

## In iTunes:

Tippen Sie in iTunes auf das Tablet-Icon:

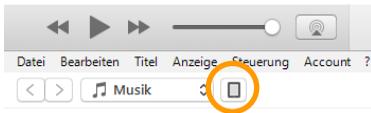

Wählen Sie den Bereich Apps:

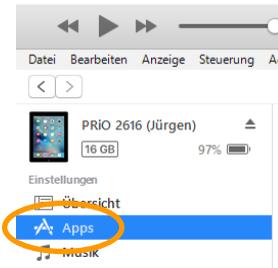


Scrollen Sie das Fenster nach unten, bis der Bereich „Freigabe“ sichtbar wird, und wählen Sie dort die App „Quasselkiste“:

Die vom iPad freigegebenen Dateien erscheinen in der Liste:

### Freigabe

Mit folgenden Apps kannst du Dokumente zwischen dem iPad und diesem Computer übertragen.

#### Apps

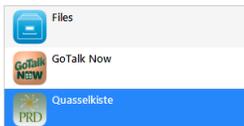

#### Dokumente von „Quasselkiste“:

<input type="checkbox"/>	Quasselkiste Paul 2017-09.wf	576 KB	Heute 12:00
<input type="checkbox"/>	Quasselkiste Paul.wf	7,6 MB	Gestern 11:05
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Markieren Sie eine Datei und wählen Sie „Speichern als...“, wenn Sie die Datei zur weiteren Verwendung aus iTunes auf Ihren PC exportieren möchten.

### Freigabe

Mit folgenden Apps kannst du Dokumente zwischen dem iPad und diesem Computer übertragen.

#### Apps



#### Dokumente von „Quasselkiste“:


<input checked="" type="checkbox"/>	Quasselkiste Paul 2017-09.wf	576 KB	Heute 12:00
<input type="checkbox"/>	Quasselkiste Paul.wf	7,6 MB	Gestern 11:05
		<input type="button" value="Datei hinzufügen ..."/>	
		<input type="button" value="Speichern als ..."/>	

## Import/Export aus Dropbox

Dropbox ist ein Cloudspeicherdienst, der in der kostenlosen Variante bis zu 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stellt. Die zugehörige App ist auf Ihrem PRiO vorinstalliert, Sie müssen sich nur noch anmelden.

Zur Nutzung von Dropbox muss das iPad mit dem Internet verbunden sein.

Öffnen Sie die Dropbox-App und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Sollten Sie noch kein Konto bei Dropbox haben, so erstellen Sie eines.

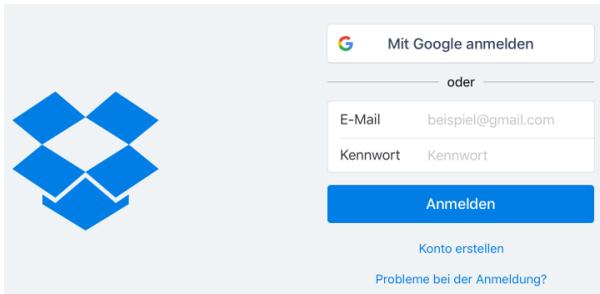

Bei der ersten Verbindung zu Ihrer Dropbox müssen Sie dem iPad die Rechte einräumen, auf Ihre Dropbox zuzugreifen.

## Import aus Dropbox

### In der Quasselkiste:

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren > Dropbox**.



Wählen Sie **Aus Dropbox importieren**.



Die in Ihrer Dropbox im Ordner *Apps > Quasselkiste* vorhandenen Dateien werden angezeigt:



Wählen Sie die zu importierende Datei aus.  
Geben Sie den Namen ein, den die zu importierende Datei auf dem iPad haben soll. Fügen Sie – wenn gewünscht – eine Beschreibung hinzu.



Wählen Sie „Sichern“, um den Import abzuschließen.

## Export in Dropbox

### In der Quasselkiste:

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.  
Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren > Dropbox**.  
Wählen Sie **In Dropbox exportieren**.

Die eigenen Vokabulare werden angezeigt:



Wählen Sie die zu exportierende Datei aus.  
Geben Sie den Namen ein, den die zu exportierende Datei in Dropbox haben soll. Der Name sollte eindeutig sein.



Wählen Sie „Sichern“, um den Export abzuschließen.

## Abmelden von Dropbox

Hiermit wird der Quasselkiste die Erlaubnis entzogen, auf den Ordner *Apps* in Ihrer Dropbox zuzugreifen.



Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.

Wählen Sie **Menü > Vokabular importieren/exportieren > Dropbox**.

Wählen Sie **Von Dropbox abmelden**.


Wollen Sie das nächste Mal aus der Quasselkiste eine Datei in die Dropbox kopieren oder aus ihr exportieren, müssen Sie der Quasselkiste dafür wieder die Erlaubnis erteilen.

## Import/Export mit AirDrop

AirDrop ist ein Apple-eigener Kommunikationsstandard für den Nahbereich für Geräte mit Apple-Betriebssystem ab iOS 7 / Mac OS 10.7.

Da der Dienst Bluetooth nutzt, müssen sich entsprechende Geräte im selben Raum befinden.

Stellen Sie sicher, dass AirDrop im Kontrollzentrum Ihres iPads aktiviert und dass das iPad für jeden sichtbar ist.

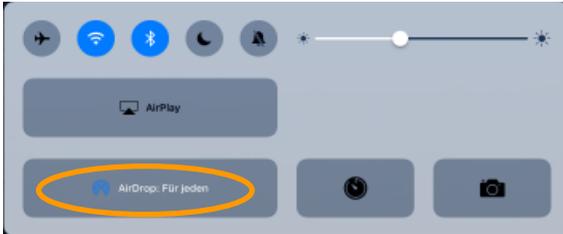

## Export mit AirDrop

### In der App:

Wählen Sie **Menü > Bibliothek**, um die Bibliothek zu öffnen.


Wählen Sie **Menü > Mit AirDrop teilen**.

Die eigenen Vokabulare werden angezeigt:



Wählen Sie die Datei aus.

Bearbeiten Sie ggf. den Namen, den die zu teilende Datei haben soll.

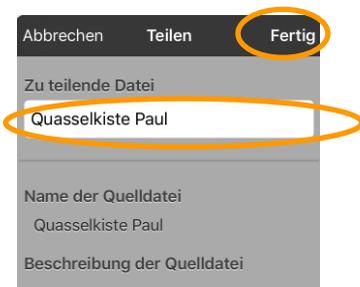

Wählen Sie „Fertig“, um das Teilen zu starten.

AirDrop-kompatible Geräte werden angezeigt.

Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie die Datei teilen möchten.

Das empfangende Gerät zeigt eine Meldung, dass eine Datei geteilt werden soll. Nach Bestätigung erfolgt die Annahme der Datei auf dem Gerät.

## Import mit AirDrop

Stellen Sie sicher, dass AirDrop auf Ihrem iPad aktiviert und dass Ihr iPad für jeden sichtbar ist.


Starten Sie den Vokabularexport auf dem Apple-Gerät, das das gewünschte Vokabular enthält (siehe vorige Seite). Sobald Ihr iPad als Empfänger ausgewählt wurde, erscheint ein Hinweisfenster. Wählen Sie „Annehmen“.




Wählen Sie die App aus, die die Datei verwenden soll: Quasselkiste. Haben Sie keine Dropbox eingerichtet, wird dieser Schritt übersprungen.



Bestätigen Sie der Quasselkiste, dass Sie das Vokabular importieren möchten:

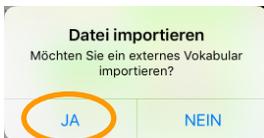

Geben Sie den Namen ein, den die zu importierende Datei haben soll.

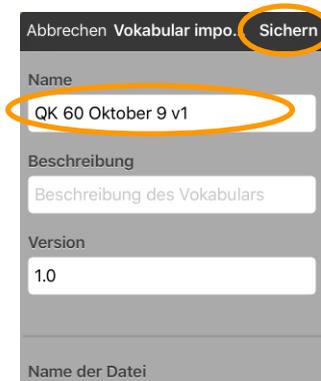


Wählen Sie „Sichern“, um den Import abzuschließen.

## Zusatzfunktionen installieren

Wählen Sie **Menü > Bibliothek > Menü > Upgrade-Store**, um den Shop zu besuchen und kostenpflichtiges Zubehör wie weitere Stimmen oder zusätzliche Symbolsammlungen zu installieren.

Wählen Sie die Option aus, die Sie erwerben möchten.  
Zum Erwerb benötigen Sie das Passwort des iTunes-Konto sowie eine gültige Zahlungsmethode.

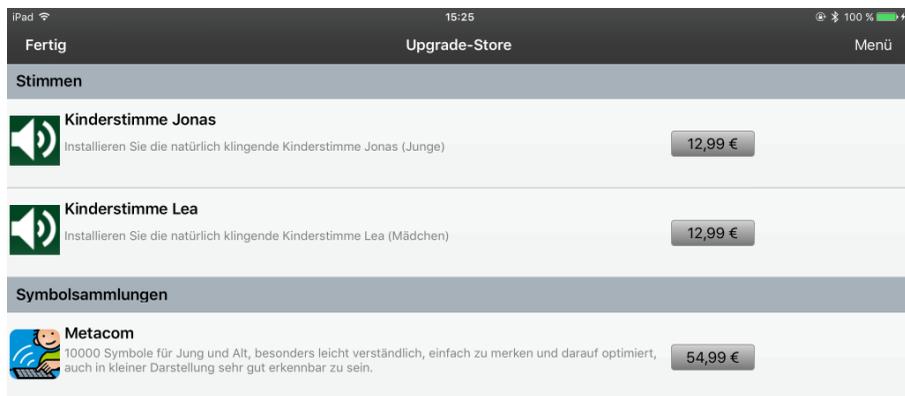

HILFE

Wählen Sie **Menü > Hilfe**, um das eingebaute Handbuch zu öffnen.

## **Supportseite besuchen**

Wählen Sie **Support-Seite besuchen**, um die Webseite des Herstellers zu öffnen.

Wählen Sie **Fertig**, um den Internetbrowser zu schließen und zur Hilfe zurückzukehren.

Hinweis: Die Nutzung der Option „Support-Seite besuchen“ erfordert einen Internetzugang.

## **Hilfe beenden**

Wählen Sie **Fertig**, um die Hilfe zu schließen und zur Quasselkiste zurückzukehren.

# INDEX

## A

Adverbien 28  
AKTIVE FUNKTIONEN 89  
Aktueller Benutzer 76  
Alle Ausspracheregeln löschen 96  
Alle Seiten schließen (Tastenfunktion) 60  
Alle Textbausteine löschen 100  
Alles sprechen 17  
Alles sprechen (Tastenfunktion) 60  
Allgemeine Informationen über die Quasselkiste 9  
Ansgenstimme 81  
Ansaage-Scanning 80  
Anzahl der Zeilen 73  
Anzeigeformat 70  
App/Anwendung öffnen (Tastenfunktion) 60  
Art des Scannings 81  
Artikel 33  
Artikel, bestimmte 33  
Artikel, unbestimmte 33  
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl (Tastenfunktion) 61  
Aufzeichnung löschen 75  
Auslösen anzeigen 76  
Aussprachelexikon 94  
Ausspracheregeln ändern 95  
Ausspracheregeln löschen 95  
Ausspracheregeln rücksetzen 95  
Autom. hochladen 76  
Automatische Großschreibung 73  
Auto-Restart 80  
Auto-Scan 80

## B

Batteriestatus (Tastenfunktion) 61  
Bearbeiten 58  
Beim Loslassen auslösen 76  
Beschreibung der Funktionstasten 17  
bestimmte Artikel 33  
Bibliothek 102  
Bild 55  
Bild auswählen 55  
Bild entfernen 56  
Bild importieren 56

Bildbibliothek 56  
Bilder suchen 56  
Bildung der Adjektive 26  
Bildung der Nomen 21  
Bildung der Verben 22

## C

Cursor bewegen (Tastenfunktion) 61  
Cursor platzieren (Tastenfunktion) 61  
Cursor platzieren erlaubt 73  
Cursor-Modus (Tastenfunktion) 61

## D

Datum ausgeben (Tastenfunktion) 64  
Die Kategorien (Wortfelder) 19  
Die Oberfläche der App 14  
Die Seite KALENDER 37  
Die Seite UHR 37  
Die Seiten KALENDER und UHR 37  
Die Startseite 14  
Die Taste TALKER 35  
Die Taste ZAUBERER 36  
Display löschen (Tastenfunktion) 61  
Dynamische Labels 77

## E

Einstellungen 70  
Export in Dropbox 112, 113  
Export mit AirDrop 114  
Export zu iTunes 109

## F

Feedback 70  
Fertig 59  
Fett 56  
Fragewörter 32  
Funktion löschen 59  
Funktionstasten 17

## G

Geschwindigkeit 72

Gesprochenes Wort hervorheben 73  
Gesuchtes Wort in der Quasselkiste  
abrufen 68  
Gitter benutzen 71  
Grammatiktasten 16

## H

Handbuch (intern) 118  
heruntergeladene Stimme löschen 71  
Hervorhebungsfarbe Telefon/Factime  
74  
Hilfe 118  
Hilfe beenden 118  
Hilfesignal (Tastenfunktion) 61  
Hintergrundfarbe 58, 73, 76  
Hinweise 2  
Hinzufügen 59  
Höhe Ansagenstimme 81

## I

Imperativ 24  
Import aus Dropbox 111  
Import aus iTunes 107  
Import mit AirDrop 115  
In-App-Käufe 116  
Inhaltsverzeichnis 3  
Internetadresse öffnen (Tastenfunktion)  
61

## K

Kamera 56  
Konjunktionen 29  
Kopie der mitgelieferten Quasselkiste  
anfertigen 11  
Kopieren und Einfügen erlauben 72  
Kursiv 56

## L

Label 55  
Label oben 56  
Label sprechen (Tastenfunktion) 61  
Lauter (Tastenfunktion) 61  
Leere Felder überspringen 81  
Leiser (Tastenfunktion) 61

Letzte Ausgabe wiederholen  
(Tastenfunktion) 61  
Letzten Satz sprechen (Tastenfunktion)  
61  
Letztes Wort sprechen (Tastenfunktion)  
61  
Liste anlegen 90  
Liste löschen 92  
Liste verwenden 90  
Listen verwenden 90  
Lösche Zeichen (Tastenfunktion) 61  
Loslassdauer 76

## M

Menü mit Passwort entsperren 71  
Menü Wortsuche 66  
Menüleiste 14  
Menüsperre 71  
Mitteilung 55  
Mitteilung anzeigen (Tastenfunktion)  
61  
Mitteilung ausgeben (Tastenfunktion)  
61  
Mitteilung sprechen 55

## N

Nächstes Wort abwandeln  
(Tastenfunktion) 62  
Neue Seite erzeugen 48  
Neues Vokabular erstellen 103

## O

Optionen beim Gestalten einer Taste  
55

## P

Partizip Perfekt 23  
Passwort Menüsperre 71  
Personalpronomen 30  
Possessivpronomen 30  
Präpositionen 29  
Privatsphärenpasswort 75  
Privatsphärenpasswort ändern 75  
Privatsphärenpasswort löschen 75

Profil laden 70  
Profil speichern 70  
Profil wählen (Tastenfunktion) 62  
Profile 70  
Pronomen 30  
Pronomen, deklinierbare 31  
Pronomen, sonstige 31

## R

Rahmenbreite 58  
Rahmenfarbe 58  
Raster anzeigen 77  
RealizeLanguage einrichten 75  
Rechner (Tastenfunktion) 62  
Reihenfolge ändern 59

## S

Satz sprechen 74  
Scangeschwindigkeit 81  
Scanning 80  
Scanning aktivieren 80  
Scanning stoppen (Tastenfunktion) 62  
Schriftart 57, 73  
Schriftfarbe 58  
Schriftgröße 57  
Seite anzeigen (Tastenfunktion) 62  
Seite bearbeiten 40  
Seite bearbeiten beenden 54  
Seite importiere/kopieren 53  
Seite importieren 53  
Seite kopieren 53  
Seite löschen 50  
Seite zurück (Tastenfunktion) 62  
Seitenlayout bearbeiten 51  
Sichtbar 57  
Sichtbarer Cursor 73  
SMS – Seite Unterhaltungen anzeigen (Tastenfunktion) 62  
Soziale Netzwerke erlauben 78  
Sprachdaten aufzeichnen 75  
Sprachdatenaufzeichnung 74  
Sprachdatenaufzeichnung ein/aus (Tastenfunktion) 62  
Sprache 71  
Sprache anhalten/fortsetzen (Tastenfunktion) 62  
Sprache aufnehmen (Tastenfunktion) 62

Sprache ein/aus (Tastenfunktion) 62  
Sprache wiedergeben (Tastenfunktion) 63  
Sprechen 74  
Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme 81  
Springe zu Seite (Tastenfunktion) 63  
Standard-Themenleiste, weitere Funktionen 18  
Startseite anzeigen (Tastenfunktion) 63  
Statusleiste 70  
Steigerungsformen 27  
Stimme 71, 72  
Stimmhöhe 72  
Stopp (Tastenfunktion) 63  
Supportseite besuchen 118  
Symbol 55  
Systemtastatur (Tastenfunktion) 63

## T

Taste bearbeiten 41  
Taste bearbeiten beenden 41  
Taste entfernen 43  
Taste kopieren 44  
Taste mit Funktion Wort suchen belegen 67  
Taste-Halten-Scanning 80  
Tasten 76  
Tasten anordnen 42  
Tasten konfigurieren 80  
Tasten verschieben 42  
Tastenfunktion 58  
Tastenfunktionen (Übersicht) 60  
Tastenklick 70  
Tastenlayout einfügen 47  
Tastenlayout kopieren 46  
Tastenrandgröße 77  
Textfenster scannen 81  
Textbaustein bearbeiten 99  
Textbaustein hinzufügen 98  
Textbaustein löschen 99  
Textbausteine 98  
Textbausteine rücksetzen auf Werkeinstellungen 100  
Textfenster 14, 72  
Textfenster automatisch löschen 74  
Textfenster speichern (Tastenfunktion) 63  
Textfenster verbergen 72

Textfenster-Aktion 73  
Textfenster-Text einfügen  
(Tastenfunktion) 63  
Textfenster-Text kopieren  
(Tastenfunktion) 63  
Textfenster-Text teilen (Tastenfunktion)  
63  
Themenleiste 15  
Transparent 57

## U

unbestimmte Artikel 33  
Upgrade-Store 116  
uchten 79  
Verstärker-Firmwareupdate 80  
Verweildauer 76  
Vokabular auswählen 85  
Vokabular importieren/exportieren 107  
Vokabular kopieren 102  
Vokabular löschen 104  
Vokabular umbenennen 103  
Vokabularauswahl anpassen 86  
Vokabularmanagement 84  
Vokabularmanagement ein/auszuschalten  
85  
Vokabularsprache ändern 105  
Vokabularvorgaben 52

## W

Weitere Funktionen der Standard-  
Themenleiste anzeigen 18  
Zahl der Durchläufe 81  
Zahlwörter 34  
Zeichen sprechen 74  
Zeichenvorhersage (Tastenfunktion) 64  
Zeit ausgeben (Tastenfunktion) 64

## V

Verbphrasen 25  
Vergangenheit 23  
Verhindere Unterbrechung 74  
Verstärker 79  
Verstärker auswählen 79  
Verstärker einri

Weitere Seite bearbeiten 51  
Wort abwandeln (Tastenfunktion) 63  
Wort hinzufügen 94  
Wort löschen (Tastenfunktion) 63  
Wort löschen /Alles löschen 17  
Wort sprechen 74  
Wortart zuweisen (Tastenfunktion) 63  
Wortfeldtasten 16  
Wortform zurücksetzen (Tastenfunktion)  
63  
Wortsuche (Tastenfunktion) 63  
Wortsuche auf Taste legen 67  
Wortsuche, Menü 66  
Wortvorhersage (Tastenfunktion) 63

## Z

Zeit und Datum ausgeben  
(Tastenfunktion) 64  
Zeit/Datum ausgeben (Tastenfunktion)  
64  
Zurück-Taste verbergen 70  
Zusatzfunktionen installieren 116



Prentke Romich Deutschland  
Unterstützte Kommunikation

**Prentke Romich GmbH**

Karthäuserstr. 3  
D-34117 Kassel  
Tel. (0561) 78559-0  
Fax (0561) 78559-29  
E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)  
Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)