



Einführung in das

LoGoFoXX 24

Wortschatzprogramm

V 1.0



Prentke Romich Deutschland
Unterstützte Kommunikation

Hinweise

LoGoFoXX ist ein Warenzeichen der Prentke Romich GmbH.

NovaChat ist ein Warenzeichen der Saltillo Corporation.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

Weitere hier verwendete Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Chat-Editor-CD

Chat-Editor ist Eigentum der Saltillo Corporation.

„Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.

Saltillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des NovaChat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat-Gerät verwendet wird.

LoGoFoXX 24

LoGoFoXX 24 © Prentke Romich GmbH 2015

LoGoFoXX 24 wurde entwickelt von Birgit Gröber und Benjamin Musketa

LoGoFoXX 24 - Aufbau und Individualisierung geschrieben von Jürgen Babst

Version 1.0 • Oktober 2015

© Prentke Romich GmbH 2015

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieser Anleitung sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des Vokabulars LoGoFoXX 24 oder der hier gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung von LoGoFoXX 24 oder der hier gemachten Angaben ergeben.



Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31

D - 34119 Kassel

Tel. (05 61) 7 85 59-0

Fax (05 61) 7 85 59-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	3
LoGoFoXX 24	6
Die Startseite (Homepage)	7
Aufbau des Vokabulars	8
Themenseiten	10
Plaudern	11
Schule	12
Stundenplan	12
Räume	13
Wochentage	13
Fragen	14
Natur	15
Wetter	15
Garten	16
Jahreszeiten	16
Erzählen	17
Step by Step	17
Erzählbuch	18
Erzählbilder	19
Aufnahmen	20
über mich	21
Leute	22
Familie	22
Klasse	23
Freunde	23
Favoriten	24
Orte	24
Feste	25
Aktion	26
Kleine Wörter	26
Entdecke die Kraft der Sprache	27
Gefühle	28
Basteln	29
Farben	29
Fahrzeuge	30
Fahrzeuge 2	30
Essen	31
Obst & Gemüse	31
Mittagessen	32
Frühstück	32
Süßes	33
Trinken	34
Tiere	35
Haustiere	35
Zootiere	36
Bauernhof	36
Meerestiere	37
Musik	38
Lieder	38
Instrumente	39

CDs	39
Spielen	40
Spielzeug	40
Lesen	41
Draußen	41
WORTLISTEN	42
Wortliste – alphabetische Sortierung	43
Wortliste – Sortierung nach Wortart	51
Adjektive	51
Adverbien	52
Floskeln	52
Fragen	52
Konjunktionen	53
Nomen	53
Phrasen	56
Präpositionen	57
Pronomen	57
Sätze	58
Verben	58
Wortliste – Sortierung nach Seite	60

LoGoFoXX 24

LoGoFoXX 24 ist ein auf 24 Feldern basierendes Vokabular für die NovaChat-Geräte, eine Gruppe von mobilen und äußerst leichten Kommunikationshilfen der Firma Saltillo.

LoGoFoXX 24 bietet einen ausgewählten Grundwortschatz der deutschen Sprache von über 300 Wörtern, Phrasen und Sätzen, der es Benutzern von NovaChat-Geräten ermöglicht, grundlegende Bedürfnisse zu übermitteln und einfache Aussagen mit den Wörtern aus verschiedenen Themenbereichen zu kombinieren. Im Fokus der Entwicklung standen dabei Benutzer, deren Kommunikationsbedürfnis und Symbolverständnis so weit entwickelt sind, dass einfache Kommunikationshilfen mit statischer Oberfläche keine adäquate Unterstützung mehr bieten können. Auf den größeren NovaChat-Geräten bietet LoGoFoXX 24 Menschen mit eingeschränkten motorischen und/oder visuellen Fähigkeiten Zugang zu erfolgreicher unterstützter Kommunikation.


Zur Nutzung von LoGoFoXX 24 muss die METACOM-Symbolbibliothek auf dem NovaChat-Gerät freigeschaltet sein.

Wenn Sie LoGoFoXX 24 mit dem Chat-Editor nutzen wollen, gehen Sie so vor:

1. Öffnen Sie das Menü Bibliothek.
2. Wählen Sie *Vorgespeicherte Vokabulare – LoGoFoXX-Vokabulare – LoGoFoXX 24*.
3. Wählen Sie „Duplizieren“.
4. Wählen Sie einen eindeutigen Namen für das Vokabular (z.B. in dem Sie den Namen des Benutzers anhängen).

Nun haben Sie eine individualisierbare Kopie des Vokabulars, die Sie nach Belieben verändern können.

Die Startseite (Homepage)

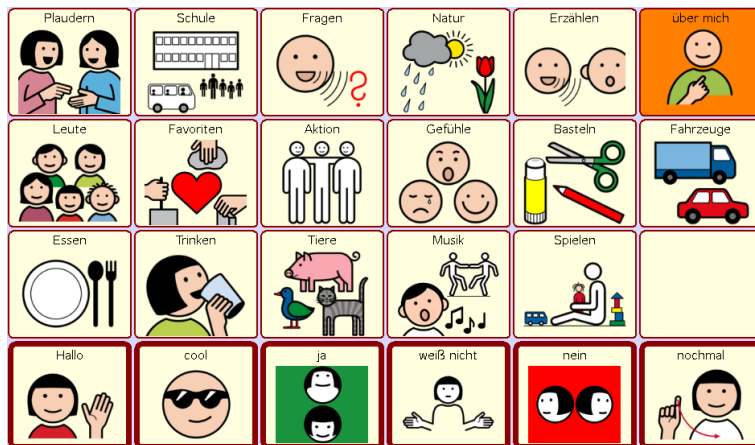

Die Startseite von LoGoFoXX 24 bietet Zugang zu 17 Themenfeldern sowie in der unteren Zeile 6 mit den Aussagen „Hallo“, „cool“, „ja“, „Ich weiß nicht“, „nein“ und „nochmal“ belegte Tasten. In den meisten der 17 Themenfelder befinden sich ausgewählte Wörter verschiedener Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive, kleine Wörter) zum jeweiligen Thema. Mit Hilfe der angebotenen Wörter ist es möglich, einfache Ein- und Mehrwortäußerungen zu tätigen. Umfangreiche Themenfelder verfügen über Tasten zum Anzeigen weiterer Wortfelder.

Die Themenfelder sind:


Themenfeld	Untertemenfeld 1	Untertemenfeld 2	Untertemenfeld 3	Untertemenfeld 4
Plaudern				
Schule	Stundenplan	Räume	Wochentage	
Fragen				
Natur	Wetter	Garten	Jahreszeiten	
Erzählen	Steb by Step	Erzählbuch	Erzählbilder	Aufnahmen
über mich	Familie	Klasse	Freunde	
Leute	Familie	Klasse	Freunde	
Favoriten	Orte	Feste		
Aktion	Entdecke die Kraft der Sprache	kleine Wörter		
Gefühle				
Basteln	Farben			
Fahrzeuge	Fahrzeuge 2			
Essen	Obst & Gemüse	Mittagessen	Frühstück	Süßes
Trinken				
Tiere	Haustiere	Zootiere	Bauernhof	Meerestiere
Musik	Lieder	Instrumente	CDs	
Spielen	Spielzeug	Lesen	Draußen	Fahrzeuge

Aufbau des Vokabulars


Die Auswahl eines Themenfeldes erfolgt auf der Startseite. Die Themenfeldseiten verfügen über eine wiedererkennbare Struktur

blaue Tasten öffnen Unterthemenseiten

Zeile 1: Die Phrase „ich möchte“ und ggf. Zugang zu Unterthemenseiten

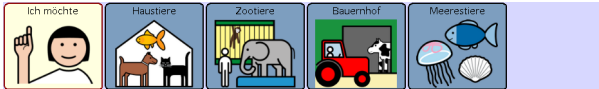

Zeile 2: das Wort „nicht“, Verben, Adjektive

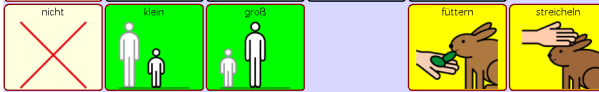


Zeilen 3 und 4: Kleine Wörter, ggf. weitere Adjektive oder Verben




Rücksprung zur Startseite

In den meisten Wortfeldern befindet sich links oben das Feld „ich möchte“  und

darunter das Feld „nicht“ . Damit können schnell Bedürfnisse formuliert werden.

Verfügt das Wortfeld über Unterthemen, so sind die Tasten zum Anzeigen der Unterthemen grundsätzlich in der obersten Zeile. Alle Unterthemenseiten sind blau hinterlegt

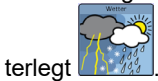

Wichtige Wortarten wie Verben und Adjektive sind an ihrer Farbe zu erkennen. Verben sind grundsätzlich gelb und Adjektive grün hinterlegt.



Die Taste „Home“ unten rechts auf den Themenseiten ermöglicht den Rücksprung auf die Startseite.

Die meisten Seiten enthalten freie Felder, auf denen weitere Aussagen gespeichert werden können.

Die Unterthemenfeldseiten enthalten in der Regel die Nomen aus dem jeweiligen Themenfeld und sind folgendermaßen aufgebaut:

Zeile 1:
Wörter aus dem
Unterthemenfeld



Zeile 2:
Wörter aus dem
Unterthemenfeld



Zeile 3:
Wörter aus dem
Unterthemenfeld












Rück-
sprung
zur
Themen-
seite




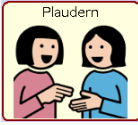

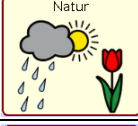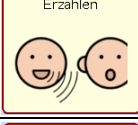



Die Taste „zurück“ ermöglicht den Rücksprung auf die jeweilige Themenseite.

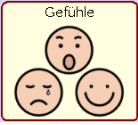Themenseiten

Nomen und themenspezifische Wörter werden auf 17 Themenseiten angeboten.

Plaudern, Bedürfnisse	<p>Plaudern</p> 
Schule, Stundenplan, Räume, Wochentage	<p>Schule</p> 
Fragen	<p>Fragen</p> 
Natur, Wetter, Garten, Jahreszeiten	<p>Natur</p> 
Erzählen, Steb by Step, Erzählbuch, Erzählbilder, Aufnehmen	<p>Erzählen</p> 
über mich	<p>über mich</p> 
Leute, Familie, Klasse, Freunde	<p>Leute</p> 
Favoriten, Orte, Feste	<p>Favoriten</p> 
Aktion, Entdecke die Kraft der Sprache, kleine Wörter	<p>Aktion</p> 

Gefühle	<p>Gefühle</p> 
Basteln, Farben	<p>Basteln</p> 
Fahrzeuge	<p>Fahrzeuge</p> 
Essen, Obst & Gemüse, Mittagessen, Frühstück, Süßes	<p>Essen</p> 
Trinken	<p>Trinken</p> 
Tiere, Haustiere, Zootiere, Bauernhof, Meerestiere	<p>Tiere</p> 
Musik, Lieder, Instrumente, CDs	<p>Musik</p> 
Spielen, Spielzeug, Lesen, Draußen, Fahrzeuge	<p>Spielen</p> 

Plaudern



Die Seite „Plaudern“ enthält folgende Mitteilungen:

Redeteilchen: Hallo, Tschüss, ja, nein, bitte, danke

Phrasen: Lass das!, Gib mir fünf, Herzlichen Glückwunsch!

Sätze: Ich mag das nicht, Ich habe Hunger., Ich habe Durst., Ich muss mal zur Toilette., Ich brauche eine Pause., Ich brauche Hilfe., Ich weiß nicht


Nomen: Quatsch

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: doch

Schule

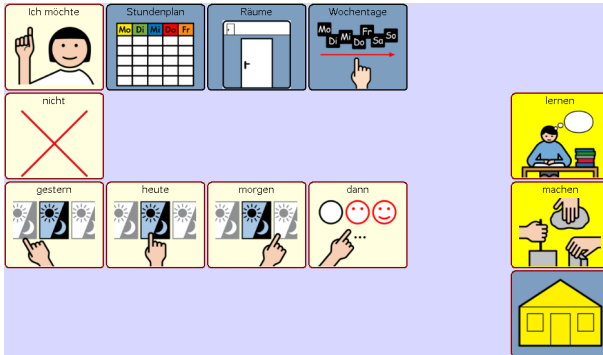

Die Seite „Schule“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -


Verben: lernen, arbeiten

Adjektive: -

Kleine Wörter: nicht, gestern, heute, morgen, dann

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Stundenplan“, „Räume“ und „Wochentage“ zu wechseln.

Stundenplan

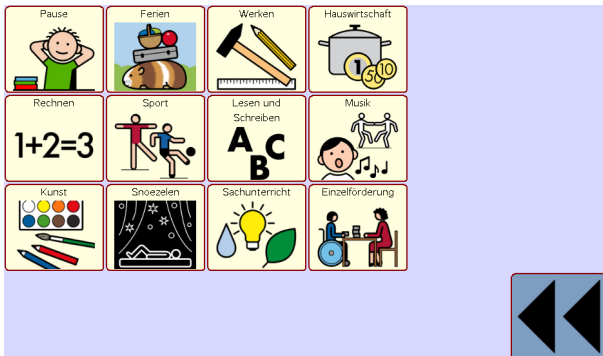

Die Seite „Stundenplan“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Pause, Ferien, Werken, Hauswirtschaft, Rechnen, Sport, Lesen und Schreiben, Musik, Kunst, Snoezelen, Sachunterricht, Einzelförderung

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Räume

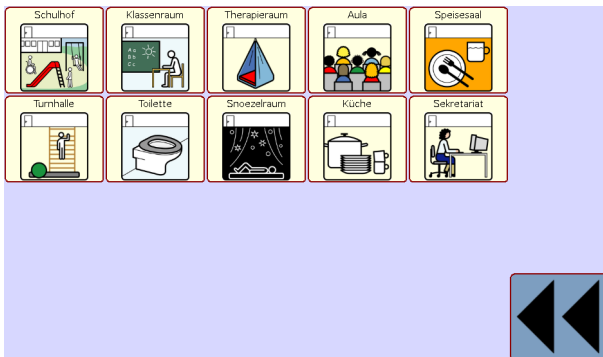

Die Seite „Räume“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Schulhof, Klassenraum, Therapieraum, Aula, Speisesaal, Turnhalle, Toilette, Snoezelraum., Küche, Sekretariat

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Wochentage

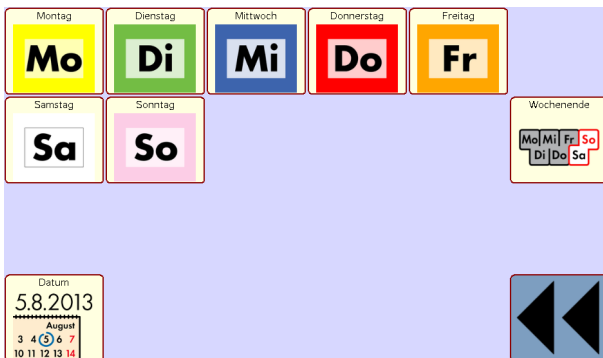

Die Seite „Wochentage“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Sonstige: Die Taste „Datum“ erzeugt einen Satz mit Datum und Uhrzeit in der Form „Es ist der 28. September 2015, 08:30.“ im Textfenster.

Fragen



Die Seite „Fragen“ enthält folgende Mitteilungen:

Fragen: Möchtest du?, Läuft bei dir?, Was ist das?, Wer bist du?, Wie geht's?, Darf ich auch? Was machst du?

Fragewörter: Warum?, Wann? , Wo?


Nomen: -

Adjektive: -

Adverbien: -

Präpositionen: -

Natur

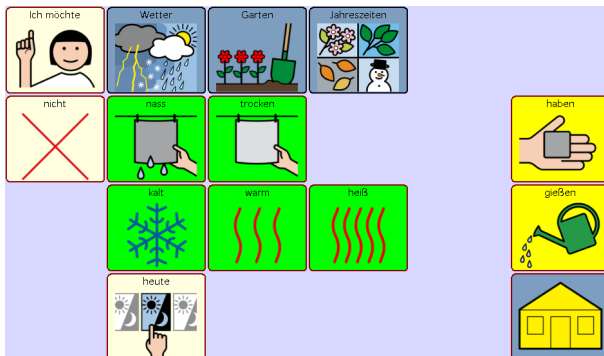

Die Seite „Natur“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -


Verben: haben, gießen

Adjektive: nass, trocken, kalt, warm, heiß

Kleine Wörter: heute

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Wetter“, „Garten“ und „Jahreszeiten“ zu wechseln.

Wetter

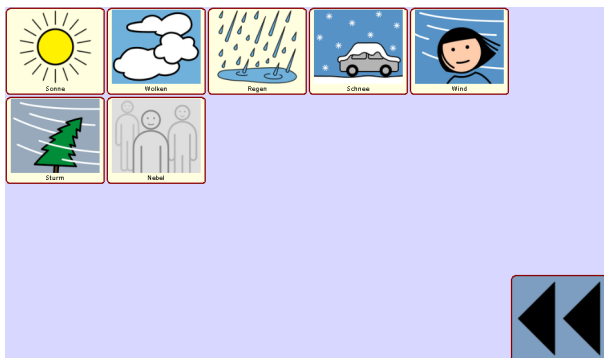

Die Seite „Wetter“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Sonne, Wolken, Regen, Schnee, Wind, Sturm, Nebel

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Garten

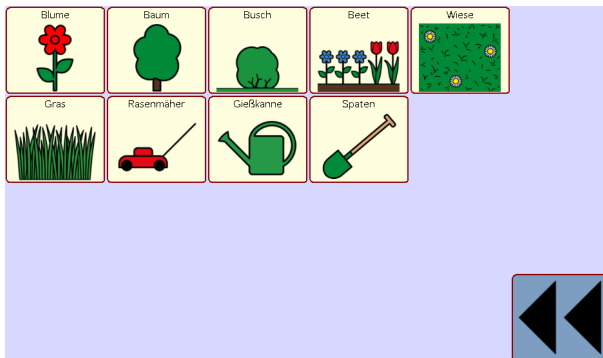

Die Seite „Garten“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Blume, Baum, Busch, Beet, Wiese, Gras, Rasenmäher, Gießkanne, Spaten

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Jahreszeiten



Die Seite „Jahreszeiten“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Frühling, Sommer, Herbst, Winter


Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Erzählen

Die Seite „Erzählen“ dient u.a. dem Austausch von Mitteilungen zwischen zu Hause und Schule und umgekehrt. Außerdem gibt es einen virtuellen „Step by Step“, ein Erzählbuch und Erzählbilder.

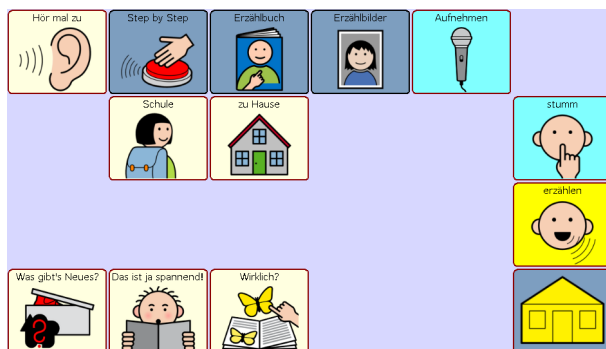

Die Seite „Erzählen“ enthält folgende Mitteilungen:
Phrasen: Hör mal zu, Was gibt's Neues?, Das ist ja spannend!, Wirklich?


Nomen: -

Verben: erzählen

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Digitale Mitteilungen: Schule, zu Hause, Step by Step


Die Taste „stumm“  bricht die Wiedergabe einer laufenden Mitteilung ab.


Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Step by Step“, „Erzählbuch“, „Erzählbilder“ und „Aufnehmen“ zu wechseln.

Step by Step

Ein Step-by-Step-Communicator ist eine sprechende Taste, die die aufgenommenen Mitteilungen nacheinander auf Tastendruck wiedergibt. LoGoFoXX 24 enthält einen virtuellen „Step by Step“ für 5 Aussagen. Die 5 Aussagen sind rot, orange, gelb, grün und blau farbkodiert und werden bei der Wiedergabe der Reihe nach durchlaufen.

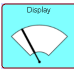

Die Taste  löscht das Display und setzt die Wiedergabe auf Aussage 1 (rot) zurück.

Die Taste  bringt den Benutzer zurück auf die Seite „Erzählen“.

Erzählbuch

Die Seite „Erzählbuch“ bietet Raum für jeweils zwei aktuelle Mitteilungen aus den vier Bereichen

- Aktivitäten
- zu Hause
- Schule
- Urlaub/Ausflug

Weiterhin enthält die Seite „Erzählen“ folgende Mitteilungen:


Phrasen: Ich möchte, das war

Nomen: -

Verben: machen, erzählen


Adjektive: cool, langweilig, lecker


Kleine Wörter: nicht, nochmal

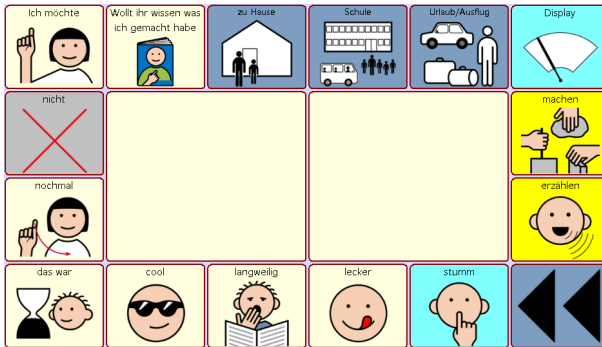

Wählen Sie einen der vier Bereiche aus. Das nicht blau hinterlegte Feld in der obersten Zeile zeigt den gewählten Bereich. Die beiden großen Tasten können jeweils mit einer Aussage und einem passendem Bild belegt werden.


Die Taste „stumm“  bricht die Wiedergabe einer laufenden Mitteilung ab.

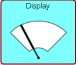
Die Taste  löscht das Display.


Die Taste  bringt den Benutzer zurück auf die Seite „Erzählen“.


Erzählbilder

Der Bereich „Erzählbilder“ enthält beispielhaft eine bebilderte Anleitung zur Herstellung eines Smoothies. Die Bilder sind je mit einem hochauflösenden Raster (8x12 Felder) hinterlegt, so dass zu einzelnen Bilderdetails individuelle Mitteilungen abgespeichert werden können. Durch die Anleitung wird mit der Taste „weiter“ → geblättert.

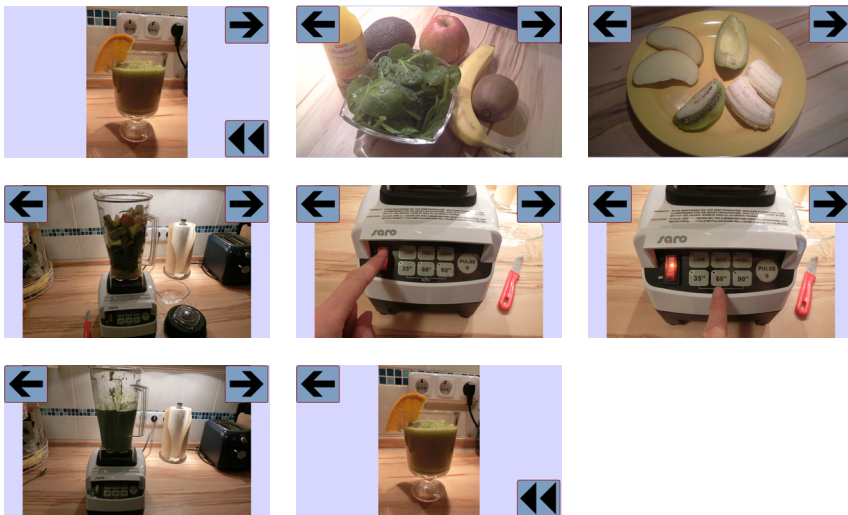


Die Taste  springt zur nächsten Seite.

Die Taste  springt zurück auf die vorige Seite.

Die Taste  bringt den Benutzer zurück auf die Seite „Erzählen“.

Aufnahmen

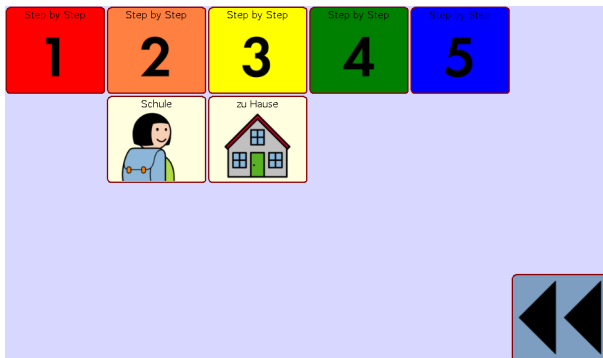


Die Seite „Aufnahmen“ dient zum Aktualisieren der vorhandenen digitalen Aufnahmen für den virtuellen „Step by Step“ sowie die Mitteilungstasten „Schule“ und „zu Hause“.

1. Wählen Sie die neu zu besprechende Aussage aus. Der NovaChat öffnet die Aufnahme-Seite.
2. Drücken Sie die Taste „Aufnahme“ und beginnen Sie mit dem Sprechen der Mitteilung.
3. Drücken Sie die Taste „Stopp“, sobald Sie die Mitteilung zu Ende gesprochen haben.
4. Drücken Sie die Taste „Abspielen“, um die Aufnahme abzuhören.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2. - 4., wenn Ihnen die Qualität der Aufnahme nicht gefällt.
6. Drücken Sie die Taste „OK“, um die Neuaufnahme zu beenden.
7. Die neue Mitteilung steht auf der Seite „Erzählen“ unter der zugehörigen Taste zur Verfügung.

über mich


Name  Name	Alter 7	Adresse 
Ich mag ... 		
Ich mag nicht ... 		



Die Seite „über mich“ enthält folgende Mitteilungen zur Vorstellung der eigenen Person:

- Ich heiße...
- Ich bin...Jahre alt
- Ich wohne in...
- Ich mag...
- Ich mag nicht...

Leute

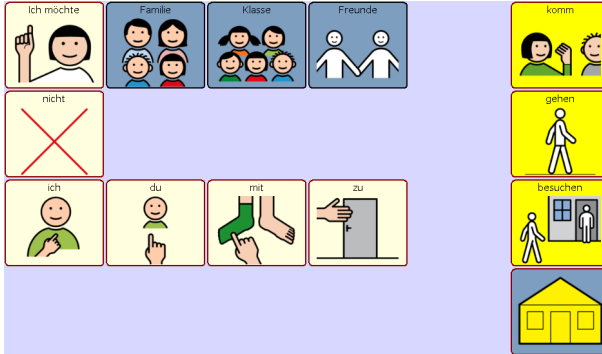

Die Seite „Leute“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -


Verben: komm, gehen, besuchen

Adjektive: nass, trocken, kalt, warm, heiß

Kleine Wörter: nicht, ich, du, mit, zu

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Familie“, „Klasse“ und „Freunde“ zu wechseln.

Familie

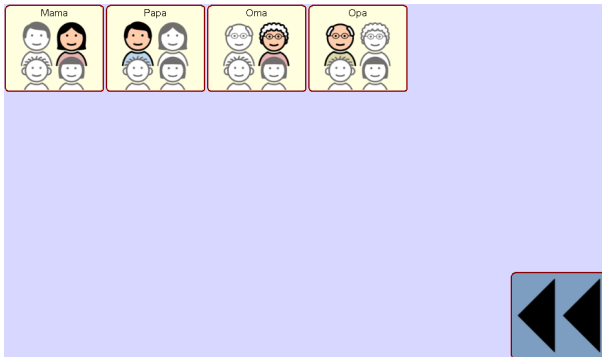

Die Seite „Familie“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Mama, Papa, Oma, Opa

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Klasse



Die Seite „Klasse“ ist für die Namen der Klassenkameraden vorbereitet.

Freunde



Die Seite „Freunde“ ist für die Namen der Freunde vorbereitet.

Favoriten



Die Seite „Favoriten“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -


Verben: gehen, fahren, reiten, feiern, schlafen, chillen, einkaufen, schwimmen, spazieren, fernsehen

Adjektive: -

Kleine Wörter: nicht

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Orte“ und „Feste“ zu wechseln.

Orte

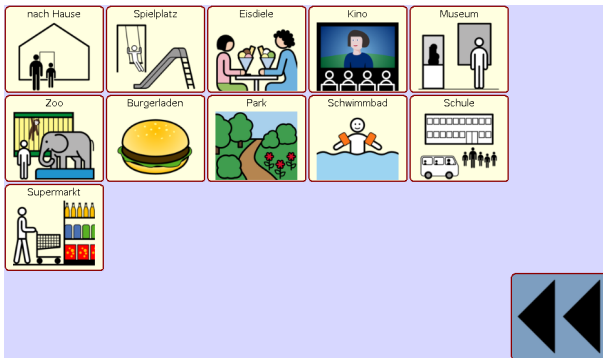

Die Seite „Orte“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: nach Hause

Nomen: Spielplatz, Eisdiele, Kino, Museum, Zoo, Burgerladen, Park, Schwimmbad, Schule, Supermarkt

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Feste



Die Seite „Feste“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Ostern, Weihnachten, Geburtstag, Fasching

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Aktion

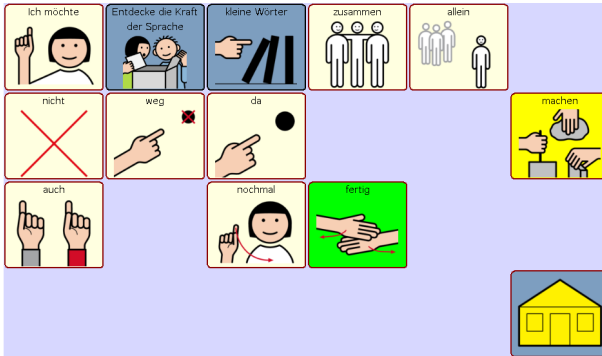

Die Seite „Aktion“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -


Verben: machen

Adjektive: fertig

Kleine Wörter: zusammen, allein, nicht, weg, da, auch, nochmal

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seite „kleine Wörter“ zu wechseln und die Ideensammlung „Entdecke die Kraft der Sprache“ zu öffnen.

Kleine Wörter

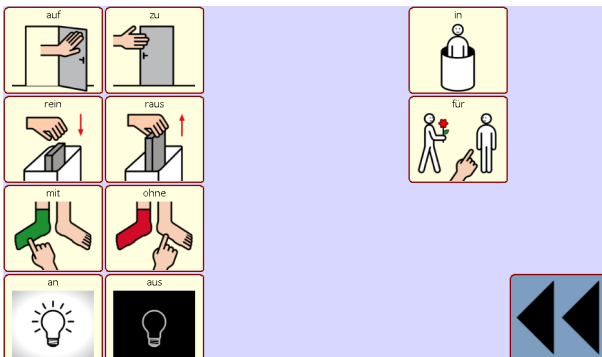

Die Seite „kleine Wörter“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: -

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: auf, zu, rein, raus, mit, ohne, an, aus, in, für

Entdecke die Kraft der Sprache



Entdecke die Kraft der Sprache ist ein Wegweiser, der aus grundsätzlichen Aspekten der Kommunikationsförderung konkrete Vorschläge ableitet, wie Sie den NovaChat einsetzen können, um die kommunikative Entwicklung systematisch zu unterstützen. Er besteht aus folgenden Teilen:


1. Darstellung von ausgewählten Aspekten der Kommunikationsförderung in Tabellenform
2. Praktische Beispiele für den Einsatz des NovaChats zu den oben genannten Aspekten

Über die Startseite von „Entdecke die Kraft der Sprache“ haben Sie Zugang zu folgenden 21 Übungen:

- Geräusche wahrnehmen
- Handlungen bewirken
- Bild malen
- ich-Information
- Erlebnis berichten
- persönliche Fragen stellen
- Situationsgebunden fragen und kommentieren
- Luftballon-Spiele
- Startzeichen geben
- Amt übernehmen
- Rollenspiel Einkaufen
- Rollenspiel Einkaufen (2)
- Bücher lesen
- ich & du
- Rezept vorlesen
- Ratespiele
- Ratespiele(2)
- Tischspruch ergänzen
- Bücher anschauen
- Obstsorten probieren
- soziale Umgangsformen

Aufbau und Nutzung von Entdecke die Kraft der Sprache ist in einem separatem Handbuch erläutert.

Gefühle

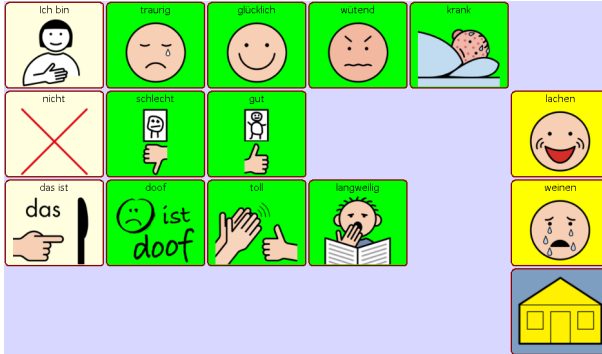

Die Seite „Gefühle“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: Ich bin, das ist


Nomen: -

Verben: lachen, weinen

Adjektive: traurig, glücklich, wütend, krank, schlecht, gut, doof, toll, langweilig

Kleine Wörter: nicht

Basteln

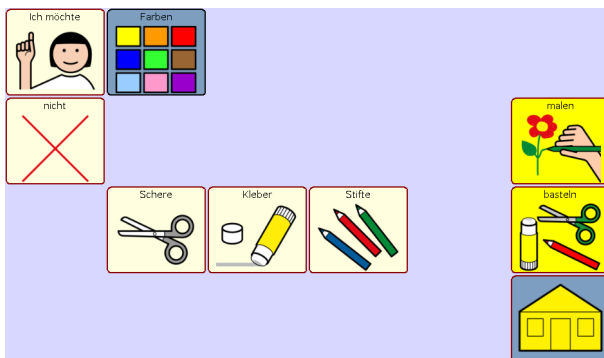

Die Seite „Basteln“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: Schere, Kleber, Stifte

Verben: malen, basteln

Adjektive: -

Kleine Wörter: nicht

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seite „Farben“ zu wechseln.

Farben



Die Seite „Farben“ enthält folgende Mitteilungen:


Nomen: -

Verben: -

Adjektive: blau, gelb, rot, grün, orange, lila, schwarz, pink, weiß, braun, grau

Kleine Wörter: -

Fahrzeuge

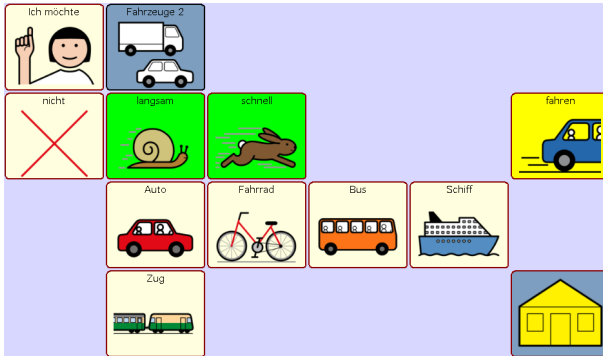

Die Seite „Fahrzeuge“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: Auto, Fahrrad, Bus, Schiff, Zug


Verben: fahren

Adjektive: -

Kleine Wörter: nicht

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seite „Fahrzeuge 2“ zu wechseln.

Fahrzeuge 2

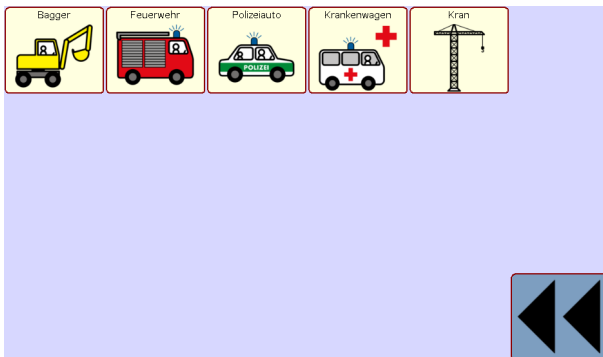

Die Seite „Fahrzeuge 2“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Bagger, Feuerwehr, Polizeiauto, Krankenwagen, Kran

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Essen

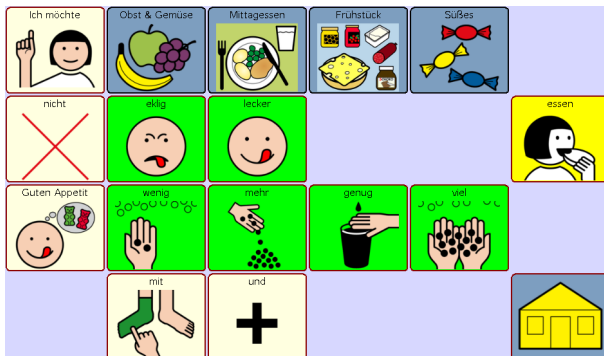

Die Seite „Essen“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte, Guten Appetit

Nomen: -


Verben: essen

Adjektive: eklig, lecker, wenig, mehr, genug, viel

Kleine Wörter: nicht, mit, und

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Obst & Gemüse“, „Mittagessen“, „Frühstück“ und „Süßes“ zu wechseln.

Obst & Gemüse

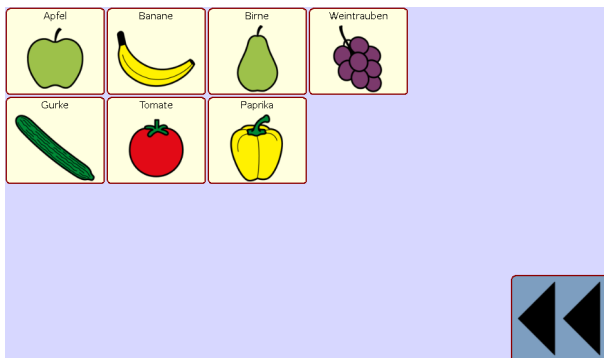

Die Seite „Obst & Gemüse“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Apfel, Banane, Birne, Weintrauben, Gurke, Tomate, Paprika

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Mittagessen



Die Seite „Mittagessen“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Kartoffeln, Fleisch, Nudeln, Reis, Gemüse, Soße, Suppe, Fisch, Nachtisch

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Frühstück



Die Seite „Frühstück“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Brot, Nutella, Müsli, Käse, Honig, Wurst, Marmelade, Butter, Obst, Joghurt

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Süßes

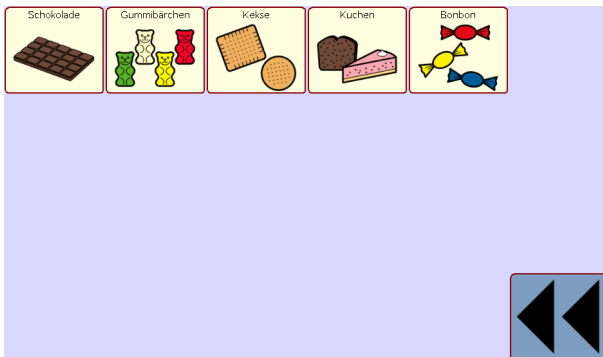

Die Seite „Süßes“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Schokolade, Gummibärchen, Kekse, Kuchen, Bonbon

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Trinken

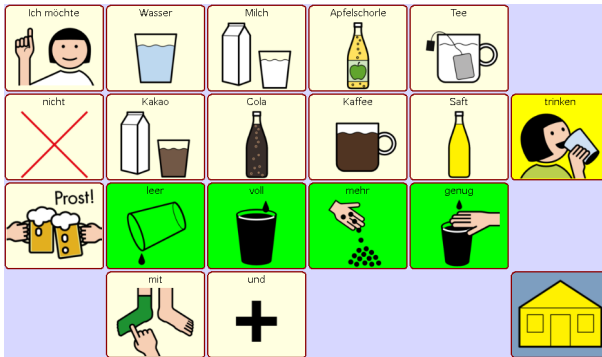

Die Seite „Trinken“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte, Prost


Nomen: Wasser, Milch, Apfelschorle, Tee, Kakao, cola, Saft

Verben: trinken

Adjektive: leer, voll, mehr, genug

Kleine Wörter: nicht

Tiere

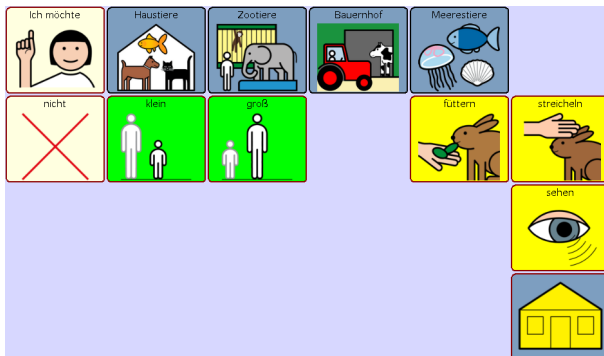

Die Seite „Tiere“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: -

Verben: streicheln, füttern, sehen

Adjektive: klein, groß

Kleine Wörter: nicht

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Haustiere“, „Zootiere“, „Bauernhof“ und „Meerestiere“ zu wechseln.

Haustiere



Die Seite „Haustiere“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen:


Nomen: Hund, Katze, Vogel, Fische, Hamster, Meerschweinchen

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Zootiere

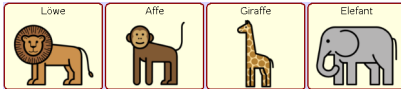

Die Seite „Zootiere“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen:


Nomen: Löwe, Affe, Giraffe, Elefant

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Bauernhof

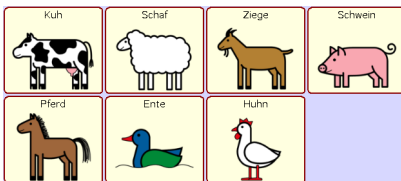

Die Seite „Bauernhof“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen:


Nomen: Kuh, Schaf, Ziege, Schwein, Pferd, Ente, Huhn

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Meerestiere

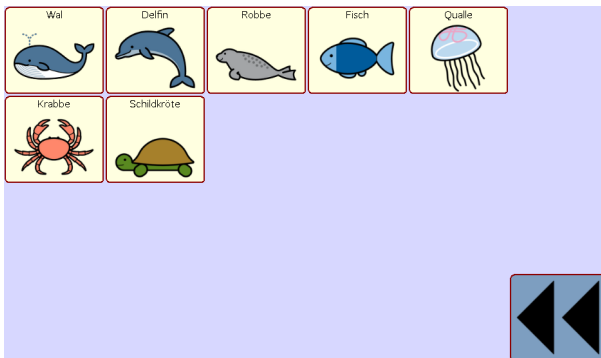

Die Seite „Meerestiere“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen:


Nomen: Wal, Delfin, Robbe, Fisch, Qualle, Krabbe, Schildkröte

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Musik

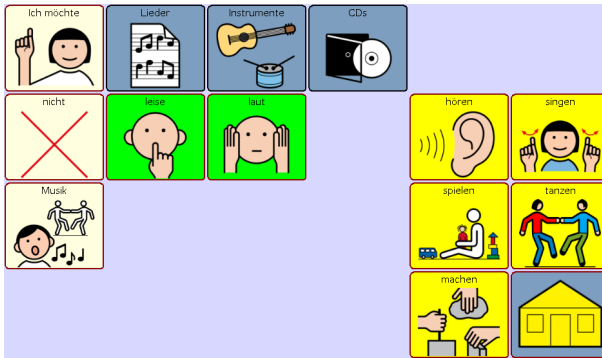

Die Seite „Musik“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte

Nomen: Musik


Verben: hören, singen, spielen, tanzen, machen

Adjektive: leise, laut

Kleine Wörter: nicht

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Lieder“, „Instrumente“ und „CDs“ zu wechseln.


Lieder

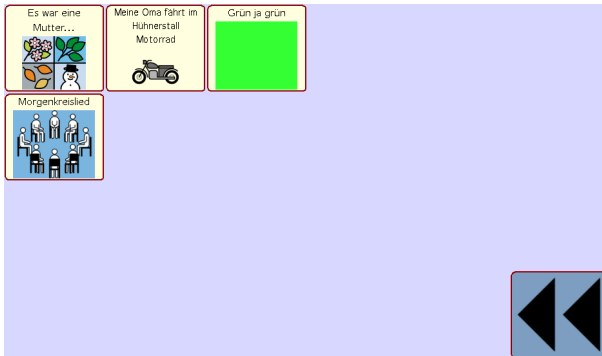

Die Seite „Lieder“ enthält beispielhaft die Namen von Liedern, die gerne in der Schule gesungen werden:

- Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder
- Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorraf
- Grün ja grün sind alle meine Kleider
- aktuelles Morgenkreislied

Instrumente

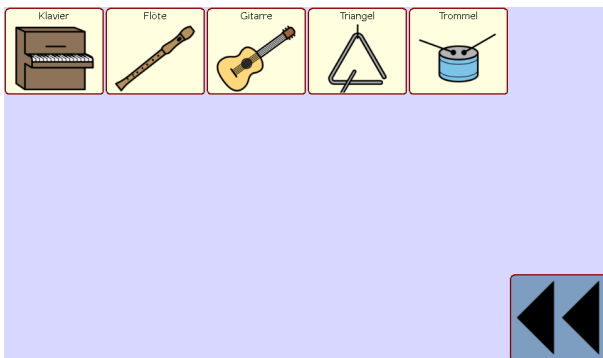

Die Seite „Instrumente“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Klavier, Flöte, Gitarre, Triangel, Trommel

Verben: -

Adjektive: -


Kleine Wörter: -

CDs

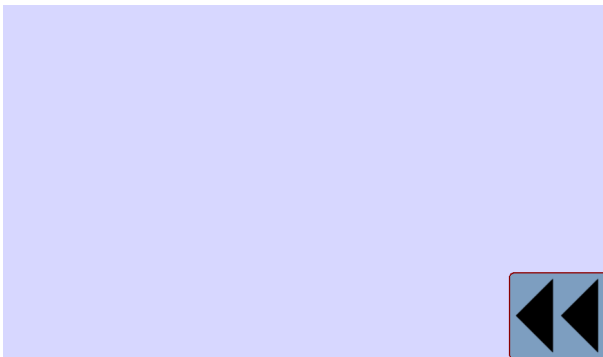

Die Seite „CDs“ ist vorbereitet zum Abspielen von Lieddateien.

Spiele

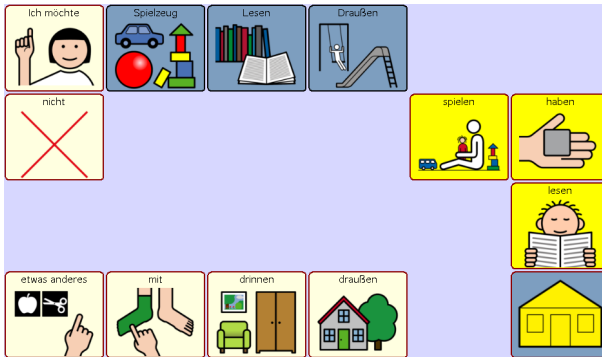

Die Seite „Spiele“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: ich möchte, etwas anderes

Nomen: -


Verben: spielen, haben, lesen

Adjektive:

Kleine Wörter: nicht, mit, drinnen, draußen

Es besteht die Möglichkeit, auf die Seiten „Spielzeug“, „Lesen“, und „Draußen“ zu wechseln.

Spielzeug

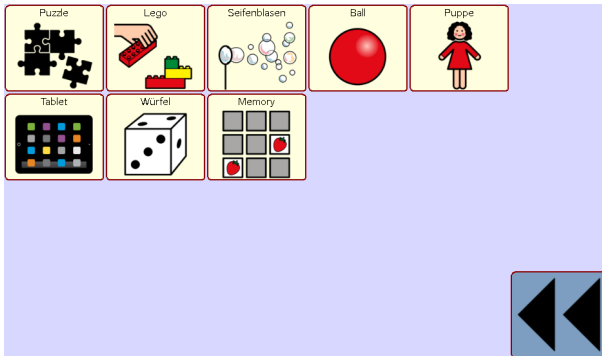

Die Seite „Spielzeug“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -


Nomen: Puzzle, Lego, Seifenblasen, Ball, Puppe, Tablet, Würfel, Memory

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Lesen

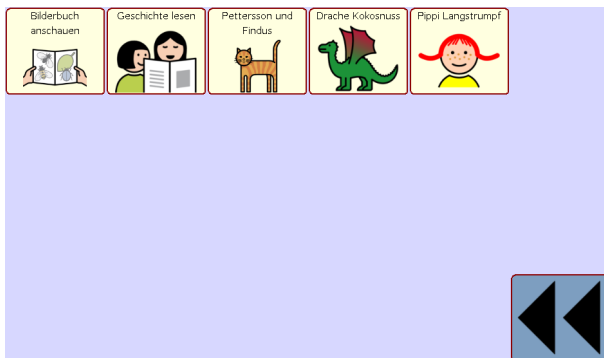

Die Seite „Lesen“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: Bilderbuch anschauen, Geschichte lesen, Petterson und Findus, Drache Kokosnuss, Pippi Langstrumpf


Nomen: -

Verben: -

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

Draußen

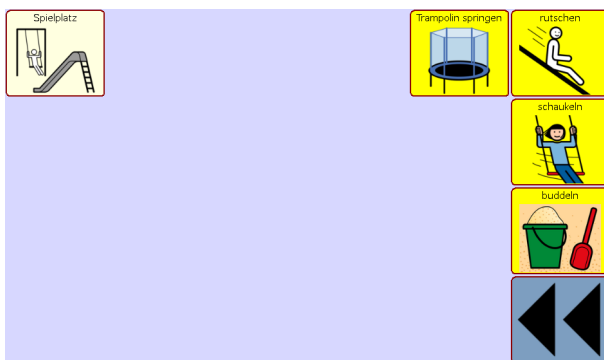

Die Seite „Draußen“ enthält folgende Mitteilungen:

Phrasen: -

Nomen: Spielplatz

Verben: Trampolin springen, rutschen, schaukeln, buddeln

Adjektive: -

Kleine Wörter: -

WORTLISTEN

Wortliste – alphabetische Sortierung

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Affe	Nomen	Tiere	Zootiere
allein	Adjektive	Aktion	
an	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
Apfel	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Apfelschorle	Nomen	Trinken	
auch	Adverbien	Aktion	
auf	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
Aula	Nomen	Schule	Räume
aus	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
Auto	Nomen	Fahrzeuge	
Bagger	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Ball	Nomen	Spielen	Spielzeug
Banane	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
basteln	Verben	Basteln	
Baum	Nomen	Natur	Garten
Beet	Nomen	Natur	Garten
besuchen	Verben	Leute	
Bilderbuch anschauen	Nomen	Spielen	Lesen
Birnen	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
bitte	Floskeln	Plaudern	
blau	Adjektive	Basteln	Farben
Blume	Nomen	Natur	Garten
Bonbon	Nomen	Essen	Süßes
braun	Adjektive	Basteln	Farben
Brot	Nomen	Essen	Frühstück
buddeln	Verben	Spielen	Draußen
Burgerladen	Nomen	Favoriten	Orte
Bus	Nomen	Fahrzeuge	
Busch	Nomen	Natur	Garten
Butter	Nomen	Essen	Frühstück
chillen	Verben	Favoriten	
Cola	Nomen	Trinken	
da	Adverbien	Aktion	
danke	Floskeln	Plaudern	
dann	Adverbien	Schule	
Darf ich auch?	Fragen	Fragen	
das ist	Phrasen	Gefühle	
Das ist ja spannend!	Sätze	Erzählen	
Datum	Nomen	Schule	Wochentage
Delfin	Nomen	Tiere	Meerestiere
Dienstag	Nomen	Schule	Wochentage
doch	Konjunktionen	Plaudern	
Donnerstag	Nomen	Schule	Wochentage
doof	Adjektive	Gefühle	
Drache Kokosnuss	Phrasen	Spielen	Lesen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
draußen	Adverbien	Spielen	
drinnen	Adverbien	Spielen	
du	Pronomem	Leute	
einkaufen	Verben	Favoriten	
Einzelförderung	Nomen	Schule	Stundenplan
Eisdiele	Nomen	Favoriten	Orte
eklig	Adjektive	Essen	
Elefant	Nomen	Tiere	Zootiere
Ente	Nomen	Tiere	Bauernhof
erzählen	Verben	Erzählen	
Es war eine Mutter	Phrasen	Musik	Lieder
essen	Verben	Essen	
etwas anderes	Phrasen	Spielen	
fahren	Verben	Fahrzeuge	
fahren	Verben	Favoriten	
Fahrrad	Nomen	Fahrzeuge	
Fasching	Nomen	Favoriten	Fest
feiern	Verben	Favoriten	
Ferien	Nomen	Schule	Stundenplan
fernsehen	Verben	Favoriten	
fertig	Adjektive	Aktion	
fertig	Adjektive	Essen	
Feuerwehr	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Fisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Fische	Nomen	Tiere	Haustiere
Fische	Nomen	Tiere	Meerestiere
Fleisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Flöte	Nomen	Musik	Instrumente
Freitag	Nomen	Schule	Wochentage
Frühling	Nomen	Natur	Jahreszeiten
für	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
füttern	Verben	Tiere	
Geburtstag	Nomen	Favoriten	Fest
gehen	Verben	Favoriten	
gehen	Verben	Leute	
gelb	Adjektive	Basteln	Farben
Gemüse	Nomen	Essen	Mittagessen
genug	Adjektive	Essen	
genug	Adjektive	Trinken	
Geschichte lesen	Phrasen	Spielen	Lesen
gestern	Adverbien	Schule	
Gib mir fünf	Phrasen	Plaudern	
gießen	Verben	Natur	
Gießkanne	Nomen	Natur	Garten
Giraffe	Nomen	Tiere	Zootiere
Gitarre	Nomen	Musik	Instrumente
glücklich	Adjektive	Gefühle	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Gras	Nomen	Natur	Garten
grau	Adjektive	Basteln	Farben
groß	Adjektive	Tiere	
grün	Adjektive	Basteln	Farben
Grün ja grün	Phrasen	Musik	Lieder
Gummibärchen	Nomen	Essen	Süßes
Gurke	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
gut	Adjektive	Gefühle	
Guten Appetit!	Floskeln	Essen	
haben	Verben	Natur	
haben	Verben	Spielen	
Hallo	Floskeln	Plaudern	
Hamster	Nomen	Tiere	Haustiere
Hauswirtschaft	Nomen	Schule	Stundenplan
heiß	Adjektive	Natur	
Herbst	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Herzlichen Glückwunsch!	Phrasen	Plaudern	
heute	Adverbien	Natur	
heute	Adverbien	Schule	
Honig	Nomen	Essen	Frühstück
Hör mal zu	Phrasen	Erzählen	
hören	Verben	Musik	
Huhn	Nomen	Tiere	Bauernhof
Hund	Nomen	Tiere	Haustiere
ich	Pronomem	Leute	
Ich bin	Phrasen	Gefühle	
Ich bin...Jahre alt	Sätze	über mich	
Ich brauche eine Pause.	Sätze	Plaudern	
Ich brauche Hilfe.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Durst.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Hunger.	Sätze	Plaudern	
Ich heiße...	Sätze	über mich	
Ich mag das nicht	Sätze	Plaudern	
Ich mag nicht...	Sätze	über mich	
Ich mag...	Sätze	über mich	
Ich möchte	Phrasen	Aktion	
Ich möchte	Phrasen	Basteln	
Ich möchte	Phrasen	Essen	
Ich möchte	Phrasen	Fahrzeuge	
Ich möchte	Phrasen	Favoriten	
Ich möchte	Sätze	Leute	
Ich möchte	Phrasen	Musik	
Ich möchte	Phrasen	Natur	
Ich möchte	Phrasen	Schule	
Ich möchte	Phrasen	Spielen	
Ich möchte	Phrasen	Tiere	
Ich möchte	Phrasen	Trinken	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Ich muss mal zur Toilette.	Sätze	Plaudern	
Ich weiß nicht	Phrasen	Plaudern	
Ich wohne in...	Sätze	über mich	
in	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
ja	Floskeln	Plaudern	
Joghurt	Nomen	Essen	Frühstück
Kakao	Nomen	Trinken	
kalt	Adjektive	Natur	
Kartoffeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Käse	Nomen	Essen	Frühstück
Katze	Nomen	Tiere	Haustiere
Kekse	Nomen	Essen	Süßes
Kino	Nomen	Favoriten	Orte
Klassenraum	Nomen	Schule	Räume
Klavier	Nomen	Musik	Instrumente
Kleber	Nomen	Basteln	
klein	Adjektive	Tiere	
komm	Verben	Leute	
Krabbe	Nomen	Tiere	Meerestiere
Kran	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
krank	Adjektive	Gefühle	
Krankenwagen	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Küche	Nomen	Schule	Räume
Kuchen	Nomen	Essen	Süßes
Kuh	Nomen	Tiere	Bauernhof
Kunst	Nomen	Schule	Stundenplan
lachen	Verben	Gefühle	
langsam	Adjektive	Fahrzeuge	
langweilig	Adjektive	Gefühle	
Lass das!	Phrasen	Plaudern	
Läuft bei dir?	Fragen	Fragen	
laut	Adjektive	Musik	
lecker	Adjektive	Essen	
leer	Adjektive	Trinken	
Lego	Nomen	Spielen	Spielzeug
leise	Adjektive	Musik	
lernen	Verben	Schule	
lesen	Verben	Spielen	
Lesen und Schreiben	Nomen	Schule	Stundenplan
lila	Adjektive	Basteln	Farben
Löwe	Nomen	Tiere	Zootiere
machen	Verben	Aktion	
machen	Verben	Musik	
machen	Verben	Schule	
malen	Verben	Basteln	
Mama	Nomen	Leute	Familie
Marmelade	Nomen	Essen	Frühstück

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Meerschweinchen	Nomen	Tiere	Haustiere
mehr	Pronomen	Essen	
mehr	Pronomen	Trinken	
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad	Phrasen	Musik	Lieder
Memory	Nomen	Spielen	Spielzeug
Milche	Nomen	Trinken	
mit	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
mit	Präpositionen	Essen	
mit	Konjunktionen	Leute	
mit	Präpositionen	Spielen	
mit	Präpositionen	Trinken	
Mitteilung Schule	Sätze	Erzählen	
Mitteilung zu Hause	Sätze	Erzählen	
Mittwoch	Nomen	Schule	Wochentage
Möchtest du?	Fragen	Fragen	
Montag	Nomen	Schule	Wochentage
morgen	Adverbien	Schule	
Morgenkreislied	Nomen	Musik	Lieder
Museum	Nomen	Favoriten	Orte
Musik	Nomen	Musik	
Musik	Nomen	Schule	Stundenplan
Müsli	Nomen	Essen	Frühstück
nach Hause	Phrasen	Favoriten	Orte
Nachtisch	Nomen	Essen	Mittagessen
nass	Adjektive	Natur	
Nebel	Nomen	Natur	Wetter
nein	Floskeln	Plaudern	
nicht	Adverbien	Aktion	
nicht	Adverbien	Basteln	
nicht	Adverbien	Essen	
nicht	Adverbien	Fahrzeuge	
nicht	Adverbien	Favoriten	
nicht	Adverbien	Gefühle	
nicht	Adverbien	Leute	
nicht	Adverbien	Musik	
nicht	Adverbien	Natur	
nicht	Adverbien	Schule	
nicht	Adverbien	Spielen	
nicht	Adverbien	Tiere	
nicht	Adverbien	Trinken	
nochmal	Adverbien	Aktion	
Nudeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Nutella	Nomen	Essen	Frühstück
Obst	Nomen	Essen	Frühstück
ohne	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
Oma	Nomen	Leute	Familie

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Opa	Nomen	Leute	Familie
orange	Adjektive	Basteln	Farben
Ostern	Nomen	Favoriten	Fest
Papa	Nomen	Leute	Familie
Paprika	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Park	Nomen	Favoriten	Orte
Pause	Nomen	Schule	Stundenplan
Pettersson und Findus	Phrasen	Spiele	Lesen
Pferd	Nomen	Tiere	Bauernhof
pink	Adjektive	Basteln	Farben
Pippi Langstrumpf	Phrasen	Spiele	Lesen
Polizeiauto	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Prost	Floskeln	Trinken	
Puppe	Nomen	Spiele	Spielzeug
Puzzle	Nomen	Spiele	Spielzeug
Qualle	Nomen	Tiere	Meerestiere
Quatsch	Nomen	Plaudern	
Rasenmäher	Nomen	Natur	Garten
raus	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
Rechnen	Nomen	Schule	Stundenplan
Regen	Nomen	Natur	Wetter
rein	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
Reis	Nomen	Essen	Mittagessen
reiten	Verben	Favoriten	
Robbe	Nomen	Tiere	Meerestiere
rot	Adjektive	Basteln	Farben
rutschen	Verben	Spiele	Draußen
Sachunterricht	Nomen	Schule	Stundenplan
Saft	Nomen	Trinken	
Samstag	Nomen	Schule	Wochentage
Schaf	Nomen	Tiere	Bauernhof
schaukeln	Verben	Spiele	Draußen
Schere	Nomen	Basteln	
Schiff	Nomen	Fahrzeuge	
Schildkröte	Nomen	Tiere	Meerestiere
schlafen	Verben	Favoriten	
schlecht	Adjektive	Gefühle	
Schnee	Nomen	Natur	Wetter
schnell	Adjektive	Fahrzeuge	
Schokolade	Nomen	Essen	Süßes
Schule	Nomen	Favoriten	Orte
Schulhof	Nomen	Schule	Räume
schwarz	Adjektive	Basteln	Farben
Schwein	Nomen	Tiere	Bauernhof
Schwimmbad	Nomen	Favoriten	Orte
schwimmen	Verben	Favoriten	
sehen	Verben	Tiere	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Seifenblasen	Nomen	Spielen	Spielzeug
Sekretariat	Nomen	Schule	Räume
singen	Verben	Musik	
Snoezelen	Nomen	Schule	Stundenplan
Snoezelraum	Nomen	Schule	Räume
Sommer	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Sonne	Nomen	Natur	Wetter
Sonntag	Nomen	Schule	Wochentage
Soße	Nomen	Essen	Mittagessen
Spaten	Nomen	Natur	Garten
spazieren	Verben	Favoriten	
Speisesaal	Nomen	Schule	Räume
spielen	Verben	Musik	
spielen	Verben	Spielen	
Spielplatz	Nomen	Favoriten	Orte
Spielplatz	Nomen	Spielen	Draußen
Sport	Nomen	Schule	Stundenplan
Stifte	Nomen	Basteln	
streicheln	Verben	Tiere	
Sturm	Nomen	Natur	Wetter
Supermarkt	Nomen	Favoriten	Orte
Suppe	Nomen	Essen	Mittagessen
Tablet	Nomen	Spielen	Spielzeug
tanzen	Verben	Musik	
Tee	Nomen	Trinken	
Therapieraum	Nomen	Schule	Räume
Toilette	Nomen	Schule	Räume
toll	Adjektive	Gefühle	
Tomate	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Trampolin springen	Verben	Spielen	Draußen
traurig	Adjektive	Gefühle	
Triangel	Nomen	Musik	Instrumente
trinken	Verben	Trinken	
trocken	Adjektive	Natur	
Trommel	Nomen	Musik	Instrumente
Tschüss	Floskeln	Plaudern	
Turnhalle	Nomen	Schule	Räume
und	Konjunktionen	Essen	
und	Konjunktionen	Trinken	
viel	Adjektive	Essen	
Vogel	Nomen	Tiere	Haustiere
voll	Adjektive	Trinken	
Wal	Nomen	Tiere	Meerestiere
Wann?	Fragen	Fragen	
warm	Adjektive	Natur	
Warum?	Fragen	Fragen	
Was gibt's Neues?	Sätze	Erzählen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Was ist das?	Fragen	Fragen	
Was machst du?	Fragen	Fragen	
Wasser	Nomen	Trinken	
weg	Adverbien	Aktion	
Weihnachten	Nomen	Favoriten	Fest
weinen	Verben	Gefühle	
Weintrauben	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
weiß	Adjektive	Basteln	Farben
wenig	Adjektive	Essen	
Wer bist du?	Fragen	Fragen	
Werken	Nomen	Schule	Stundenplan
Wie geht's?	Fragen	Fragen	
Wiese	Nomen	Natur	Garten
Wind	Nomen	Natur	Wetter
Winter	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Wirklich?	Floskeln	Erzählen	
Wo?	Fragen	Fragen	
Wochenende	Nomen	Schule	Wochentage
Wolken	Nomen	Natur	Wetter
Würfel	Nomen	Spielen	Spielzeug
Wurst	Nomen	Essen	Frühstück
wütend	Adjektive	Gefühle	
Ziege	Nomen	Tiere	Bauernhof
Zoo	Nomen	Favoriten	Orte
zu	Adverbien	Leute	
zu	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
Zug	Nomen	Fahrzeuge	
zusammen	Adverbien	Aktion	

Wortliste – Sortierung nach Wortart

Adjektive

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
allein	Adjektive	Aktion	
blau	Adjektive	Basteln	Farben
braun	Adjektive	Basteln	Farben
doof	Adjektive	Gefühle	
eklig	Adjektive	Essen	
fertig	Adjektive	Aktion	
fertig	Adjektive	Essen	
gelb	Adjektive	Basteln	Farben
genug	Adjektive	Essen	
genug	Adjektive	Trinken	
glücklich	Adjektive	Gefühle	
grau	Adjektive	Basteln	Farben
groß	Adjektive	Tiere	
grün	Adjektive	Basteln	Farben
gut	Adjektive	Gefühle	
heiß	Adjektive	Natur	
kalt	Adjektive	Natur	
klein	Adjektive	Tiere	
krank	Adjektive	Gefühle	
langsam	Adjektive	Fahrzeuge	
langweilig	Adjektive	Gefühle	
laut	Adjektive	Musik	
lecker	Adjektive	Essen	
leer	Adjektive	Trinken	
leise	Adjektive	Musik	
lila	Adjektive	Basteln	Farben
nass	Adjektive	Natur	
orange	Adjektive	Basteln	Farben
pink	Adjektive	Basteln	Farben
rot	Adjektive	Basteln	Farben
schlecht	Adjektive	Gefühle	
schnell	Adjektive	Fahrzeuge	
schwarz	Adjektive	Basteln	Farben
toll	Adjektive	Gefühle	
traurig	Adjektive	Gefühle	
trocken	Adjektive	Natur	
viel	Adjektive	Essen	
voll	Adjektive	Trinken	
warm	Adjektive	Natur	
weiß	Adjektive	Basteln	Farben
wenig	Adjektive	Essen	
wütend	Adjektive	Gefühle	

Adverbien

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
auch	Adverbien	Aktion	
da	Adverbien	Aktion	
dann	Adverbien	Schule	
draußen	Adverbien	Spielen	
drinnen	Adverbien	Spielen	
gestern	Adverbien	Schule	
heute	Adverbien	Natur	
heute	Adverbien	Schule	
morgen	Adverbien	Schule	
nicht	Adverbien	Aktion	
nicht	Adverbien	Basteln	
nicht	Adverbien	Essen	
nicht	Adverbien	Fahrzeuge	
nicht	Adverbien	Favoriten	
nicht	Adverbien	Gefühle	
nicht	Adverbien	Leute	
nicht	Adverbien	Musik	
nicht	Adverbien	Natur	
nicht	Adverbien	Schule	
nicht	Adverbien	Spielen	
nicht	Adverbien	Tiere	
nicht	Adverbien	Trinken	
nochmal	Adverbien	Aktion	
raus	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
rein	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
weg	Adverbien	Aktion	
zu	Adverbien	Leute	
zusammen	Adverbien	Aktion	

Floskeln

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
bitte	Floskeln	Plaudern	
danke	Floskeln	Plaudern	
Guten Appetit!	Floskeln	Essen	
Hallo	Floskeln	Plaudern	
ja	Floskeln	Plaudern	
nein	Floskeln	Plaudern	
Prost	Floskeln	Trinken	
Tschüss	Floskeln	Plaudern	
Wirklich?	Floskeln	Erzählen	

Fragen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Darf ich auch?	Fragen	Fragen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Läuft bei dir?	Fragen	Fragen	
Möchtest du?	Fragen	Fragen	
Wann?	Fragen	Fragen	
Warum?	Fragen	Fragen	
Was ist das?	Fragen	Fragen	
Was machst du?	Fragen	Fragen	
Wer bist du?	Fragen	Fragen	
Wie geht's?	Fragen	Fragen	
Wo?	Fragen	Fragen	

Konjunktionen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
doch	Konjunktionen	Plaudern	
mit	Konjunktionen	Leute	
und	Konjunktionen	Essen	
und	Konjunktionen	Trinken	

Nomen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Affe	Nomen	Tiere	Zootiere
Apfel	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Apfelschorle	Nomen	Trinken	
Aula	Nomen	Schule	Räume
Auto	Nomen	Fahrzeuge	
Bagger	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Ball	Nomen	Spielen	Spielzeug
Banane	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Baum	Nomen	Natur	Garten
Beet	Nomen	Natur	Garten
Bilderbuch anschauen	Nomen	Spielen	Lesen
Birnen	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Blume	Nomen	Natur	Garten
Bonbon	Nomen	Essen	Süßes
Brot	Nomen	Essen	Frühstück
Burgerladen	Nomen	Favoriten	Orte
Bus	Nomen	Fahrzeuge	
Busch	Nomen	Natur	Garten
Butter	Nomen	Essen	Frühstück
Cola	Nomen	Trinken	
Datum	Nomen	Schule	Wochentage
Delfin	Nomen	Tiere	Meerestiere
Dienstag	Nomen	Schule	Wochentage
Donnerstag	Nomen	Schule	Wochentage
Einzelförderung	Nomen	Schule	Stundenplan
Eisdiele	Nomen	Favoriten	Orte
Elefant	Nomen	Tiere	Zootiere

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Ente	Nomen	Tiere	Bauernhof
Fahrrad	Nomen	Fahrzeuge	
Fasching	Nomen	Favoriten	Fest
Ferien	Nomen	Schule	Stundenplan
Feuerwehr	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Fisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Fische	Nomen	Tiere	Haustiere
Fische	Nomen	Tiere	Meerestiere
Fleisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Flöte	Nomen	Musik	Instrumente
Freitag	Nomen	Schule	Wochentage
Frühling	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Geburtstag	Nomen	Favoriten	Fest
Gemüse	Nomen	Essen	Mittagessen
Gießkanne	Nomen	Natur	Garten
Giraffe	Nomen	Tiere	Zootiere
Gitarre	Nomen	Musik	Instrumente
Gras	Nomen	Natur	Garten
Gummibärchen	Nomen	Essen	Süßes
Gurke	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Hamster	Nomen	Tiere	Haustiere
Hauswirtschaft	Nomen	Schule	Stundenplan
Herbst	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Honig	Nomen	Essen	Frühstück
Huhn	Nomen	Tiere	Bauernhof
Hund	Nomen	Tiere	Haustiere
Joghurt	Nomen	Essen	Frühstück
Kakao	Nomen	Trinken	
Kartoffeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Käse	Nomen	Essen	Frühstück
Katze	Nomen	Tiere	Haustiere
Kekse	Nomen	Essen	Süßes
Kino	Nomen	Favoriten	Orte
Klassenraum	Nomen	Schule	Räume
Klavier	Nomen	Musik	Instrumente
Kleber	Nomen	Basteln	
Krabbe	Nomen	Tiere	Meerestiere
Kran	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Krankenwagen	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Küche	Nomen	Schule	Räume
Kuchen	Nomen	Essen	Süßes
Kuh	Nomen	Tiere	Bauernhof
Kunst	Nomen	Schule	Stundenplan
Lego	Nomen	Spielen	Spielzeug
Lesen und Schreiben	Nomen	Schule	Stundenplan
Löwe	Nomen	Tiere	Zootiere
Mama	Nomen	Leute	Familie

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Marmelade	Nomen	Essen	Frühstück
Meerschweinchen	Nomen	Tiere	Haustiere
Memory	Nomen	Spielen	Spielzeug
Milche	Nomen	Trinken	
Mittwoch	Nomen	Schule	Wochentage
Montag	Nomen	Schule	Wochentage
Morgenkreislied	Nomen	Musik	Lieder
Museum	Nomen	Favoriten	Orte
Musik	Nomen	Musik	
Musik	Nomen	Schule	Stundenplan
Müsli	Nomen	Essen	Frühstück
Nachtsch	Nomen	Essen	Mittagessen
Nebel	Nomen	Natur	Wetter
Nudeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Nutella	Nomen	Essen	Frühstück
Obst	Nomen	Essen	Frühstück
Oma	Nomen	Leute	Familie
Opa	Nomen	Leute	Familie
Ostern	Nomen	Favoriten	Fest
Papa	Nomen	Leute	Familie
Paprika	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Park	Nomen	Favoriten	Orte
Pause	Nomen	Schule	Stundenplan
Pferd	Nomen	Tiere	Bauernhof
Polizeiauto	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Puppe	Nomen	Spielen	Spielzeug
Puzzle	Nomen	Spielen	Spielzeug
Qualle	Nomen	Tiere	Meerestiere
Quatsch	Nomen	Plaudern	
Rasenmäher	Nomen	Natur	Garten
Rechnen	Nomen	Schule	Stundenplan
Regen	Nomen	Natur	Wetter
Reis	Nomen	Essen	Mittagessen
Robbe	Nomen	Tiere	Meerestiere
Sachunterricht	Nomen	Schule	Stundenplan
Saft	Nomen	Trinken	
Samstag	Nomen	Schule	Wochentage
Schaf	Nomen	Tiere	Bauernhof
Schere	Nomen	Basteln	
Schiff	Nomen	Fahrzeuge	
Schildkröte	Nomen	Tiere	Meerestiere
Schnee	Nomen	Natur	Wetter
Schokolade	Nomen	Essen	Süßes
Schule	Nomen	Favoriten	Orte
Schulhof	Nomen	Schule	Räume
Schwein	Nomen	Tiere	Bauernhof
Schwimmbad	Nomen	Favoriten	Orte

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Seifenblasen	Nomen	Spielen	Spielzeug
Sekretariat	Nomen	Schule	Räume
Snoezelen	Nomen	Schule	Stundenplan
Snoezelraum	Nomen	Schule	Räume
Sommer	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Sonne	Nomen	Natur	Wetter
Sonntag	Nomen	Schule	Wochentage
Soße	Nomen	Essen	Mittagessen
Spaten	Nomen	Natur	Garten
Speisesaal	Nomen	Schule	Räume
Spielplatz	Nomen	Favoriten	Orte
Spielplatz	Nomen	Spielen	Draußen
Sport	Nomen	Schule	Stundenplan
Stifte	Nomen	Basteln	
Sturm	Nomen	Natur	Wetter
Supermarkt	Nomen	Favoriten	Orte
Suppe	Nomen	Essen	Mittagessen
Tablet	Nomen	Spielen	Spielzeug
Tee	Nomen	Trinken	
Therapieraum	Nomen	Schule	Räume
Toilette	Nomen	Schule	Räume
Tomate	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Triangel	Nomen	Musik	Instrumente
Trommel	Nomen	Musik	Instrumente
Turnhalle	Nomen	Schule	Räume
Vogel	Nomen	Tiere	Haustiere
Wal	Nomen	Tiere	Meerestiere
Wasser	Nomen	Trinken	
Weihnachten	Nomen	Favoriten	Fest
Weintrauben	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Werken	Nomen	Schule	Stundenplan
Wiese	Nomen	Natur	Garten
Wind	Nomen	Natur	Wetter
Winter	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Wochenende	Nomen	Schule	Wochentage
Wolken	Nomen	Natur	Wetter
Würfel	Nomen	Spielen	Spielzeug
Wurst	Nomen	Essen	Frühstück
Ziege	Nomen	Tiere	Bauernhof
Zoo	Nomen	Favoriten	Orte
Zug	Nomen	Fahrzeuge	

Phrasen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
das ist	Phrasen	Gefühle	
Drache Kokosnuss	Phrasen	Spielen	Lesen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Es war eine Mutter	Phrasen	Musik	Lieder
etwas anderes	Phrasen	Spielen	
Geschichte lesen	Phrasen	Spielen	Lesen
Gib mir fünf	Phrasen	Plaudern	
Grün ja grün	Phrasen	Musik	Lieder
Herzlichen Glückwunsch!	Phrasen	Plaudern	
Hör mal zu	Phrasen	Erzählen	
Ich bin	Phrasen	Gefühle	
Ich möchte	Phrasen	Aktion	
Ich möchte	Phrasen	Basteln	
Ich möchte	Phrasen	Essen	
Ich möchte	Phrasen	Fahrzeuge	
Ich möchte	Phrasen	Favoriten	
Ich möchte	Phrasen	Musik	
Ich möchte	Phrasen	Natur	
Ich möchte	Phrasen	Schule	
Ich möchte	Phrasen	Spielen	
Ich möchte	Phrasen	Tiere	
Ich möchte	Phrasen	Trinken	
Ich weiß nicht	Phrasen	Plaudern	
Lass das!	Phrasen	Plaudern	
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad	Phrasen	Musik	Lieder
nach Hause	Phrasen	Favoriten	Orte
Pettersson und Findus	Phrasen	Spielen	Lesen
Pippi Langstrumpf	Phrasen	Spielen	Lesen

Präpositionen

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
an	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
auf	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
aus	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
für	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
in	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
mit	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
mit	Präpositionen	Essen	
mit	Präpositionen	Spielen	
mit	Präpositionen	Trinken	
ohne	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
zu	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter

Pronomem

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
du	Pronomem	Leute	
ich	Pronomem	Leute	
mehr	Pronomen	Essen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
mehr	Pronomen	Trinken	

Sätze

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Das ist ja spannend!	Sätze	Erzählen	
Ich bin...Jahre alt	Sätze	über mich	
Ich brauche eine Pause.	Sätze	Plaudern	
Ich brauche Hilfe.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Durst.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Hunger.	Sätze	Plaudern	
Ich heiße...	Sätze	über mich	
Ich mag das nicht	Sätze	Plaudern	
Ich mag nicht...	Sätze	über mich	
Ich mag...	Sätze	über mich	
Ich möchte	Sätze	Leute	
Ich muss mal zur Toilette.	Sätze	Plaudern	
Ich wohne in...	Sätze	über mich	
Mitteilung Schule	Sätze	Erzählen	
Mitteilung zu Hause	Sätze	Erzählen	
Was gibt's Neues?	Sätze	Erzählen	

Verben

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
basteln	Verben	Basteln	
besuchen	Verben	Leute	
buddeln	Verben	Spielen	Draußen
chillen	Verben	Favoriten	
einkaufen	Verben	Favoriten	
erzählen	Verben	Erzählen	
essen	Verben	Essen	
fahren	Verben	Fahrzeuge	
fahren	Verben	Favoriten	
feiern	Verben	Favoriten	
fernsehen	Verben	Favoriten	
füttern	Verben	Tiere	
gehen	Verben	Favoriten	
gehen	Verben	Leute	
gießen	Verben	Natur	
haben	Verben	Natur	
haben	Verben	Spielen	
hören	Verben	Musik	
komm	Verben	Leute	
lachen	Verben	Gefühle	
lernen	Verben	Schule	
lesen	Verben	Spielen	
machen	Verben	Aktion	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
machen	Verben	Musik	
machen	Verben	Schule	
malen	Verben	Basteln	
reiten	Verben	Favoriten	
rutschen	Verben	Spielen	Draußen
schaukeln	Verben	Spielen	Draußen
schlafen	Verben	Favoriten	
schwimmen	Verben	Favoriten	
sehen	Verben	Tiere	
singen	Verben	Musik	
spazieren	Verben	Favoriten	
spielen	Verben	Musik	
spielen	Verben	Spielen	
streicheln	Verben	Tiere	
tanzen	Verben	Musik	
Trampolin springen	Verben	Spielen	Draußen
trinken	Verben	Trinken	
weinen	Verben	Gefühle	

Wortliste – Sortierung nach Seite

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
allein	Adjektive	Aktion	
auch	Adverbien	Aktion	
da	Adverbien	Aktion	
fertig	Adjektive	Aktion	
Ich möchte	Phrasen	Aktion	
machen	Verben	Aktion	
nicht	Adverbien	Aktion	
nochmal	Adverbien	Aktion	
weg	Adverbien	Aktion	
zusammen	Adverbien	Aktion	
an	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
auf	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
aus	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
für	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
in	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
mit	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
ohne	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
raus	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
rein	Adverbien	Aktion	kleine Wörter
zu	Präpositionen	Aktion	kleine Wörter
basteln	Verben	Basteln	
Ich möchte	Phrasen	Basteln	
Kleber	Nomen	Basteln	
malen	Verben	Basteln	
nicht	Adverbien	Basteln	
Schere	Nomen	Basteln	
Stifte	Nomen	Basteln	
blau	Adjektive	Basteln	Farben
braun	Adjektive	Basteln	Farben
gelb	Adjektive	Basteln	Farben
grau	Adjektive	Basteln	Farben
grün	Adjektive	Basteln	Farben
lila	Adjektive	Basteln	Farben
orange	Adjektive	Basteln	Farben
pink	Adjektive	Basteln	Farben
rot	Adjektive	Basteln	Farben
schwarz	Adjektive	Basteln	Farben
weiß	Adjektive	Basteln	Farben
Das ist ja spannend!	Sätze	Erzählen	
erzählen	Verben	Erzählen	
Hör mal zu	Phrasen	Erzählen	
Mitteilung Schule	Sätze	Erzählen	
Mitteilung zu Hause	Sätze	Erzählen	
Was gibt's Neues?	Sätze	Erzählen	
Wirklich?	Floskeln	Erzählen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
eklig	Adjektive	Essen	
essen	Verben	Essen	
fertig	Adjektive	Essen	
genug	Adjektive	Essen	
Guten Appetit!	Floskeln	Essen	
Ich möchte	Phrasen	Essen	
lecker	Adjektive	Essen	
mehr	Pronomen	Essen	
mit	Präpositionen	Essen	
nicht	Adverbien	Essen	
und	Konjunktionen	Essen	
viel	Adjektive	Essen	
wenig	Adjektive	Essen	
Brot	Nomen	Essen	Frühstück
Butter	Nomen	Essen	Frühstück
Honig	Nomen	Essen	Frühstück
Joghurt	Nomen	Essen	Frühstück
Käse	Nomen	Essen	Frühstück
Marmelade	Nomen	Essen	Frühstück
Müsli	Nomen	Essen	Frühstück
Nutella	Nomen	Essen	Frühstück
Obst	Nomen	Essen	Frühstück
Wurst	Nomen	Essen	Frühstück
Fisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Fleisch	Nomen	Essen	Mittagessen
Gemüse	Nomen	Essen	Mittagessen
Kartoffeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Nachtsch	Nomen	Essen	Mittagessen
Nudeln	Nomen	Essen	Mittagessen
Reis	Nomen	Essen	Mittagessen
Soße	Nomen	Essen	Mittagessen
Suppe	Nomen	Essen	Mittagessen
Apfel	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Banane	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Birnen	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Gurke	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Paprika	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Tomate	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Weintrauben	Nomen	Essen	Obst & Gemüse
Bonbon	Nomen	Essen	Süßes
Gummibärchen	Nomen	Essen	Süßes
Kekse	Nomen	Essen	Süßes
Kuchen	Nomen	Essen	Süßes
Schokolade	Nomen	Essen	Süßes
Auto	Nomen	Fahrzeuge	
Bus	Nomen	Fahrzeuge	
fahren	Verben	Fahrzeuge	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Fahrrad	Nomen	Fahrzeuge	
Ich möchte	Phrasen	Fahrzeuge	
langsam	Adjektive	Fahrzeuge	
nicht	Adverbien	Fahrzeuge	
Schiff	Nomen	Fahrzeuge	
schnell	Adjektive	Fahrzeuge	
Zug	Nomen	Fahrzeuge	
Bagger	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Feuerwehr	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Kran	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Krankenwagen	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
Polizeiauto	Nomen	Fahrzeuge	Fahrzeuge 2
chillen	Verben	Favoriten	
einkaufen	Verben	Favoriten	
fahren	Verben	Favoriten	
feiern	Verben	Favoriten	
fernsehen	Verben	Favoriten	
gehen	Verben	Favoriten	
Ich möchte	Phrasen	Favoriten	
nicht	Adverbien	Favoriten	
reiten	Verben	Favoriten	
schlafen	Verben	Favoriten	
schwimmen	Verben	Favoriten	
spazieren	Verben	Favoriten	
Fasching	Nomen	Favoriten	Fest
Geburtstag	Nomen	Favoriten	Fest
Ostern	Nomen	Favoriten	Fest
Weihnachten	Nomen	Favoriten	Fest
Bürgerladen	Nomen	Favoriten	Orte
Eisdiele	Nomen	Favoriten	Orte
Kino	Nomen	Favoriten	Orte
Museum	Nomen	Favoriten	Orte
nach Hause	Phrasen	Favoriten	Orte
Park	Nomen	Favoriten	Orte
Schule	Nomen	Favoriten	Orte
Schwimmbad	Nomen	Favoriten	Orte
Spielplatz	Nomen	Favoriten	Orte
Supermarkt	Nomen	Favoriten	Orte
Zoo	Nomen	Favoriten	Orte
Darf ich auch?	Fragen	Fragen	
Läuft bei dir?	Fragen	Fragen	
Möchtest du?	Fragen	Fragen	
Wann?	Fragen	Fragen	
Warum?	Fragen	Fragen	
Was ist das?	Fragen	Fragen	
Was machst du?	Fragen	Fragen	
Wer bist du?	Fragen	Fragen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Wie geht's?	Fragen	Fragen	
Wo?	Fragen	Fragen	
das ist	Phrasen	Gefühle	
doof	Adjektive	Gefühle	
glücklich	Adjektive	Gefühle	
gut	Adjektive	Gefühle	
Ich bin	Phrasen	Gefühle	
krank	Adjektive	Gefühle	
lachen	Verben	Gefühle	
langweilig	Adjektive	Gefühle	
nicht	Adverbien	Gefühle	
schlecht	Adjektive	Gefühle	
toll	Adjektive	Gefühle	
traurig	Adjektive	Gefühle	
weinen	Verben	Gefühle	
wütend	Adjektive	Gefühle	
besuchen	Verben	Leute	
du	Pronomem	Leute	
gehen	Verben	Leute	
ich	Pronomem	Leute	
Ich möchte	Sätze	Leute	
komm	Verben	Leute	
mit	Konjunktionen	Leute	
nicht	Adverbien	Leute	
zu	Adverbien	Leute	
Mama	Nomen	Leute	Familie
Oma	Nomen	Leute	Familie
Opa	Nomen	Leute	Familie
Papa	Nomen	Leute	Familie
hören	Verben	Musik	
Ich möchte	Phrasen	Musik	
laut	Adjektive	Musik	
leise	Adjektive	Musik	
machen	Verben	Musik	
Musik	Nomen	Musik	
nicht	Adverbien	Musik	
singen	Verben	Musik	
spielen	Verben	Musik	
tanzen	Verben	Musik	
Flöte	Nomen	Musik	Instrumente
Gitarre	Nomen	Musik	Instrumente
Klavier	Nomen	Musik	Instrumente
Triangel	Nomen	Musik	Instrumente
Trommel	Nomen	Musik	Instrumente
Es war eine Mutter	Phrasen	Musik	Lieder
Grün ja grün	Phrasen	Musik	Lieder
Meine Oma fährt im Hüh-	Phrasen	Musik	Lieder

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
nerstall Motorrad			
Morgenkreislied	Nomen	Musik	Lieder
gießen	Verben	Natur	
haben	Verben	Natur	
heiß	Adjektive	Natur	
heute	Adverbien	Natur	
Ich möchte	Phrasen	Natur	
kalt	Adjektive	Natur	
nass	Adjektive	Natur	
nicht	Adverbien	Natur	
trocken	Adjektive	Natur	
warm	Adjektive	Natur	
Baum	Nomen	Natur	Garten
Beet	Nomen	Natur	Garten
Blume	Nomen	Natur	Garten
Busch	Nomen	Natur	Garten
Gießkanne	Nomen	Natur	Garten
Gras	Nomen	Natur	Garten
Rasenmäher	Nomen	Natur	Garten
Spaten	Nomen	Natur	Garten
Wiese	Nomen	Natur	Garten
Frühling	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Herbst	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Sommer	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Winter	Nomen	Natur	Jahreszeiten
Nebel	Nomen	Natur	Wetter
Regen	Nomen	Natur	Wetter
Schnee	Nomen	Natur	Wetter
Sonne	Nomen	Natur	Wetter
Sturm	Nomen	Natur	Wetter
Wind	Nomen	Natur	Wetter
Wolken	Nomen	Natur	Wetter
bitte	Floskeln	Plaudern	
danke	Floskeln	Plaudern	
doch	Konjunktionen	Plaudern	
Gib mir fünf	Phrasen	Plaudern	
Hallo	Floskeln	Plaudern	
Herzlichen Glückwunsch!	Phrasen	Plaudern	
Ich brauche eine Pause.	Sätze	Plaudern	
Ich brauche Hilfe.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Durst.	Sätze	Plaudern	
Ich habe Hunger.	Sätze	Plaudern	
Ich mag das nicht	Sätze	Plaudern	
Ich muss mal zur Toilette.	Sätze	Plaudern	
Ich weiß nicht	Phrasen	Plaudern	
ja	Floskeln	Plaudern	
Lass das!	Phrasen	Plaudern	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
nein	Floskeln	Plaudern	
Quatsch	Nomen	Plaudern	
Tschüss	Floskeln	Plaudern	
dann	Adverbien	Schule	
gestern	Adverbien	Schule	
heute	Adverbien	Schule	
Ich möchte	Phrasen	Schule	
lernen	Verben	Schule	
machen	Verben	Schule	
morgen	Adverbien	Schule	
nicht	Adverbien	Schule	
Aula	Nomen	Schule	Räume
Klassenraum	Nomen	Schule	Räume
Küche	Nomen	Schule	Räume
Schulhof	Nomen	Schule	Räume
Sekretariat	Nomen	Schule	Räume
Snoezelraum	Nomen	Schule	Räume
Speisesaal	Nomen	Schule	Räume
Therapieraum	Nomen	Schule	Räume
Toilette	Nomen	Schule	Räume
Turnhalle	Nomen	Schule	Räume
Einzelförderung	Nomen	Schule	Stundenplan
Ferien	Nomen	Schule	Stundenplan
Hauswirtschaft	Nomen	Schule	Stundenplan
Kunst	Nomen	Schule	Stundenplan
Lesen und Schreiben	Nomen	Schule	Stundenplan
Musik	Nomen	Schule	Stundenplan
Pause	Nomen	Schule	Stundenplan
Rechnen	Nomen	Schule	Stundenplan
Sachunterricht	Nomen	Schule	Stundenplan
Snoezelen	Nomen	Schule	Stundenplan
Sport	Nomen	Schule	Stundenplan
Werken	Nomen	Schule	Stundenplan
Datum	Nomen	Schule	Wochentage
Dienstag	Nomen	Schule	Wochentage
Donnerstag	Nomen	Schule	Wochentage
Freitag	Nomen	Schule	Wochentage
Mittwoch	Nomen	Schule	Wochentage
Montag	Nomen	Schule	Wochentage
Samstag	Nomen	Schule	Wochentage
Sonntag	Nomen	Schule	Wochentage
Wochenende	Nomen	Schule	Wochentage
draußen	Adverbien	Spielen	
drinnen	Adverbien	Spielen	
etwas anderes	Phrasen	Spielen	
haben	Verben	Spielen	
Ich möchte	Phrasen	Spielen	

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
lesen	Verben	Spielen	
mit	Präpositionen	Spielen	
nicht	Adverbien	Spielen	
spielen	Verben	Spielen	
buddeln	Verben	Spielen	Draußen
rutschen	Verben	Spielen	Draußen
schaukeln	Verben	Spielen	Draußen
Spielplatz	Nomen	Spielen	Draußen
Trampolin springen	Verben	Spielen	Draußen
Bilderbuch anschauen	Nomen	Spielen	Lesen
Drache Kokosnuss	Phrasen	Spielen	Lesen
Geschichte lesen	Phrasen	Spielen	Lesen
Pettersson und Findus	Phrasen	Spielen	Lesen
Pippi Langstrumpf	Phrasen	Spielen	Lesen
Ball	Nomen	Spielen	Spielzeug
Lego	Nomen	Spielen	Spielzeug
Memory	Nomen	Spielen	Spielzeug
Puppe	Nomen	Spielen	Spielzeug
Puzzle	Nomen	Spielen	Spielzeug
Seifenblasen	Nomen	Spielen	Spielzeug
Tablet	Nomen	Spielen	Spielzeug
Würfel	Nomen	Spielen	Spielzeug
füttern	Verben	Tiere	
groß	Adjektive	Tiere	
Ich möchte	Phrasen	Tiere	
klein	Adjektive	Tiere	
nicht	Adverbien	Tiere	
sehen	Verben	Tiere	
streicheln	Verben	Tiere	
Ente	Nomen	Tiere	Bauernhof
Huhn	Nomen	Tiere	Bauernhof
Kuh	Nomen	Tiere	Bauernhof
Pferd	Nomen	Tiere	Bauernhof
Schaf	Nomen	Tiere	Bauernhof
Schwein	Nomen	Tiere	Bauernhof
Ziege	Nomen	Tiere	Bauernhof
Fische	Nomen	Tiere	Haustiere
Hamster	Nomen	Tiere	Haustiere
Hund	Nomen	Tiere	Haustiere
Katze	Nomen	Tiere	Haustiere
Meerschweinchen	Nomen	Tiere	Haustiere
Vogel	Nomen	Tiere	Haustiere
Delfin	Nomen	Tiere	Meerestiere
Fische	Nomen	Tiere	Meerestiere
Krabbe	Nomen	Tiere	Meerestiere
Qualle	Nomen	Tiere	Meerestiere
Robbe	Nomen	Tiere	Meerestiere

Mitteilung	Wortart	Seite	Unterseite
Schildkröte	Nomen	Tiere	Meerestiere
Wal	Nomen	Tiere	Meerestiere
Affe	Nomen	Tiere	Zootiere
Elefant	Nomen	Tiere	Zootiere
Giraffe	Nomen	Tiere	Zootiere
Löwe	Nomen	Tiere	Zootiere
Apfelschorle	Nomen	Trinken	
Cola	Nomen	Trinken	
genug	Adjektive	Trinken	
Ich möchte	Phrasen	Trinken	
Kakao	Nomen	Trinken	
leer	Adjektive	Trinken	
mehr	Pronomen	Trinken	
Milche	Nomen	Trinken	
mit	Präpositionen	Trinken	
nicht	Adverbien	Trinken	
Prost	Floskeln	Trinken	
Saft	Nomen	Trinken	
Tee	Nomen	Trinken	
trinken	Verben	Trinken	
und	Konjunktionen	Trinken	
voll	Adjektive	Trinken	
Wasser	Nomen	Trinken	
Ich bin...Jahre alt	Sätze	über mich	
Ich heiße...	Sätze	über mich	
Ich mag nicht...	Sätze	über mich	
Ich mag...	Sätze	über mich	
Ich wohne in...	Sätze	über mich	



Prentke Romich Deutschland
Unterstützte Kommunikation

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D-34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
eMail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de