



NovaChat® 12 Handleiding

NovaChat 12.1 | Model NC12.1 | Apparaten Met en Zonder Eigen Systeem

Informatie over copyright en handelsmerken

© 2024 PRC-Salttillo. Niet-commerciële herdrukrechten voor klinisch of persoonlijk gebruik worden met vermelding van de copyrightkennisgeving verleend. Commercieel gebruik is niet toegestaan; dit product mag niet worden doorverkocht. Neem contact op met PRC-Salttillo voor vragen over toelaatbaar gebruik van het product.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRiO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, VersaChat™, VersaEye™, VersaSpeaker™, VersaWrap™, Via®, VocabPC™, en Xtreme™ zijn handelsmerken van PRC-Salttillo.

Acapela Group® en my-own-voice™ zijn handelsmerken van Acapela Group. Acapela Group, Copyright 2024. Alle rechten voorbehouden. Met toestemming gebruikt. De text-to-speech-technologie van Acapela en de digitale stemmen van deze software worden gratis verstrekt voor toepassing door de eindgebruiker. Deze mogen echter uitsluitend voor communicatiedoeleinden worden gebruikt en mogen niet voor winstdoeleinden worden verkocht, gekopieerd of anderszins geëxploiteerd.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID®, and TrueDepth® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*® zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dergelijke merken door PRC-Salttillo valt onder een licentie.

CAVIWIPES™ is een handelsmerk van Metrex Research LLC.

Dropbox® is een geregistreerd handelsmerk van Dropbox, Inc.

Google™, Google Docs™, Google Drive™, Google Play™, Android™, Chromebook™, Gmail™, en YouTube™ zijn handelsmerken van Google Inc.

Intel®, het Intel-logo, Intel® Core™, en Celeron® zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen.

iOS® is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Ivona wordt geleverd door ReadSpeaker.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

My QuickChat™ valt onder het auteursrecht van Talk To Me Technologies.

PCS® is een handelsmerk van Tobii Dynavox LLC. Alle rechten voorbehouden. Met toestemming gebruikt.

Samsung® en Galaxy Tab® zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics America, Inc.

De symbolen die gebruikt zijn in dit document zijn eigendom van n2y, LLC. Gebruikt met toestemming onder licentie. © 2024.

TIK TOK is een handelsmerk van Bytedance Ltd.

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro BVBA.

VocaliD™ is een handelsmerk van VocaliD, Inc.

The Voice Keeper en Almagu zijn intellectueel eigendom van Almagu.

WHATSAPP is een handelsmerk van WHATSAPP LLC.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Windex® is een geregistreerd handelsmerk van of S. C. Johnson & Son, Inc.

WordPower® is een handelsmerk van Inman Innovations, Inc. © 2001-2024; Alle rechten voorbehouden. Met toestemming gebruikt.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Documentversie

DOC100267v100 · 16 november 2024 · Nederlands

Van toepassing op model NC12.1; apparaten met en zonder eigen systeem

Inhoudsopgave

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Welkom bij NovaChat..... | 4 |
| Funcities..... | 5 |
| Het apparaat in- en uitschakelen | 7 |
| Het scherm voor dagelijks gebruik in- en uitschakelen..... | 7 |
| De versterker in- en uitschakelen | 8 |
| Bluetooth in- en uitschakelen..... | 9 |
| De Airplane mode (Vliegtuigmodus) inschakelen..... | 10 |
| Het volume instellen | 11 |
| De steun uitklappen | 12 |
| Het handvat verwijderen of vervangen | 13 |
| De rolstoelmontageplaat vervangen..... | 14 |
| Een draagriem met lussen bevestigen | 15 |
| Een draagriem met metalen ringen bevestigen | 16 |
| Het aanraakscherm gebruiken..... | 17 |
| Het apparaat opladen | 18 |
| Uw apparaat reinigen en desinfecteren..... | 20 |
| Rutinereiniging en -desinfectie | 20 |
| Het apparaat desinfecteren bij gebruik door meer personen..... | 20 |
| Zorg en onderhoud..... | 21 |
| Probleemoplossing..... | 22 |
| Veiligheidsinformatie | 24 |
| Informatie over conformiteit..... | 28 |
| Contactinformatie | 32 |

Welkom bij NovaChat

Deze informatie wordt aan u verstrekt om u te helpen bij het installeren en gebruiken van uw NovaChat®-apparaat. Er is aanvullende informatie en ondersteuning beschikbaar.

De gebruikershandleiding voor de chatsoftware is te vinden op de website van Saltillo:

<https://saltillo.com/support/downloads>

Voor ondersteunend materiaal gaat u naar de website van Saltillo:

<http://saltillo.com/support/>

Voor informatie over trainingsmogelijkheden gaat u naar de website van Saltillo:

<http://saltillo.com/webinars>

Operationele en technische ondersteuning:

Als u hulp nodig hebt bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw NovaChat-apparaat, of als u problemen ondervindt, kunt u per telefoon of e-mail contact met ons opnemen.

Telefoon: 1-800-382-8622

E-mail: service@saltillo.com


Trouble Tickets (Probleemtickets):

<http://saltillo.com/tt/>

Versie Chat-software:

Ga naar **Menu > Help > Updates zoeken** om de versie van de op uw apparaat geïnstalleerde Chat-software te bekijken. Het versienummer verschijnt boven de voortgangsbalk voor updates.

2.21

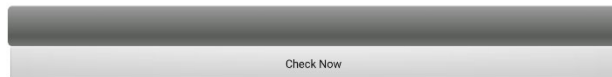

Functies

Voorzijde



1 Aan-/uitknop

Druk op de knop en houd deze ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen

2 Volumeknop

Druk op de knop om het volume te verhogen of te verlagen

3 Handvat

4 USB-poort

Sluit een USB-kabel aan om het apparaat op te laden of vocabulaires over te zetten

5 Terug

Tik hierop om naar het vorige scherm of menu terug te gaan.

Apparaten zonder eigen systeem: Druk de toets in en houd deze ingedrukt om een optie voor het sluiten van de applicatie weer te geven.

6 Thuis

Druk op deze knop om naar het Android-thuis scherm te gaan.

Apparaten met een eigen systeem: De knop Home (Thuis) werkt niet op een apparaat met een eigen systeem.

7 Menu

Tik op deze toets om menu's weer te geven waarin u een vocabulairebestand kunt selecteren, opties voor augmentatieve communicatie kunt instellen en uiteenlopende andere opties kunt configureren.

8 Scherm

Geeft de applicatieschermen weer

Zij- en achteraanzicht



1 USB-poort voor het opladen van het apparaat of het overzetten van vocabulaires

2 Oplaadpoort van de versterker, led

3 Schakelaaraansluiting A

4 Schakelaaraansluiting B

5 Hoofdtelefoonaansluiting

6 Aan-/uitknop van de versterker, led

7 Handvat

8 USB-poort voor een USB-muis of toetsenbord

Apparaten met een eigen systeem: Bij een apparaat met een eigen systeem kunt u niet van een USB-muis of toetsenbord gebruikmaken.

9 Rolstoelmontageplaat

Als u de rolstoelmontageplaat moet vervangen, raadpleegt u "De rolstoelmontageplaat vervangen: NovaChat 12".

10 Steun

Het apparaat in- en uitschakelen

De aan-/uitknop bevindt zich aan de zijkant van het apparaat.



Uw apparaat inschakelen als deze volledig uitgeschakeld is:

Druk de aan-/uitknop in en houd de knop ingedrukt.

Uw apparaat voor opbergen uitschakelen:

1. Druk de aan-/uitknop in en houd de knop ingedrukt.
2. Kies **Power Off** (Voeding uitschakelen) in de prompt.
3. Bevestig met **OK**.

Opmerking: De versterker hoeft niet te worden uitgeschakeld als het apparaat dagelijks wordt gebruikt. Als u in een omgeving bent waarin u de versterker moet uitschakelen, of als u het apparaat gedurende een langere periode opbergt, raadpleegt u "De versterker in- en uitschakelen".

Belangrijk! Opgeborgen apparaten dienen elke zes maanden te worden opgeladen.

Het scherm voor dagelijks gebruik in- en uitschakelen

Als u het apparaat dagelijks gebruikt, tikt u kort op de aan-/uitknop—niet ingedrukt houden—om alleen het scherm aan- en uit te zetten.

Het scherm inschakelen

Er zijn drie manieren om het scherm in te schakelen nadat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt om de slaapstand van het apparaat in te schakelen, of nadat het apparaat automatisch na een periode van inactiviteit werd uitgeschakeld.

Optie #1: Druk kort op de aan-/uitknop.

Optie #2: Druk op een op het apparaat aangesloten schakelaar.

Dubbeltikken om het scherm te activeren is standaard ingeschakeld in de Android-instellingen. Als u deze instelling moet uitschakelen of opnieuw inschakelen, opent u de Android-instellingen en selecteert u **Geavanceerde functies** en vervolgens **Bewegingen en gebaren**. Zoek de instelling "Dubbeltik om het scherm in te schakelen" en tik op de aan/uit-knop om de instelling in of uit te schakelen.

De versterker in- en uitschakelen

De versterker moet doorgaans ingeschakeld zijn. Als de versterker wordt uitgeschakeld, is spraak nog steeds beschikbaar, maar komt het geluid uit de interne speaker van het apparaat.



De aan-/uitknop van de versterker (op sommige apparaten gemarkeerd met "I/O") is in de behuizing verzonken. Gebruik de punt van een pen als u de knop wilt indrukken. Gebruik hiervoor **niet** een object met een scherpe punt, zoals een speld; dit kan de knop beschadigen.

De versterker uitschakelen:

Druk op aan-/uitknop van de versterker en houd deze ingedrukt tot het oranje en blauwe lampje gaan branden. Laat vervolgens de knop los.

De versterker inschakelen:

Druk gedurende een seconde op de aan-/uitknop van de versterker. Het lampje licht op; dit betekent dat de versterker ingeschakeld is en naar behoren werkt.

Het blauwe lampje licht op als de versterker ingeschakeld is en niet op het apparaat aangesloten is. Als de versterker op het apparaat aangesloten is, blijft het blauwe lampje branden.



De versterker opnieuw op uw apparaat aansluiten:

Zorg ervoor dat de versterker ingeschakeld en opgeladen is. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Het apparaat zoekt uw versterker en maakt opnieuw verbinding.

Bluetooth in- en uitschakelen

Tijdens een vliegreis en in sommige medische instellingen kan het verplicht zijn om Bluetooth op uw apparaat uit te schakelen. Hoe u Bluetooth uitschakelt, is afhankelijk van de Android-versie op uw apparaat. De volgende opties zijn mogelijk niet op uw apparaat beschikbaar.



Bluetooth uitschakelen:

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Het pictogram Bluetooth duidt aan dat Bluetooth ingeschakeld is . Tik op het pictogram om Bluetooth uit te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Bluetooth** in het linkerpaneel. De instelling in het rechterpaneel is ingeschakeld. Tik op de instelling om deze uit te schakelen.

Optie #3: Druk de aan-/uitknop van het apparaat in en houd de knop ingedrukt. Tik op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus). Hierdoor wordt de Airplane mode (Vliegtuigmodus) van het apparaat ingeschakeld en wordt Bluetooth uitgeschakeld.

Bluetooth inschakelen:

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Het pictogram Bluetooth geeft weer dat Bluetooth uitgeschakeld is . Tik op het pictogram om Bluetooth in te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Bluetooth** in het linkerpaneel. De instelling in het rechterpaneel is uitgeschakeld. Tik op de instelling om deze in te schakelen.


Optie #3: Druk op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt. Tik op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus). Hierdoor wordt de Airplane mode (Vliegtuigmodus) van het apparaat uitgeschakeld en Bluetooth ingeschakeld.


Aanvullende ondersteuning voor Bluetooth:

Het apparaat biedt ook ondersteuning voor Bluetooth-schakelaars.

De Airplane mode (Vliegtuigmodus) inschakelen

Tijdens een vliegreis en in sommige medische instellingen kan het verplicht zijn om de Airplane mode (Vliegtuigmodus) van uw apparaat in te schakelen. Hoe u de Airplane mode (Vliegtuigmodus) inschakelt, is afhankelijk van de Android-versie op uw apparaat. De volgende opties zijn mogelijk niet op uw apparaat beschikbaar.


Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Het pictogram Airplane mode (Vliegtuigmodus) duidt aan dat de vliegtuigmodus uitgeschakeld is .


Tik op het pictogram om de Airplane mode (Vliegtuigmodus) in te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) in het linkerpaneel. De instelling in het rechterpaneel is uitgeschakeld. Tik op de instelling om deze in te schakelen.

Optie #3: Druk de aan-/uitknop van het apparaat in en houd de knop ingedrukt. De Airplane mode (Vliegtuigmodus) geeft het bericht "Airplane mode is OFF" (Vliegtuigmodus is uitgeschakeld) weer. Tik op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus). Het bericht "Airplane mode is ON" (Vliegtuigmodus is ingeschakeld) verschijnt.

De Airplane mode (Vliegtuigmodus) uitschakelen:

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Het pictogram Airplane mode (Vliegtuigmodus) duidt aan dat de vliegtuigmodus ingeschakeld is .

Tik op het pictogram om de Airplane mode (Vliegtuigmodus) uit te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) in het linkerpaneel. De instelling in het rechterpaneel is ingeschakeld. Tik op de instelling om deze uit te schakelen.

Optie #3: Druk de aan-/uitknop van het apparaat in en houd de knop ingedrukt. De vliegtuigmodus geeft de melding "Airplane mode is ON" (Vliegtuigmodus is ingeschakeld) weer. Tik op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus). Het bericht "Airplane mode is OFF" (Vliegtuigmodus is uitgeschakeld) verschijnt.

Het volume instellen



Het wordt afgeraden om gedurende een langere periode via een oortelefoon naar geluid met een te hoog volume te luisteren om eventuele gehoorschade te voorkomen.

De volumeknoppen bevinden zich aan de rand van het apparaat.

Druk op de uiteinden van de knop om het volume te verhogen of te verlagen.



U kunt als aanvulling op de volumeknop ook volume-instellingen aan toetsen in vocabulairepagina's toevoegen. Raadpleeg "Een toetsactie toevoegen of wijzigen" op pagina **Error! Bookmark not defined.** voor meer informatie.

De versterker is meegeleverd om het volume te kunnen verhogen. De versterker werkt op een afzonderlijke accu en moet opgeladen en ingeschakeld zijn om geluid te kunnen produceren. De versterker communiceert met het apparaat via een Bluetooth-verbinding. Als de verbinding tussen de twee apparaten wordt verbroken, wordt het geluid uitsluitend door de luidsprekers van het apparaat voortgebracht. Dit geluid is mogelijk in uw omgeving niet voldoende.

De versterker opnieuw op uw apparaat aansluiten: Zorg ervoor dat de versterker ingeschakeld en opgeladen is. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Het apparaat zoekt uw versterker en maakt opnieuw verbinding.

De steun uitklappen

Op de volgende wijze kunt u het apparaat zo neerzetten dat u het scherm gemakkelijk kunt zien:

1. Leg het apparaat met het scherm naar beneden gericht op een vlak oppervlak.
2. Terwijl u uw duim op de rand van het apparaat aan de onderzijde van de steun houdt, drukt u met het puntje van uw wijsvinger (of meerdere vingers) op de **binnenzijde** van de steun en trekt u de steun **uit** de vergrendeling.



3. Trek de steun van de achterkant van het apparaat vandaan ...



4. tot de poten op hun plaats in de vergrendeling vallen.



Het handvat verwijderen of vervangen

Als u niet van plan bent om het handvat te gebruiken, kunt u het verwijderen door de schroeven los te draaien die het handvat op zijn plaats houden.



Als de schroeven losgedraaid zijn, kunnen de schroeven een gevaar voor verstikking vormen.


Als u het handvat vervangt, lijnt u de uiteinden van het nieuwe handvat met de schroefgaten aan de bovenzijde van het apparaat uit. Plaats de schroeven vervolgens in de schroefgaten op elk uiteinde en draai ze vast.

De rolstoelmontageplaat vervangen

Uw NovaChat 12-apparaat wordt inclusief een gemonteerde rolstoelmontageplaat geleverd. Als u de plaat moet vervangen, volgt u deze instructies:

1. Leg het apparaat met het scherm naar beneden gericht op een vlak oppervlak. Let erop dat u geen krassen op het scherm maakt.
2. Draai de drie schroeven van de oude montageplaat los en verwijder de plaat van de achterzijde van het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de drie taps toelopende openingen in de nieuwe montageplaat met de drie gaten met schroefdraad aan de achterzijde van het apparaat uitgelijnd zijn.

Belangrijk! Zorg ervoor dat de plaat zo georiënteerd is dat de extra opening voor de vergrendelpin zich linksboven bevindt.

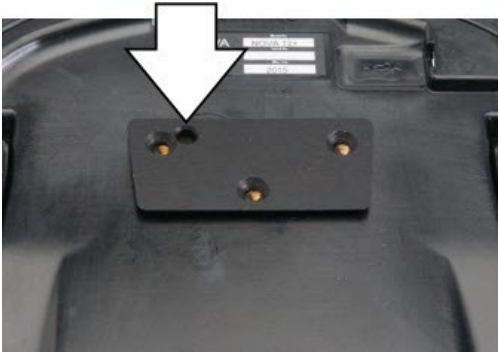

4. Plaats de schroeven in de gaten met schroefdraad en draai de schroeven vast.



Zorg ervoor dat de oude montageplaat en schroeven veilig worden bewaard of afgevoerd. Losse schroeven kunnen een gevaar voor verstikking vormen.

Een draagriem met lussen bevestigen

Bevestig een draagriem aan uw apparaat, zodat u het niet in uw handen hoeft te dragen. Voor uw gemak is het apparaat van vier draagriemhouders voorzien – één houder op elke hoek van het handvat, of twee houders op het handvat en de andere twee vlak bij de onderzijde van het apparaat.



Als er bij uw draagriem lussen meegeleverd zijn, maakt u deze aan de daarvoor bestemde houders vast. Bevestig de draagriem niet rechtstreeks aan de kunststof behuizing; dit kan het apparaat beschadigen.



De lussen kunnen een gevaar voor verstikking vormen. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan. Draagriemen kunnen een gevaar voor verstrikking of wurging vormen. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van deze onderdelen bij gebruikers van het apparaat.

Opmerking: Als de draagriemhouders zich op de hoeken van uw apparaat bevinden, maakt u de lussen op de hieronder weergegeven manier vast.

Stap 1: Haal het uiteinde van de lus door de opening in de behuizing.




Stap 2: Haal de metalen ring door de lus.



Stap 3: Trek aan de metalen ring om de lus aan te trekken. Herhaal stap 1-3 voor de andere lus.



Stap 4: Klik de draagriem aan de metalen ringen vast.

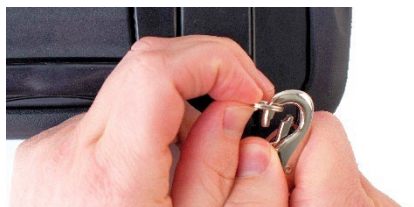


Een draagriem met metalen ringen bevestigen

Bevestig een draagriem aan uw apparaat, zodat u het niet in uw handen hoeft te dragen. Voor uw gemak is het apparaat van vier draagriemhouders voorzien – één houder op elke hoek van het handvat, of twee houders op het handvat en de andere twee vlak bij de onderzijde van het apparaat.



De metalen ringen kunnen een gevaar voor verstikking vormen. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan. Draagriemen kunnen een gevaar voor verstikking of wurging vormen. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van deze onderdelen bij gebruikers van het apparaat.

Stap 1: Open de ring zoals u een sleutelring zou openen. *Suggesties:* Gebruik uw vingernagel, een schroevendraaier of een muntje.

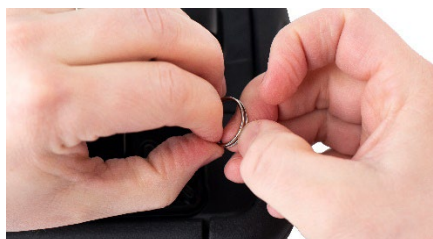

Stap 2: Haal de open ring om de houder in de behuizing.



Stap 3: Zorg ervoor dat u de ring volledig om de houder haalt. Herhaal stap 1-3 voor de andere ring.



Stap 4: Klik de draagriem aan de ringen vast.



Het aanraakscherm gebruiken

Belangrijk! Als u overmatige kracht uitoefent of een metalen object gebruikt om op het aanraakscherm te drukken, kan het oppervlak van gehard glas beschadigen.

Bij uw apparaat wordt een capacitief aanraakscherm meegeleverd. Het aanraakscherm reageert het best op een lichte aanraking met uw vinger. U kunt ook van de eveneens bij uw apparaat meegeleverde stylus gebruikmaken.



Opmerking: De meegeleverde stylus heeft een opening aan het uiteinde waarmee u de stylus aan uzelf of het apparaat kunt bevestigen met behulp van een kettinkje, touwtje of koord.








De stylus kan een steekgevaar voor de ogen vormen.

Het apparaat opladen

We raden u aan het apparaat en de versterker elke nacht op te laden. Een acculader is in de verpakking van uw apparaat meegeleverd.



Met de oplaadkabels kunt u het apparaat en de versterker tegelijk opladen.

-  Gebruik uitsluitend de bij uw apparaat meegeleverde acculader.
-  Snoeren en kabels kunnen een gevaar voor verstrikking of wurging vormen. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van deze onderdelen bij gebruikers van het apparaat.
-  Controleer regelmatig visueel kabels, snoeren en connectoren op beschadiging of slijtage, vooral wanneer ze aan overbelasting onderhevig zijn. Kabels en snoeren kunnen door overmatig gebruik of door ouderdom gerafeld of beschadigd raken. Een gerafelde kabel kan bijvoorbeeld kortsluiting veroorzaken in een acculader/stroomadapter, wat gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker. Als een kabel, snoer of connector beschadigd of versleten is, bel dan naar de klantendienst om deze te laten vervangen.
-  Plaats het apparaat tijdens het opladen op een veilige plek.
-  Accu's van versterkers en tablets kunnen niet door de klant worden vervangen.

De oplader en kabels aansluiten:

1. Tik op de aan-/uitknop van het apparaat om het scherm uit te schakelen.
2. Sluit de oplader op een stopcontact aan – het wordt aanbevolen om een stopcontact met piekspanningsbeveiliging te gebruiken.
3. Sluit de miniconnector op de mini-USB-poort op de behuizing van de versterker aan en sluit de microconnector op de micro-USB-poort op het apparaat aan.
4. Het indicatielampje van de accu naast de accu-aansluiting van de versterker knippert tijdens het opladen en brandt ononderbroken als deze volledig opgeladen is.



NovaChat 12: bijzonderheden

USB-oplaadpoort (achterzijde van het apparaat naar boven gericht)



Als u een USB 2.0-microkabel op de poort aansluit (met de achterzijde van het apparaat naar boven gericht), moet de connector in het linkergeedeelte van de poort worden gestoken. De connector neemt *niet* de gehele poort in beslag.



Als u een USB 3.0-micro-B-kabel op de poort aansluit, neemt de connector de gehele poort in beslag.



Als het apparaat en de versterker volledig opgeladen zijn:

1. Koppel de connectoren los van het apparaat en de versterker.
2. Koppel de oplader los van het stopcontact (optioneel).
3. Tik op de aan-/uitknop van het apparaat om het scherm in te schakelen.

Uw apparaat reinigen en desinfecteren

Houd het apparaat schoon en gedesinfecteerd om het optimale uit uw apparaat te halen. Als uw apparaat door één persoon wordt gebruikt, is een routinematige reinigings en -desinfectiebeurt voldoende. Als het apparaat echter door meerdere personen wordt gebruikt, moet u aanvullende maatregelen nemen om het apparaat na gebruik door een persoon te reinigen en desinfecteren alvorens de volgende persoon het kan gebruiken.

Routinereiniging en -desinfectie

Schakel het apparaat uit en gebruik een zachte, pluisvrije, vochtige doek om de behuizing en het scherm van uw apparaat schoon te vegen en een andere zachte, pluisvrije doek om te drogen. *Spat geen water rechtstreeks op het apparaat.* Bevochtig een schone doek met een oplossing van 1/4 kop azijn en 1 kop water om de behuizing te desinfecteren. *Breng azijn en water niet rechtstreeks op het scherm aan.*

Het apparaat desinfecteren bij gebruik door meer personen

Opmerking: Dit gedeelte is uitsluitend van toepassing als meerdere personen van hetzelfde apparaat gebruikmaken. In deze situatie is het belangrijk om het apparaat en de accessoires die door een persoon gebruikt zijn grondig te desinfecteren, voordat het apparaat door een ander persoon wordt vastgepakt en gebruikt.

Eerste stap: Beschermende handschoenen aantrekken

Volgende stap: Het apparaat en de accessoires reinigen

1. Veeg het apparaat en de accessoires schoon met desinfectiedoekjes (Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, Fungicidal) – Metrex CaviWipes™. Volg de desinfectie-instructies van de fabrikant met betrekking tot het *reinigen* van producten.
2. Neem een wattenstaafje waarop een reinigingsmiddel aangebracht is (bijvoorbeeld Windex® of een ander commercieel reinigingsmiddel) en reinig alle openingen en spleten. Een tandenborstel of vergelijkbare borstel kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
3. Blaas het apparaat met een luchtslang droog of veeg het droog.
Belangrijk! Zorg ervoor dat al het vuil van het apparaat en de accessoires verwijderd is. Dit is een belangrijke stap voordat u met de desinfectie van de apparatuur verdergaat.

Volgende stap: Het apparaat en de accessoires desinfecteren

1. Veeg het apparaat en de accessoires schoon met een nieuw desinfectiedoekje (Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, Fungicidal) – Metrex CaviWipes. Volg de desinfectie-instructies van de fabrikant met betrekking tot het *desinfecteren* van producten.
2. Zorg ervoor dat u in alle spleten en hoeken reinigt en veeg indien nodig herhaaldelijk met het doekje over het apparaat om het apparaat gedurende minimaal drie (3) minuten vochtig te houden.
3. Laat het apparaat en de accessoires drogen.

Laatste stap: Het aanraakscherm schoonvegen

1. Als het apparaat en de accessoires droog zijn, veegt u het weergavegebied (aanraakscherm, afdekraster enzovoorts) met een glasreiniger schoon, zodat het scherm niet verkleurt.
2. Laat de apparatuur drogen.

Het apparaat voor reiniging demonteren

Draai de schroeven aan de achterkant van het apparaat niet los; deze houden het harde kunststof frame en de achteromslag op hun plaats. Als u deze schroeven losdraait, wordt het apparaat vatbaar voor schade door stoten of opspattend water. Het verwijderen van de geïntegreerde versterker en luidsprekers heeft een afname van het volume tot gevolg. Op sommige apparaten legt u op deze manier kwetsbare bedradingen bloot. Zelfs als u het apparaat opnieuw in elkaar zet, kunnen essentiële onderdelen beschadigd raken en is het apparaat niet meer waterdicht.

Zorg en onderhoud

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik tijdens gangbare communicatie-omstandigheden. Het is niet waterdicht, dus wees uiterst voorzichtig als u het apparaat in de buurt van water gebruikt. Net als de meeste elektronische apparaten mag u dit apparaat *nooit* gebruiken als u zich in het water bevindt (bijvoorbeeld in een zwembad of bad).

Raadpleeg "Uw apparaat reinigen en desinfecteren" op pagina 18 voor informatie over hoe u uw apparaat kunt reinigen en desinfecteren.

Gebruik uitsluitend de met uw apparaat meegeleverde wisselstroomoplader om het apparaat op te laden. De accu van het apparaat is niet vervangbaar door de gebruiker. Het systeem moet aan PRC-Salttillo voor onderhoud worden geretourneerd.

Elektronische onderdelen van uw apparaat mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden vervangen en gerepareerd. Voor het aanvragen van retourautorisatie voordat u onderdelen aan PRC-Salttillo retourneert, belt u 1-800-382-8622 of stuurt u een e-mail naar service@salttillo.com.

Verzendadres (Voor klanten in de V.S.):

PRC-Salttillo
Attn: (Retourautorisatienummer hier invoegen)
1022 Heyl Road
Wooster, OH 44691

Voor klanten buiten de V.S.: Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor informatie over reparatie.

Voer het apparaat en alle bijbehorende elektronische onderdelen volgens de plaatselijke voorschriften af.

Klanten in Europa dienen de WEEE- en Europese accurichtlijnen bij de afvoer van onderdelen in acht te nemen.



Probleemoplossing

Het apparaat produceert geen geluid meer. / De versterker produceert geen geluid meer. / Het geluid komt uitsluitend uit de luidsprekers van het apparaat.

Mogelijk is de Airplane mode (Vliegtuigmodus) ingeschakeld, het geluid van het apparaat uitgeschakeld, of de Bluetooth-verbinding met de versterker verbroken. Hoe u de Airplane mode (Vliegtuigmodus), het geluid van het apparaat en Bluetooth controleert is afhankelijk van de Android-versie op uw apparaat. De volgende opties zijn mogelijk niet op uw apparaat beschikbaar.

De instelling voor Airplane mode (Vliegtuigmodus) controleren

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Als het pictogram Airplane mode (Vliegtuigmodus) weergeeft dat de Airplane mode

(Vliegtuigmodus) ingeschakeld is , tikt u op het pictogram om de Airplane mode (Vliegtuigmodus) uit te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) in het linkerpaneel. Als in het rechterpaneel wordt weergegeven dat de instelling ingeschakeld is, tikt u op de instelling om deze uit te schakelen.

Optie #3: Druk de aan-/uitknop van het apparaat in en houd de knop ingedrukt. Als de vliegtuigmodus de melding "Airplane mode is ON" (Vliegtuigmodus is ingeschakeld) weergeeft, tikt u op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) om deze in te schakelen. Het bericht "Airplane mode is OFF" (Vliegtuigmodus is uitgeschakeld) verschijnt.



De geluidsinstellingen van het apparaat controleren

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Als het pictogram Mute (Dempen) wordt weergegeven, tikt u erop zodat het in het pictogram **Sound** (Geluid) verandert.

Optie #2: Open de **Instellingen** voor Android en selecteer **Sound** (Geluid) in het linkerpaneel. Als de instelling van de modus Sound (Geluid) in het rechterpaneel aangeeft dat het geluid wordt gedempt, selecteert u **Sound** (Geluid).

Optie #3: Druk de aan-/uitknop van het apparaat in en houd de knop ingedrukt. Als de Silent mode (Stille modus) het bericht "Sound is OFF" (Geluid is uitgeschakeld) weergeeft, tikt u op **Silent mode** (Stille modus) om het geluid in te schakelen.

De Bluetooth-instellingen van het apparaat controleren

Optie #1: Ga naar de Android-thuispagina en veeg met uw vinger van bovenaan het scherm naar beneden. Op sommige apparaten kan het nodig zijn om twee keer met uw vinger naar beneden te vegen. Het pictogram Bluetooth geeft weer dat Bluetooth uitgeschakeld is . Tik op het pictogram om Bluetooth in te schakelen .

Optie #2: Open de **Settings** (Instellingen) voor Android en selecteer **Bluetooth** in het linkerpaneel. De instelling in het rechterpaneel is uitgeschakeld. Tik op de instelling om deze in te schakelen.

Optie #3: Druk op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt. Tik op **Airplane mode** (Vliegtuigmodus). Hierdoor wordt de Airplane mode (Vliegtuigmodus) van het apparaat uitgeschakeld en Bluetooth ingeschakeld.

Het apparaat maakt geen verbinding met de versterker

Controleer of de verbinding ingeschakeld is door **Menu > Instellingen > Systeem > Bluetoothinstellingen** te kiezen en te controleren of **Gebruik met versterker** geselecteerd is.

Als het apparaat nog steeds geen verbinding maakt: Kies **Menu > Instellingen > Systeem > Bluetoothinstellingen > Met versterker verbinden**.

Het apparaat geeft alle beschikbare versterkers in een lijst weer. De naam van elke versterker bevat het serienummer van de versterker, zodat u deze gemakkelijker kunt identificeren. Controleer het serienummer op de versterker en zoek in de lijst de naam van de versterker die dit serienummer bevat. Kies de versterker die u wilt gebruiken. Het apparaat brengt een verbinding met de door u gekozen versterker tot stand.

Het apparaat resetten

Als u het apparaat moet resetten, kunt u een 'soft reset' proberen door de aan-/uitknop uit en weer in te schakelen. Een 'hard reset' wordt **niet** aanbevolen.

Geen spraak

Controleer de volumeregeling aan de zijkant van het apparaat.

Veiligheidsinformatie

Noodgevallen

- ⚠ Dit apparaat is niet bedoeld om als apparaat voor noodoproepen of als het enige communicatiehulpmiddel te worden gebruikt.

Modifications

- ⚠ Probeer het apparaat of accessoires niet te wijzigen. Wijzigingen kunnen een veiligheidsrisico vormen en de apparatuur onbruikbaar maken.

Reiniging en onderhoud

- ⚠ Als het apparaat in gebruik is, mag u geen onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Koppel de oplader los en schakel het apparaat uit voordat u het apparaat reinigt of desinfecteert.
- ⚠ Draai de schroeven aan de achterkant van het apparaat niet los; deze houden het harde kunststof frame en de achteromslag op hun plaats. Als u deze schroeven losdraait, wordt het apparaat vatbaar voor schade door stoten of opspattend water. Het verwijderen van de geïntegreerde versterker en luidsprekers heeft een afname van het volume tot gevolg. Op sommige apparaten legt u op deze manier kwetsbare bedradingen bloot. Zelfs als u het apparaat opnieuw in elkaar zet, kunnen essentiële onderdelen beschadigd raken en is het apparaat niet meer waterdicht.

Schade

- ⚠ Als uw apparaat of een accessoire beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat om mogelijk letsel te voorkomen, bel de servicedienst voor hulp en stuur het beschadigde artikel ter reparatie terug naar de serviceafdeling. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren.

Accessoires

- ⚠ Gebruik geen accessoires, afneembare onderdelen of materialen die niet in deze gebruikershandleiding beschreven zijn.
- ⚠ Gebruik accessoires, afneembare onderdelen of materialen niet op enige andere dan in deze gebruikershandleiding beschreven manier.

Montage en plaatsing

- ⚠ Alle onderdelen dienen door een daarvoor bevoegd persoon te worden gemonteerd. Als het montagesysteem niet volgens de instructies van de fabrikant wordt gemonteerd, kan dit letsel bij de gebruiker tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat het zicht van de gebruiker niet door het montagesysteem wordt belemmerd.
- ⚠ De juiste plaatsing van het apparaat dient door een daartoe bevoegd persoon te worden geanalyseerd om RSI-gerelateerde klachten bij de gebruiker te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat u uw apparaat en telefoon tijdens het typen van berichten op een veilige manier gebruikt. Typ geen berichten terwijl u met iets anders bezig bent. Raadpleeg de gebruikersinstructies van de fabrikant bij de telefoon voor informatie over een veilige montage en plaatsing van het apparaat.

Gezichtsvermogen en gehoor

- ⚠ De gesprekspartner dient ervoor te zorgen dat de gebruiker regelmatig een pauze neemt om vermoeidheid van de ogen te voorkomen.
- ⚠ Raadpleeg een oogheekundige over voor de gebruiker relevante overwegingen met betrekking tot de plaatsing van het apparaat.
- ⚠ Een te hoog volume of geluidsdrumniveau bij het beluisteren via een oor- of hoofdtelefoon kan langdurig gehoorverlies tot gevolg hebben. Stel het volume op een laag niveau in en verhoog het zodanig dat het geluidsniveau op een voor u comfortabel niveau ingesteld is.

Poorten en aansluitingen

- ⚠ Houd de poorten van het toestel en de kabelaansluitingen schoon, zodat ze optimaal contact maken en de levensduur van uw toestel kunnen maximaliseren. Vuile kabelaansluitingen brengen de verontreiniging over op de contrastekker op het toestel en kunnen de prestaties nadelig beïnvloeden.
- ⚠ Als uw apparaat aan water blootgesteld is, dienen alle USB-poorten volledig droog te zijn voordat er een USB-kabel op wordt aangesloten. Schud het apparaat enkele keren met de USB-poort naar beneden gericht en veeg het apparaat vervolgens met een microvezeldoekje droog om vocht uit de USB-poorten te verwijderen. Controleer de USB-poorten opnieuw. Als in een USB-poort nog steeds vocht zichtbaar is, dient u het apparaat nogmaals te schudden en droog te vegen.
- ⚠ Probeer niet een aansluiting in een poort te forceren. Zorg ervoor dat u de aansluiting in de juiste poort steekt en dat u de aansluiting zo draait dat die overeenkomt met de richting van de poort.

Kleine onderdelen, snoeren, kabels en draagriemen

- ⚠ Snoeren, kabels en draagriemen kunnen een gevaar voor verstrikking of wurging vormen. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van deze onderdelen bij gebruikers van het apparaat.
- ⚠ Controleer regelmatig visueel kabels, snoeren en connectoren op beschadiging of slijtage, vooral wanneer ze aan overbelasting onderhevig zijn. Kabels en snoeren kunnen door overmatig gebruik of door ouderdom gerafeld of beschadigd raken. Een gerafelde kabel kan bijvoorbeeld kortsluiting veroorzaken in een acculader/stroomadapter, wat gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker. Als een kabel, snoer of connector beschadigd of versleten is, bel dan naar de klantendienst om deze te laten vervangen.
- ⚠ Houd bij het loskoppelen van de kabel of het snoer de connector vast, en niet de kabel of het snoer zelf, om schade of slijtage te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat u de kabels altijd conform de instructies in deze handleiding gebruikt, ook tijdens het opladen en bij het overzetten van vocabulaires.
- ⚠ Kleine onderdelen kunnen onder meer een gevaar voor verstikking vormen.
- ⚠ Als de steun wordt verwijderd, kan deze eventueel een steekgevaar voor de ogen vormen. Bewaar de steun op een veilige plek.
- ⚠ De vinger van de gebruiker kan bekneld raken bij het sluiten van de steun.
- ⚠ De USB-stick kan een gevaar voor verstikking vormen. Bewaar de USB-stick op een veilige plek wanneer deze niet wordt gebruikt.
- ⚠ De stylus kan een steekgevaar voor de ogen vormen.

Schermb

- ⚠ Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is.
- ⚠ Verwijder de overlay van het aanraakscherm niet van het apparaat. De overlay beschermt de gebruiker van het apparaat tegen glassplinters als het scherm gebroken is.

Interferentie

- ⚠ Als u dit apparaat in een medische omgeving gebruikt, mag u dit apparaat niet in combinatie met een ander niet voor medisch gebruik goedgekeurd product gebruiken. Volg alle regels die op correct gebruik van draadloze apparaten van toepassing zijn.
- ⚠ Gebruik dit apparaat niet vlak bij RF-/RFID-stralingsbronnen; dit kan interferentie veroorzaken. Begeef u indien mogelijk uit de buurt van de interferentiebron.

Water

- ⚠ Als uw apparaat aan water blootgesteld is, dienen alle USB-poorten volledig droog te zijn voordat er een USB-kabel op wordt aangesloten. Schud het apparaat enkele keren met de USB-poort naar beneden gericht en veeg het apparaat vervolgens met een microvezeldoekje droog om vocht uit de USB-poorten te verwijderen. Controleer de USB-poorten opnieuw. Als in een USB-poort nog steeds vocht zichtbaar is, dient u het apparaat nogmaals te schudden en droog te veegen.
- ⚠ Uw apparaat is bedoeld voor gebruik tijdens gangbare communicatie-omstandigheden. Het is niet waterdicht. Spuit of spetter geen vloeistof rechtstreeks op het apparaat en wees uiterst voorzichtig als u het apparaat in de buurt van water gebruikt. Net als de meeste elektronische apparaten mag u dit apparaat nooit gebruiken als u zich in het water bevindt (bijvoorbeeld in een zwembad of bad).

Accu en opladen

- ⚠ Gebruik uitsluitend de bij uw apparaat meegeleverde acculader.
- ⚠ Accu's van versterkers en tablets kunnen niet door de klant worden vervangen.
- ⚠ Plaats het apparaat niet zodanig dat het bedienen of loskoppelen van het apparaat van de oplader wordt bemoeilijkt.
- ⚠ Volg altijd de instructies in deze handleiding bij het opladen van uw apparaat.
- ⚠ Steek geen objecten in de poort van de oplader. Dit kan schade aan de poort tot gevolg hebben.
- ⚠ Laad het apparaat niet op als het apparaat nat is en laad het niet op in een gebied waar het nat kan worden om elektrische schokken en schade aan uw apparaat te voorkomen. Hanteer het apparaat, de oplader of snoeren niet met natte handen.
- ⚠ Plaats het apparaat tijdens het opladen op een veilige, droge plek. Laad het apparaat niet buiten op.
- ⚠ Houd de oplader uit de buurt van water en knoei geen water of andere vloeistoffen op het apparaat.
- ⚠ Beperk contact met de achterkant van het apparaat tijdens het opladen tot een minimum.
- ⚠ De reisstekkeradapters van de acculader kunnen een gevaar voor verstikking vormen als deze niet op de oplader aangesloten zijn. Bewaar adapters die momenteel niet in gebruik zijn op een veilige plek.
- ⚠ Als de oplader, de kabel of het snoer beschadigd is, neemt u voor vervanging contact op met een servicevertegenwoordiger.

Hitte

- ⚠ Plaats het apparaat niet in een (huishoudelijk) apparaat zoals een magnetron of oven, naast een open vlam, of op of naast een hittebron zoals een fornuis of verwarming.
- ⚠ Laat het apparaat niet gedurende een langere periode in een warm voertuig achter.

Zuurstofrijke omgeving

- ⚠ Breng het apparaat niet met u mee in een zuurstofrijke omgeving (operatiekamer, zuurstoftent enzovoort).

Het oppervlak aanraken

- ⚠ Het aanraken van de buitenkant van het apparaat terwijl het apparaat bezig is met opladen kan bestaand huidletsel verergeren.
- ⚠ Jonge kinderen en personen met een verhoogd risico mogen niet in aanraking komen met de buitenkant van het apparaat dat wordt opgeladen als dit zou kunnen leiden tot verbranden van de huid.
- ⚠ Beperk contact met de achterkant van het apparaat tijdens het opladen tot een minimum.

Implanteerbare medische hulpmiddelen

Houd een draagbaar draadloos mobiel apparaat minstens vijftien (15) cm (zes [6] inch) van een implanteerbaar medisch hulpmiddel, zoals een pacemaker, implanteerbare cardioverter-defibrillator, nervus-vagusstimulator, shunt of stent vandaan om mogelijke magnetische interferentie met het medische hulpmiddel te voorkomen. Personen met dergelijke hulpmiddelen:

- Moeten hun mobiele apparaat **ALTIJD** minstens vijftien (15) cm (zes [6] inch) van hun implanteerbare medische hulpmiddel vandaan houden;
- Mogen het mobiele apparaat niet in een borstzak dragen;
- Moeten het mobiele apparaat onmiddellijk van zichzelf vandaan houden als er reden is om aan te nemen dat er interferentie met het implanteerbare medische hulpmiddel opgetreden is;
- Moeten de instructies van de fabrikant van het implanteerbare medische hulpmiddel lezen en opvolgen. Als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze mobiele apparaat in combinatie met een implanteerbaar medisch hulpmiddel *neemt u contact op met uw zorgverlener.*

Informatie over conformiteit

FCC-waarschuwing (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit hulpmiddel moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die kan leiden tot ongewenste werking.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat die niet expliciet door PRC-Salttillo goedgekeurd zijn, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

Opmerking: Deze apparatuur is aan tests onderworpen, waarbij is vastgesteld dat deze voldoet aan de voor digitale hulpmiddelen van klasse B van kracht zijnde bepalingen, conform deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die uitstralen; indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan deze apparatuur schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisie-ontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangespoord om de interferentie te proberen te verhelpen door een van volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan het stopcontact waar de ontvanger op aangesloten is.
- Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Verklaring van de FCC ten aanzien van blootstelling aan RF-straling en SAR-niveaus

Dit apparaat is getest op conformiteit met de specifieke absorptiefrequentie (SAR) voor apparaten die op het lichaam worden gedragen. De radio-module werd conform het FCC Bulletin OET 65C (01-01) geëvalueerd en voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in CFR 47 deel 2.1093 en 15.247 (b) (4) met betrekking tot RF-blootstelling aan radiofrequente apparatuur. Dit model voldoet aan de toepasselijke overheidsvoorschriften met betrekking tot blootstelling aan radiofrequentiegolven. De SAR-limiet is door de FCC op 1,6 W/kg vastgesteld.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te kunnen accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Canadese PMN

Dit product bevat achtergrondmuziek BGM220P22A.

Draadloze communicatieapparatuur

Draadloze communicatieapparatuur, zoals draadloze thuisnetwerkapparaten, mobiele telefoons, draadloze telefoons en het bijbehorende basisstation, en walkietalkies, kan invloed hebben op de werking van dit apparaat en moet minstens vijftien (15) cm (6 inch) van het apparaat vandaan worden gehouden.

Beperking van beoogd gebruik, derden en gegevensverlies

- PRC-Salttillo biedt geen garantie voor de functionaliteit van dit spraakhulpmiddel buiten de uitdrukkelijke garantie met betrekking tot het beoogd gebruik van de spraakcomputer. PRC-Salttillo biedt geen garantie voor software van derden en is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade of claims die voortkomen uit het al dan niet functioneren van enige technologie, websites, producten en software van derden. Voor aanvullende toepassingen kunnen verdere klinische bepalingen vereist zijn die buiten het bestek van een evaluatie voor spraakhulpmiddelen vallen.
- PRC-Salttillo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of claims van derden als mogelijk gevolg van het gebruik van dit product.
- PRC-Salttillo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies door verwijdering van gegevens als gevolg van reparaties vanwege apparaatstoringen of vervanging van de accu. Zorg ervoor dat u op andere media (computer) een back-up maakt van alle belangrijke gegevens om gegevensverlies te voorkomen.

Beoogd gebruik van het apparaat

Dit apparaat is een spraakhulpmiddel dat de communicatie van personen met een spraak- of taalstoornis bevordert. Dit apparaat en de bijbehorende taalprogramma's ondersteunen de gebruiker bij het beginnen van gesprekken, opvragen van informatie, het geven van meningen en het delen van gevoelens. Dit apparaat kan als draagbaar apparaat of op een tafelsteun worden gebruikt, en op een rolstoel worden gemonteerd. Het apparaat kan met het aanraakscherm worden bediend. Daarnaast biedt de dit apparaat uitgebreide mogelijkheden voor bediening met behulp van een of meer schakelaars.

Het apparaat bevat geen medicinale stoffen, menselijk bloed of plasmaderivaten en is niet met dierlijk weefsel vervaardigd.

Indicaties en contra-indicaties

Indicatie: Dit apparaat is een spraakhulpmiddel dat de communicatie van personen met een spraak- of taalstoornis bevordert.

Contra-indicatie: Dit apparaat is niet bedoeld om als apparaat voor noodoproepen of als het enige communicatiehulpmiddel te worden gebruikt.

Bestaande toepassingsrisico's

Er zijn geen bestaande toepassingsrisico's bekend.

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van het apparaat is vijf jaar. Voer het apparaat af in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en/of landelijke wetten met betrekking tot de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Beoogde gebruikers

De volgende personen behoren tot de beoogde gebruikers van het apparaat: de persoon die het apparaat voor communicatiedoeleinden gebruikt, diens communicatiepartner en/of de persoon die wijzigingen aan de apparaatinstellingen aanbrengt, softwarebestanden onderhoudt enzovoorts. De afbeeldingen en tekst in dit document helpen de gebruikers het apparaat optimaal te benutten.

Verwachte positie van gebruikers

Tijdens normaal gebruik bevindt het apparaat zich naar verwachting circa 30 tot 35 cm (12 tot 14 inch) van het lichaam vandaan. De afstand kan afhankelijk van het gebruik van het apparaat verschillen (draagbaar, of op een rolstoel of tafel gemonteerd).

Vereiste speciale vaardigheden, training of kennis

Voor het gebruik of onderhoud van het apparaat zijn/is geen speciale vaardigheden of training vereist. De afbeeldingen en tekst in dit document biedt gebruikers de informatie waarmee ze het apparaat optimaal kunnen benutten.

Instructies voor gebruik

- Alle functies van het apparaat kunnen veilig door de gebruiker worden gebruikt. Volg de instructies in deze handleiding voor de beste resultaten.
- Het apparaat of de versterker hoeft niet te worden uitgeschakeld als het apparaat dagelijks wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om het apparaat een keer per week opnieuw op te starten en dagelijks in de slaapstand te zetten.
- Neem contact op met PRC-Salttillo en de autoriteiten in uw land om ernstige incidenten te melden die met het apparaat verband houden.
- Voor informatie over reiniging van het apparaat, raadpleegt u "Uw apparaat reinigen en desinfecteren".

Contactinformatie voor hulp

Als u hulp nodig hebt bij de installatie, het gebruik of onderhoud van uw apparaat, of u wilt een onverwachte werking van het apparaat of een onverwacht gebeurtenis melden die met het apparaat verband houdt, neem contact op met uw distributeur.

Informatie over opslag

Schakel het apparaat en de versterker uit als u uw apparaat gedurende een langere tijd opslaat. Opgeborgen apparaten dienen elke zes maanden te worden opgeladen.

Verklaring van symbolen

In dit gedeelte wordt een uitleg gegeven over de symbolen die op uw PRC-Saltlillo-apparaten, accessoires of verpakking worden vermeld.



Het apparaat is conform de FCC (Federal Communications Commission).



Het apparaat voldoet aan de normen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu van de Europese Unie.



Het apparaat voldoet aan de eisen van de UK MDR 2002.



Het apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada.



Het volledige apparaat en accessoires, met uitzondering van de adapter, zijn toegepaste onderdelen van het type BF. "Toegepast onderdeel" verwijst naar een deel van het apparaat waarmee de gebruiker fysiek contact heeft wanneer deze het apparaat voor zijn beoogde functie gebruikt.



Het apparaat voldoet aan de geldende technische normen van ACMA voor telecommunicatie, radiocommunicatie, EMC en EME.



Voorzichtigheid! Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat om ongewenste gevolgen te vermijden.



Het apparaat zendt algemeen verhoogde, potentieel gevaarlijke niveaus van niet-ioniserende elektromagnetische straling uit.



Recycle elektronische apparatuur. Werp het apparaat niet bij het afval weg.

IP_

Het apparaat is beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en water.



Droog houden. Moet worden beschermd tegen vocht.



Het temperatuurbereik waaraan het apparaat kan worden blootgesteld tijdens gebruik, transport of opslag.



Het vochtigheidsbereik waaraan het apparaat kan worden blootgesteld tijdens gebruik, transport of opslag.



Het bereik van atmosferische druk waaraan het apparaat tijdens gebruik, transport of opslag veilig kan worden blootgesteld.



Volg de instructies voor gebruik. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Raadpleeg de instructies voor gebruik.



Het apparaat maakt gebruik van Bluetooth draadloze technologie.



Het modelnummer van het apparaat.



Het serienummer van het apparaat.



De fabricagedatum van het apparaat en de naam en het adres van de fabrikant.



Geeft een medisch hulpmiddel aan.



Erkende vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap



De verantwoordelijke persoon in het Verenigd Koninkrijk.

Classificaties

Bescherming tegen elektrische schokken: Inwendig gevoede apparatuur van klasse II
Beschermd tegen vaste voorwerpen van meer dan 1 mm en spatwater: IP44 (NovaChat 5)
Werkwijze: Constant
Type toegepast onderdeel: BF

Specificaties

Gewicht: 1,29 kg (2.85 lbs)
Afmetingen: 30,5 cm (12 inch) L × 21,3 cm (8.38 inch) B × 3,18 cm (1.25 inch) D
Scherm: 31,0 cm (12.2 inch) WQXGA TFT lcd-aanraakscherm
Levensduur accu: 10-12 uur, afhankelijk van individueel gebruik en vermogensinstellingen
Software-/besturingssysteem: Chat-software/Android
Standaard onderdelen: Tablet, versterker, handvat, steun, rolstoelmontageplaat, behuizing, acculader, USB-stick, stylus
Accessoires: Afdekrasters, TouchGuides, USB-kabel, draagtas, schouderriem, ceintuur, riembevestigingen

Gebruiksomgeving

Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Relatieve vochtigheid: 15% tot 93%
Atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa
Het apparaat moet tijdens gebruik worden beschermd tegen vocht.

Vervoers- en omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Tijdens het opladen is de maximale omgevingstemperatuur: 30°C.
Relatieve vochtigheid: 10% tot 85%
Atmosferische druk: 80 kPa tot 106 kPa
Het apparaat moet tijdens vervoer en opslag worden beschermd tegen vocht.

Temperaturomstandigheden voor direct contact

Bij een omgevingstemperatuur van 40 °C (104 °F) kan de oppervlaktetemperatuur van de achterzijde van het apparaat tijdens het opladen wel 11 °C (51,8 °F) toenemen, tot een temperatuur van 51 °C (123,8 °F). Om deze reden dient u contact met de achterzijde van het apparaat tijdens het opladen tot een minimum te beperken.

- ⚠ Het aanraken van de buitenkant van het apparaat terwijl het apparaat bezig is met opladen kan bestaand huidletsel verergeren.
- ⚠ Jonge kinderen en personen met een verhoogd risico mogen niet in aanraking komen met de buitenkant van het apparaat dat wordt opgeladen als dit zou kunnen leiden tot verbranden van de huid.
- ⚠ Beperk contact met de achterkant van het apparaat tijdens het opladen tot een minimum.

Contactinformatie



Manufacturer

Prentke Romich Company

1022 Heyl Rd
Wooster, OH 44691
USA
Tel.: +1 330 262-1984 · +1 800 262-1984
Fax: +1 330 262-4829
Email: info@prentrom.com
Web: www.prc-salttillo.com/

EC REP Erkend Vertegenwoordiger in de EU

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Germany
Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0
Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29
Email: info@prentke-romich.de
Web : www.prentke-romich.de/



EU-importeur

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Germany
Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0
Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29
Email: info@prentke-romich.de
Web : www.prentke-romich.de/

UK REP VK-verantwoordelijke en -importeur

Liberator Ltd

"Whitegates", 25-27 High Street
Swinstead, Lincolnshire NG33 4PA
UK
Tel.: +44 (0) 1733 370 470
Fax: +44 (0) 1476 552 473
Email: info@liberator.co.uk
Web: www.liberator.co.uk/

Erkend Vertegenwoordiger in Australië

Liberator Pty Ltd

Level 4, 2-4 Holden Street, Ashfield, NSW, 2131
Australia
Tel: +61 (0) 8 8211 7766
Fax: +61 (0) 8 8211 7733
Email: info@liberator.net.au
Web: www.liberator.net.au/