

NOVACHAT 7



GERÄTEHANDBUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Hinweise

NovaChat ist ein Warenzeichen der Saltillo Corporation.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation

Android ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Samsung und Galaxy Tab sind eingetragene Warenzeichen Samsung Electronics, Inc.

Android Market ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Ivona Copyright © 2001-2010, IVO Software Sp.z o.o.

Acapela ist ein Warenzeichen der Acapela Group.

Picture Communication Symbols ist ein Warenzeichen der Dynavox Mayer-Johnson Inc.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

SymbolStix ©News2You. „Die mitgelieferte Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.“

Weitere hier verwendete Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

NovaChat-Editor-CD

NovaChat-Editor ist Eigentum der Saltillo Corporation.

“Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.

Saltillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des NovaChat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat-Gerät verwendet wird.

NovaChat 7-Bedienungsanleitung geschrieben von Jürgen Babst

Version 1.00 • Oktober 2012

© Prentke Romich GmbH 2012

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich Company oder der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des NovaChat 7 oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des NovaChat 7 oder der hierin gemachten Angaben ergeben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Prentke Romich Company vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht laut Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG den Grenzwerten für Medizinprodukte der Klasse 1.

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernsehtechniker weitere Ratschläge geben.

Umgebungsbedingungen

Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung: 0°C - 45°C, Temperatur bei Lagerung: -20°C - 50°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40°C.



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31

D - 34119 Kassel

Tel. (05 61) 7 85 59-0















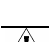

Fax (05 61) 7 85 59-29

eMail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de

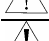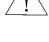Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

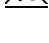-  Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
-  Den NovaChat niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!
-  Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels des Ladegeräts, evtl. Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden.
-  Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.
-  Der NovaChat verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
-  Entfernen Sie KEINE fest angebaute Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten!
-  Der im NovaChat eingebaute Lithium-Ionen-Akku darf niemals in der Nähe von offenem Feuer oder in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb von 45° C gelagert werden, da der Akku explodieren könnte. Den Akku nicht öffnen. Sollte der Akku ausgetauscht werden müssen, den alten Akku nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern an einer der öffentlichen Sammelstellen für Altbatterien abgeben oder an PRD zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückschicken.
-  Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.
-  Die für das Ladegerät erforderliche Netzspannung beträgt 110-240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Ladegerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an.
-  Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 27 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.
-  Nicht gedacht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe.
-  Nicht gedacht zum Anschluss an bzw. zum Verbinden mit Nicht-Medizinprodukte(n).
-  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkwellen abstrahlenden Geräten, da dabei Interferenzen auftreten können. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Quelle der Interferenz.
-  Halterungs- und Befestigungssysteme dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert werden. Fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
-  Saltilo Corporation übernimmt keine Verantwortung bei einem Datenverlust aufgrund einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern.
-  Kabel und Gurte bergen eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr. Achten darauf dass keine Schlingen vorhanden sind.

Implantierbare Medizinprodukte

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem tragbaren Gerät wie dem NovaChat und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potentielle Interferenzen mit dem NovaChat zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde,

- sollten **IMMER** einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen NovaChat-Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist;
- sollten das NovaChat-Gerät nicht in einer Brusttasche oder am Gürtel in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da das NovaChat-Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Das NovaChat-Gerät sollte auf der dem implantierten Gerät abgewandten Seite getragen werden;
- sollten das NovaChat-Gerät **SOFORT AUSSCHALTEN**, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- sollten alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung Ihres mobilen NovaChat-Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	2
Sicherheitshinweise	3
Willkommen beim NovaChat	6
Den NovaChat 7 kennen lernen	7
Tasten in der Statuszeile:	7
Den Akku laden	8
Batteriekontrolle	9
Den NovaChat ein- und ausschalten	10
Den NovaChat ein- und ausschalten	10
Den NovaChat herunterfahren	10
Den NovaChat hochfahren	10
Der NovaChat-Verstärker	11
Den NovaChat-Verstärker ein- und ausschalten	11
Den NovaChat-Verstärker einschalten	11
Den NovaChat-Verstärker ausschalten	11
Den NovaChat-Verstärker mit dem Tablet verbinden	12
Verstärker und Tablet erneut verbinden	12
Die Lautstärke regeln	13
Tasten anschließen	13
Kopfhörer verwenden	13
Den Tischständer verwenden	14
Den Tragegriff entfernen	15
Der Touchscreen-Bildschirm	16
Stylus verwenden	16
Reinigung und Pflege	16
Der Android-Startbildschirm	17
ChatPC-Anwendung beenden (offenes System)	17
ChatPC-Anwendung starten (offenes System)	17
Index	18

Willkommen beim NovaChat

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer NovaChat-Kommunikationshilfe!

Die NovaChat-Geräte verbinden die Leistungsfähigkeit der ChatPC-Software von Saltillo mit der Haltbarkeit und Portabilität eines modernen Tablet-Computers. Durch das geringe Gewicht kann das NovaChat-Gerät überall hin mitgenommen werden.

Der NovaChat verfügt sowohl über digitalisierte (natürliche) Sprache als auch synthetische Sprache (computergenerierte Sprache). Optional steht eine Wortvorhersage zur Verfügung. Neben der direkten Ansteuerung über das Display bietet der NovaChat die Möglichkeit der Ansteuerung über 1 oder 2 Tasten im so genannten Scanningverfahren.

Der NovaChat wird komplett mit der PC-Software NovaChat-Editor geliefert, mit deren Hilfe Sie bequem alle Änderungen am Vokabular vornehmen können, um diese dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in den NovaChat zu übertragen. Änderungen jedoch auch direkt auf dem Gerät durchgeführt werden.


Das Übertragen von Vokabulardateien zwischen PC und NovaChat erfolgt bequem über das mitgelieferte USB-Sync-Kabel.

Den NovaChat 7 kennen lernen



Zum Ein- und Ausschalten dient die Ein-/Aus-Taste oben links auf dem NovaChat.

Tasten in der Statuszeile:

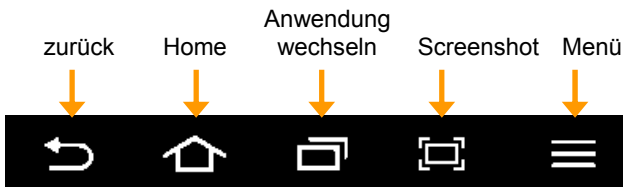

Die Tasten „Home“ und „Anwendung wechseln“ haben keine Funktion, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

Die Taste „zurück“ schließt geöffnete Fenster, Menüs und Seiten.

Die Taste „Menü“ öffnet das ChatPC-Menü:



Den Akku laden

Der NovaChat 7 verfügt über 2 eingebaute Akkus, einen im Tablet und einen im Verstärker.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät zum Laden des NovaChat 7.

Das mitgelieferte Netzteil hat 2 Ladestecker.

- Schließen Sie den großen Stecker an die Ladebuchse des Tablets an (Abbildung Pfeil „1“).
- Schließen Sie den kleinen Stecker an die Mini-USB-Ladebuchse des NovaChat-Verstärkers an (Abbildung Pfeil „2“).

Schalten Sie das Tablet beim Laden durch kurzes Drücken der I/O-Taste auf der Oberseite des Tablets aus.

Die rote LED neben der Ladebuchse des NovaChat-Verstärkers leuchtet während des Ladevorgangs. Ist der Akku des NovaChat-Verstärkers vollständig geladen, blinkt die LED.


Den Ladezustand des Tabletakkus sehen Sie jederzeit in der Statuszeile des Tablets



Bei normaler Nutzung sollten Sie den NovaChat 7 jede Nacht aufladen.



Batteriekontrolle

Der Ladezustand des Tabletakkus wird ständig ganz rechts in der Statuszeile des Tablets  angezeigt.

Um die aktuelle Kapazität der Akkus zu kontrollieren:

- Drücken Sie die Taste MENÜ in der Statuszeile des Tablets:



- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das Menü „System“.
- Wählen Sie „Batterie- und Ladezustand“
- Kapazität und Ladezustand der beiden Akkus werden angezeigt:



Den NovaChat ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten dient die Ein-/Aus-Taste oben links auf dem NovaChat.



Den NovaChat ein- und ausschalten

Um den NovaChat in der täglichen Benutzung ein- und auszuschalten, tippen Sie jeweils kurz auf die Ein/Aus-Taste. Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt umgehend. Es ist nicht nötig, den NovaChat zwischen zwei Benutzungen komplett herunterzufahren. Um Energie zu sparen, kann die Beleuchtung des Bildschirms nach einer einstellbaren Zeit automatisch ausgeschaltet werden. Dies erfolgt im Menü *Einstellungen – System – Display / Energie – Bildschirm ausschalten*.

Den NovaChat herunterfahren

Wollen Sie den NovaChat einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzen, können Sie ihn komplett herunterfahren.

- Drücken Sie dazu die Ein/Aus-Taste für ca. 1 Sekunde.
- Wählen Sie im Menü die Option „Ausschalten“. Das Tablet fährt herunter.

Tablet-Optionen	
	Stumm-Modus Sound ist AN
	Offline-Modus Offline-Modus deaktiviert
	Ausschalten

Den NovaChat hochfahren

Ist der NovaChat komplett ausgeschaltet (heruntergefahren):

- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint.

Der NovaChat-Verstärker

Der rückseitig angebrachte Verstärker hat eine eigene Energieversorgung und kommuniziert über den Bluetooth-Funkstandard mit dem Tablet.

Standardmäßig kann der Verstärker eingeschaltet bleiben.

Sollte in speziellen Umgebungen (im Flugzeug, in bestimmten medizinischen Einrichtungen) die Verwendung von Bluetooth untersagt sein, so drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Tablets für ca. 1 Sekunde und wählen Sie im Menü die Option „Offline-Modus“. Schalten Sie auch den NovaChat-Verstärker aus (siehe unten).

Tablet-Optionen	
	Stumm-Modus Sound ist AN
	Offline-Modus Offline-Modus deaktiviert
	Ausschalten

Um Bluetooth einzuschalten, gehen Sie genauso vor. Deaktivieren Sie den Offline-Modus wieder.

Den NovaChat-Verstärker ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten des Verstärkers dient die kleine Taste links neben der Mini-USB-Ladebuchse.



Den NovaChat-Verstärker einschalten

Drücken und halten Sie die Taste ca. 1 Sekunde. Die grüne LED blinkt 5-mal.

Den NovaChat-Verstärker ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste, bis die grüne und die rote LED einmal blinken.

Bei ausgeschaltetem Verstärker oder im Offline-Modus erfolgt die Wiedergabe über die Lautsprecher des Tablets.

Den NovaChat-Verstärker mit dem Tablet verbinden

Um den Verstärker mit dem Tablet zu koppeln und zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker eingeschaltet und geladen ist.
2. Öffnen Sie das Menü *Einstellungen – System – Bluetooth / Lautsprecher*. Das Tablet beginnt nach dem Verstärker zu suchen.
3. Wurde der Verstärker gefunden, erscheint ein Eintrag „NOVA AMP“ im Display

NOVA AMP (00:07:80:53:3D:35)

4. Tippen Sie auf den Eintrag, um Tablet und Verstärker zu verbinden. Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „VERBUNDEN“ an.
5. Schließen Sie das Menü wieder.

Verstärker und Tablet erneut verbinden

Sollte die Bluetooth-Verbindung zwischen Tablet und Verstärker verloren sein:

1. Drücken und Halten Sie die Taste „zurück“ auf dem Tablet:



2. Ein Fenster erscheint: „Wollen Sie die Anwendung beenden?“ (offenes System) bzw. „Wollen Sie die Anwendung neu starten?“ (geschlossenes System)
3. Drücken Sie die Taste „Ja“.
4. Offenes System: Starten Sie die ChatPC-Anwendung neu durch Tippen auf das Symbol auf dem Home-Screen:



5. Geschlossenes System: Die ChatPC-Anwendung wird neu gestartet.
5. Die Verbindung sollte automatisch wieder hergestellt werden.

Die Lautstärke regeln

Sie können die Lautstärke direkt auf dem Gerät einstellen.


Drücken Sie den linken Teil der Lautstärkewippe, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie den rechten Teil der Lautstärkewippe, um die Lautstärke zu verringern.



Sie können die Lautstärke auch über entsprechend belegte Tasten in Ihrem Vokabular regeln und die Sprachausgabe ausschalten. Dafür stehen die Funktionen „leiser“, „lauter“ und „Sprache ein/aus“ zur Verfügung.


Tasten anschließen

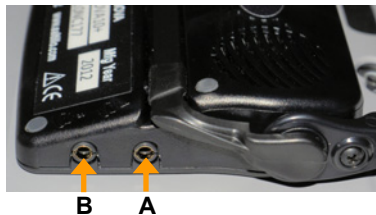

Wenn Sie mit einer externen Taste scannen, schließen Sie diese an die Buchse „A“ an der rechten Seite des Verstärkers an.

Wenn Sie mit zwei externen Tasten scannen, schließen Sie diese an die Buchsen „A“ und „B“ an der rechten Seite des Verstärkers an.

Kopfhörer verwenden

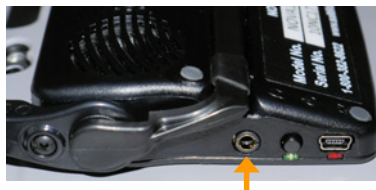

Wenn Sie auditives Scanning (Ansagescanning) verwenden, schließen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an der linken Seite des Verstärkers an.

Den Tischständer verwenden

Durch den rückseitig angebrachten Verstärker liegt der NovaChat in einem Winkel von ca. 10° zum Benutzer geneigt, was eine angenehme Nutzung ermöglicht. Sie können den Winkel auf ca. 15° erhöhen, indem Sie den Aufstellfuß herausklappen.

Der Aufstellfuß wurde zum Schutz vor Quetschungen so konstruiert, dass er im Falle eines Stoßes oder harten Schlags aus dem Gerät herauspringt.

Sollte der Tischständer herausgesprungen sein, biegen Sie die beiden Enden leicht nach außen und setzen Sie ihn wieder in die dafür vorgesehenen Aussparungen (die beiden großen Öffnungen am Ende des Tragegriffs) ein.



Den Tragegriff entfernen

Der NovaChat wird mit einem fest montierten Tragegriff geliefert.

Um den Griff zu entfernen:

- Nehmen Sie den Aufstellfuß ab, indem Sie die beiden Enden, mit denen er am Verstärker befestigt ist, leicht nach außen biegen
- Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Griff am Verstärker befestigt ist.
- Nehmen Sie den Griff ab, indem Sie die beiden Enden, mit denen er am Verstärker befestigt ist, leicht nach außen biegen.



Verwahren Sie Griff, Aufstellfuß und Schrauben an einem sicheren Ort auf.



Kleinteile von Kindern fernhalten! Verschluckungsgefahr!

Zum Montieren des Tragegriffs gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Der Touchscreen-Bildschirm



Sicherheitshinweis: Im NovaChat ist ein Flüssigkristalldisplay (LCD, Liquid Crystal Display) eingebaut. Sollte das Display jemals zerbrechen und Sie in Kontakt mit den Flüssigkristallen kommen, spülen Sie die Kristalle unter fließendem Wasser ab und waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich.



Sicherheitshinweis: Das Display besteht aus Glas, sollte das Display jemals zerbrechen, schützen Sie sich vor Glassplittern.



Hinweis: Benutzen Sie für Eingaben auf dem Touchscreen keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Obwohl Sie Eingaben mit den Fingern machen können, empfehlen wir zur Verwendung der Menüs auf dem NovaChat die Benutzung des mitgelieferten Stylus.

Stylus verwenden

Der NovaChat wird mit einem Bedienstift (Stylus) geliefert. Falls Sie das NovaChat-Gerät nicht mit den Fingern bedienen wollen oder können, können Sie den Stift verwenden, um Eingaben vorzunehmen.



Der Stift verfügt über eine Öffnung an der Spitze, so dass sie ihn mit einem Band oder Lanyard am NovaChat-Gerät befestigen können.

Reinigung und Pflege


Reinigung

Zur Reinigung des NovaChat 7 wischen Sie ihn bitte mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser an das Gerät gelangt.

Desinfizieren


Zum Desinfizieren mischen Sie $\frac{1}{4}$ Glas Essig mit 1 Glas Wasser. Befeuchten Sie ein Tuch mit dem Gemisch und wischen Sie das Gerät damit ab. Lassen Sie das Gerät vor Wiederbenutzung gründlich trocknen.

Der Android-Startbildschirm

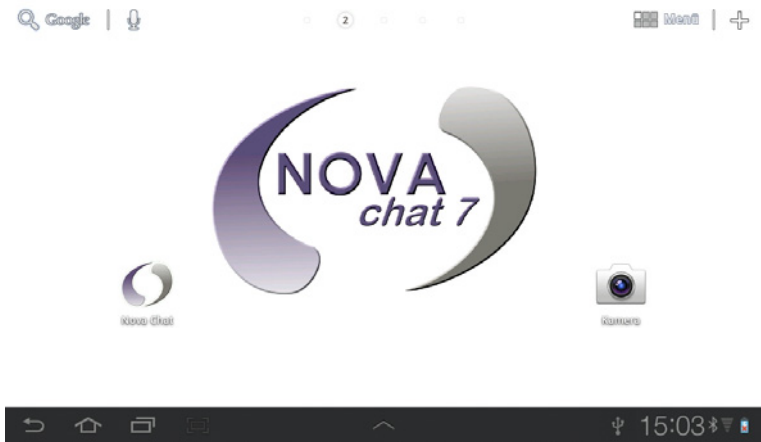


ChatPC-Anwendung beenden (offenes System)

So können Sie die ChatPC-Anwendung beenden:

Drücken und Halten Sie die Taste „zurück“ auf dem Tablet: . Ein Fenster erscheint: „Wollen Sie die Anwendung beenden?“ Drücken Sie die Taste „Ja“.

oder

Drücken Sie die Taste „Home“ auf dem Tablet: .

ChatPC-Anwendung starten (offenes System)

Wurde die ChatPC-Anwendung beendet, können Sie sie jederzeit wieder starten durch Antippen des Programm-Symbols:



Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, beenden Sie andere Apps, bevor Sie ChatPC starten.

Index

A

Akku laden 8
Akkuskontrolle 9
Android-Startbildschirm 17

B

Batteriestatus 9

C

CE-Konformitätserklärung 2
ChatPC-Anwendung beenden 17
ChatPC-Anwendung starten 17
ChatTalker laden 8

D

Desinfizieren 16

H

Hinweise 2

I

Implantierbare Medizinprodukte 4
Inhaltsverzeichnis 5

K

Kopfhörer verwenden 13

L

Ladezustandskontrolle 9
lauter 13
Lautstärke regeln 13
leiser 13

N

NovaChat ausschalten 10
NovaChat einschalten 10
NovaChat herunterfahren 10
NovaChat hochfahren 10
NovaChat-Verstärker 11
NovaChat-Verstärker ausschalten 11
NovaChat-Verstärker einschalten 11
NovaChat-Verstärker mit dem Tablet verbinden 12

P

Pflege 16

R

Reinigung 16

S

Sicherheitshinweise 3
Stylus 16

T

Tasten anschließen 13
Tischständer 14
Touchscreen-Bildschirm 16
Tragegriff 15

U

Umgebungsbedingungen 2

V

Verbinden (NovaChat-Verstärker) 12
Verstärker und Tablet erneut verbinden 12



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D-34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
eMail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de