

# NovaChat-Gerätesoftware-Update

Prentke Romich GmbH  
Tel.: 0561 - 78 55 9-0 · Fax: 0561 - 78 55 9-29  
Goethestr. 31 · D-34119 Kassel  
Internet: www.prentke-romich.de · E-Mail: info@prentke-romich.de




## WICHTIGER HINWEIS


**Das Update geschieht auf eigene Gefahr!**

**Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Prentke Romich GmbH keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.**

**FÜHREN SIE VOR DEM UPDATE AUF JEDEN FALL EINE DATENSICHERUNG DURCH, INDEM SIE ALLE GENUTZTEN VOKABULARE IN DEN NOVACHAT-EDITOR ÜBERTRAGEN!**


## ANLEITUNG

1. Prüfen Sie die in Ihrem NovaChat aktuell enthaltene Version der Software. Drücken Sie die Taste MENÜ  auf dem Tablet. Wählen Sie den Reiter „Hilfe“. Wählen Sie die Option „Über NovaChat...“. Im Beispiel ist die Version 1.6.0 installiert:

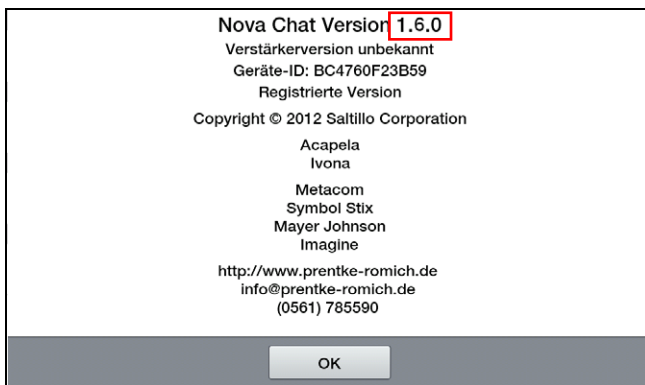


Ein Update kann nur durchgeführt werden, wenn die Versionsnummer des Updates größer ist als die Versionsnummer der installierten Software (im Beispiel müsste mind. 1.7.0 installiert werden).


2. Laden Sie die zu Ihrem NovaCha-Gerät passende Update-Datei (z.B. „NOVA chat 1.6.0 to 2.0.2 Software Update“) von der Saltillo-Homepage herunter.
3. Verbinden Sie Ihr NovaChat-Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer.
4. Nur NovaChat 5: wählen Sie die Option „USB-Speicher verbinden“. NovaChat 7, NovaChat 8, NovaChat 10 und NovaChat 12 wechseln automatisch in den Transfermodus.
5. Öffnen Sie auf dem Computer den Windows Explorer und suchen Sie das Tablet

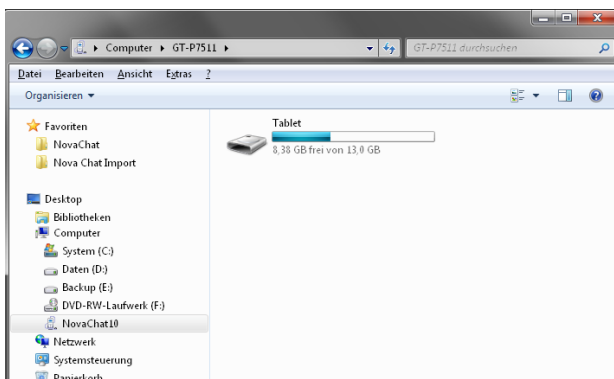

6. Navigieren Sie zum Verzeichnis „\ChatPC\update“ und öffnen Sie es. Der Ordner sollte leer sein.

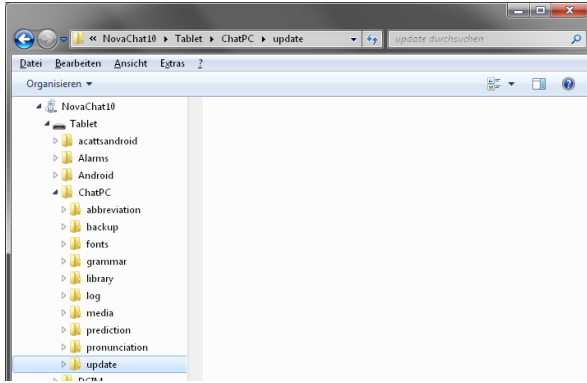

7. Öffnen Sie die in Schritt 2 heruntergeladene ZIP-Datei und kopieren Sie den darin enthaltenen Ordner „update“ in den Ordner „ChatPC\update“ des Tablets. Auf dem Tablet entsteht so ein Ordner „ChatPC\update\update“.

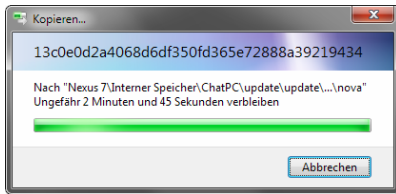

8. Warten Sie ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.


9. Nur NovaChat 5: wählen Sie die Option „Ausschalten“.

10. Trennen Sie das NovaChat-Gerät vom Computer, indem Sie das USB-Kabel abziehen.

11. Schließen Sie das Netzteil an das NovaChat-Gerät an.


12. Wenn die Anwendung „NovaChat“ auf dem Tablet nicht ausgeführt wird, starten Sie sie zunächst.


13. Das Update sollte automatisch erkannt werden. Klicken Sie „OK“, um das Update zu starten.

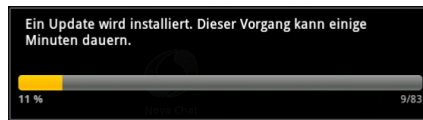

14. Das Update wird installiert

15. Folgende Sie den Anweisungen auf dem NovaChat-Gerät. Es werden eine oder mehrere Anwendungen installiert, pro Anwendung müssen Sie ggf. das Ersetzen erlauben und „OK“ drücken.

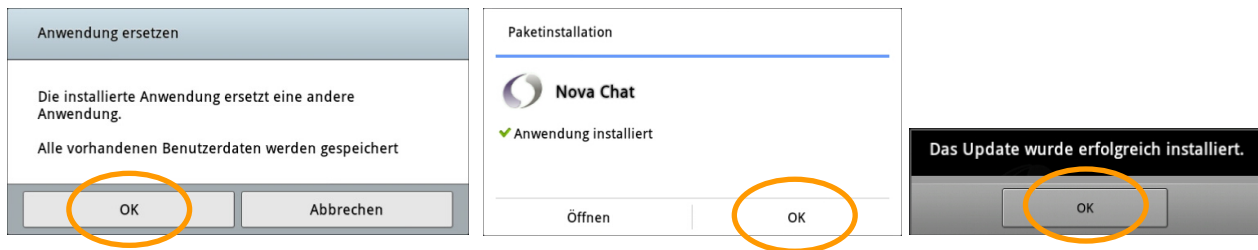

16. Anschließend startet das NovaChat-Gerät. Prüfen Sie die in angezeigte Versionsnummer. Drücken Sie die Taste MENÜ  auf dem Tablet. Wählen Sie den Reiter „Hilfe“. Wählen Sie die Option „Über NovaChat...“.

